

M88 耳の診察シミュレータ “EAR”



11222-000 ￥200,000 (税込￥210,000)

監修●日本医学教育学会臨床能力教育ワーキンググループ  
協力●名古屋大学大学院医学系研究科 医局長 曾根三千彦

- 仕様 ●モデル：成人胸部および頭部 実物大  
●材 質：軟質特殊樹脂(頭部・耳部)・硬質樹脂(胸部)  
●大きさ：W42×D22×H38cm(本体モデル部)  
●ケース外寸：約W69×D49×H27cm
- 構成 ●モデル本体×1  
●耳ユニット×10症例(各左右1組)  
●除去練習用異物×1セット(耳垢・模擬異物)  
●異物除去練習用耳ユニット×1組  
●タルカムパウダー



●眼鏡を使用して、鼓膜および外耳道の状態をアセスメントできます。

外耳道内部の診察手技の習得に。直像眼鏡を使用し、オリジナル鼓膜症例画像データ入りの耳ユニットを交換して「真珠腫」「中耳炎」などの診察ができます。

耳垢・異物除去の練習も可能です。

- ①市販の直像眼鏡を実際と同じ方法で使用して外耳道の診察ができます。
- ②耳ユニットは解剖学的に正確な形状をしており、外耳道をまっすぐにする手技を行うことで、症例が観察できるよう設計されています。
- ③マスク部は軟質素材で製作、頸部は左右に偏屈し、耳を少しひっぱるなど実際の診察に近い状態で練習できます。
- ④左右どちらでも使用でき、耳は簡単に着脱できます。
- ⑤症例は、正常を含む代表的な病変症例を10症例用意しています。
- ⑥外耳道での異物除去の練習や耳垢を取る練習もできます。

交換部品



耳セット一式 ケース付  
11222-010 ￥100,000  
(税込￥105,000)

症例入り耳一对  
11222-020 ￥9,000  
(税込￥9,450)



正常鼓膜(R)



正常鼓膜(L)

手技

- 異物除去手技(玩具鉄砲玉・模擬耳垢・スポンジ片)

症例

- |               |             |
|---------------|-------------|
| ①正常鼓膜         | ⑥中耳炎(急性化膿性) |
| ②正常鼓膜(外耳道が太い) | ⑦真珠腫        |
| ③中耳炎(漿液性)     | ⑧鼓室硬化症      |
| ④中耳炎(粘性)      | ⑨外傷性鼓膜穿孔    |
| ⑤中耳炎(慢性化膿性)   | ⑩耳垢閉塞       |

\*なお、症例は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。