

取扱説明書

目次

製品の特長	P.2
製品構成	P.2
ご使用上の注意	P.3
ご使用方法	P.3

このたびは耳の診察シミュレータをお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は耳鏡での外耳道や鼓膜観察の理解を深め、異物除去手技の上達を目的としたシミュレーションモデルです。医学・看護教育用の補助機器としてご使用ください。



ご使用前に

構成・仕様のご確認


M88 耳の診察シミュレータ

製品の特長

市販の直像耳鏡を実際と同じ方法で使用して、鼓膜および外耳道の、正常2種と代表的な8つの症例が診察できます。

耳ユニットは、柔軟性素材を採用しており、耳介の引き上げなど実際に近い状態で練習できます。また付属の異物や耳垢で除去練習練習ができます。

頸部にフレキシブルが組み込まれていますので頭部を軽度屈曲させて使用できます。

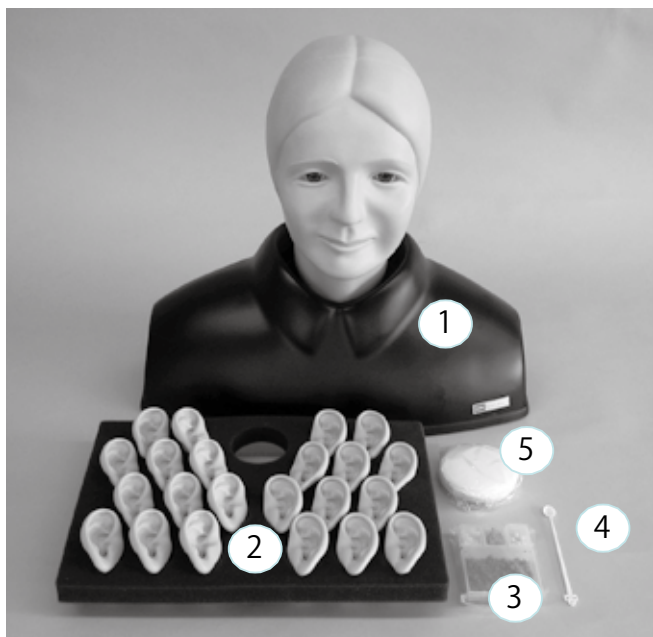

<構成>

- ① 本体
- ② 耳ユニット（左右各 11）
- ③ 小ケース：除去手技練習用異物
（耳垢・耳垢膜・玩具鉄砲玉・スポンジ片）
- ④ 異物セット用スプーン
- ⑤ ベビーパウダー

<仕様>

材質：軟質特殊樹脂（マスク部・耳部）
硬質樹脂（胸部）

大きさ：約 W 42 × D 32 × H 42 cm

<耳ユニットNo.1～No.11>

1. 正常鼓膜
2. 正常鼓膜（外耳道が太い）
3. 中耳炎（漿液性）
4. 中耳炎（粘液性）
5. 中耳炎（慢性化膿性）
6. 中耳炎（急性化膿性）
7. 真珠腫
8. 鼓室硬化症
9. 外傷性鼓膜穿孔
10. 耳垢閉塞
11. 異物除去手技用（鼓膜画像なし）

ご使用上の注意

- ・マスクや耳は人体同様にやさしく扱ってください。
- ・耳鏡を必要以上に押し込まないで下さい、鼓膜画像が破損する恐れがあります。
- ・本体にマジック等で書き込みをされますと、染み込んで消えなくなります。
- ・表面の汚れはウエス等で水かアルコールにて拭き取り、乾燥してからベビーパウダーを塗布しておいてください。

商品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観などが写真と異なる場合がございますので予めご了承ください。

使用方法



マスク部に必要とされる耳（前頁リスト参照）を図のように挿入してご使用ください、入りにくい場合はベビーパウダを挿入口に塗布すると入れやすくなります。外すときはマスクに対して直角に引き抜いてください。



頸部は図のように手で頭部を押すと傾けることができます。



小ケース入りの耳垢・異物は、異物除去練習用耳 No.11 の耳を使って、練習してください。

※玩具鉄砲玉・模擬耳垢・スポンジ片が入っています。

後始末について

使用後は頸部の傾きを元に戻してから専用ケースに収めて保管してください。

別売消耗部品のご案内

11222-010
耳セット一式ケース入り

11222-020
症例入り耳ユニット 一对 ※ご注文時症例番号をご指定ください。

" ご使用の前に必ず説明書をお読みください。

・本製品についてのお問い合わせや不具合等ございましたら、
お手数ですがご購入の販売店、または下記までご連絡下さい。

商品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観などが写真と異なる場合がございますので予めご了承ください。

製造元



● <http://www.kyotokagaku.com>

e-mail ● rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

■本社・工場

〒 612-8388 京都市伏見区北寝小屋町 15 番地
TEL : 075-605-2510 (直通)
FAX : 075-605-2519

■東京支店

〒 113-0033 東京都文京区本郷三丁目 26 番
6号 NREG 本郷三丁目ビル 2 階
TEL : 03-3817-8071 (直通)
FAX : 03-3817-8075