

Arterial Puncture Wrist

動脈採血シミュレータ

M99 11351-000 ¥298,000 (税込¥312,900)

橈骨動脈の穿刺・動脈血採取の トレーニングに!

指先に触れるリアルな動脈拍動を特殊なポンプが実現。
穿刺時の感触のリアルさを追求。
シンプルな操作性。



監修/指導

- 京都医療センター総合内科 医長
前京都大学 総合診療部

小山 弘

動脈穿刺は採血やカテーテル留置を目的として行われますが、採血を目的とすることが多く、橈骨動脈・大腿動脈・上腕動脈などで行われます。橈骨動脈の穿刺が望ましいとされていますが、動脈が細いことから比較的難しく、失敗した場合苦痛を伴います。一回目の穿刺を失敗すると2回目以降の穿刺はより困難となるため十分にトレーニングする必要があります。



動脈採血シミュレータ

M99 Arterial Puncture Wrist

11351-000 ¥298,000 (税込¥312,900)

動脈採血シミュレータを用いたトレーニング



指の先で拍動を確認



注射器を確認



穿刺-刺入 (45度~60度の角度)



穿刺-採血



止血

特長

- リアルな拍動を自動ピストン構造のポンプが実現、動脈の拍動を確認でき臨場感あふれる練習ができます。
- 血管の走行をできる限り正確に再現しています。
- 実際に近い感触の皮膚素材でリアルな手技を実現します。
- 穿刺部位の皮膚パッドを交換することにより、繰り返し練習できます。
- 実際に近い血液の逆流（バックフロー）が確認できます。
- 穿刺部位の表面に針跡が残りにくい素材を使用しています。
- 接続が簡単で水漏れしにくい工夫がなされています。
- 循環ポンプでチューブの洗浄があつという間にできます。

商品仕様・構成



部品名	数量
腕モデル	1
動脈穿刺部位 *下記参照	1式
循環ポンプ AC100V	1
腕台	1
模擬血液 (粉末30g)	1
広口びん	2
スプーン	1
接続チューブ 黒・赤	各1
ビニールシート	1
説明書	1



穿刺部位の構成内容

模擬皮膚 (大)	2
模擬皮膚 (小)	2
模擬血管	4本
シリコンベルト	1
骨台	1

交換部品



交換用模擬皮膚 大小2個組
11351-010 ¥2,500
図¥1,000 (税込¥2,625)



交換用シリコンベルト 4本組
11351-030 ¥2,500
図¥500 (税込¥2,625)



交換用模擬血管 4本組
11351-040 ¥8,500
図¥1,000 (税込¥8,925)

●製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外觀など予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。

取扱店

製造元

株式会社 京都科学

URL ● <http://www.kyotokagaku.co.jp> e-mail ● rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店

〒112-0002 東京都文京区小石川15丁目20-4
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075

