



腸管シート of 使用方法


下記の注意事項をお読みいただき、腹腔鏡下での腸管縫合手技の実習の際にご使用ください。

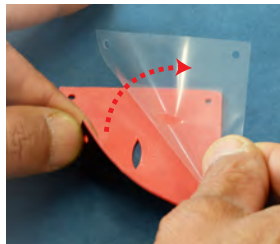


1. 実習直前に、まず粘膜層 (赤色のシート・裏面は黒) の透明フィルムをはがしてください。

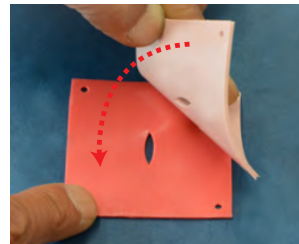

2. 次に筋層 (肌色のシート) の透明フィルムの貼っていない面を下にして、透明フィルムをはがした粘膜層の上に重ねます。

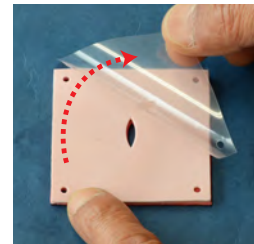

3. 最後に筋層の透明フィルムをはがします。

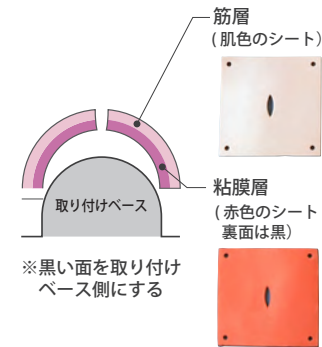

【ご注意】

- 購入時のケースで保管してください。ケースから取り出して保管すると腸管シートが縮み、正しく評価できなくなることがあります。
- 取り出した腸管シートを再度収納する場合は、透明フィルムがはがれていないことを確認後、シートどうしの間に透明フィルムがはさまるようにして納めてください。
- フィルムをはがした面を手で触れるとベタベタすることがありますが、人体や手技に影響はありません。
- シートの上に印刷物を置いたり、ボールペンなどで書き込んだりしないでください。インクが吸収され、画像評価ができなくなります。