


このたびは、当社の「内視鏡用気管支」をお買い上げいただきありがとうございます。

本製品は、気管支の分岐や気管支内部を解剖学的に正確に再現した内視鏡操作トレーニング用の気管支モデルです。


医学教育用実習教材としてご使用ください。




1. 内視鏡用気管支を取り付ける DAM シミュレータトレーニングモデルの胸部皮膚とマスクを取りはずします。

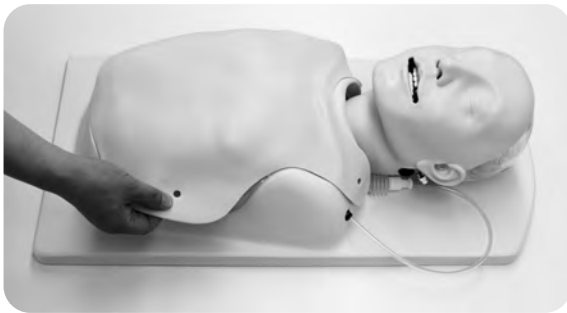


胴体の留め具から胸部皮膚をはずします。

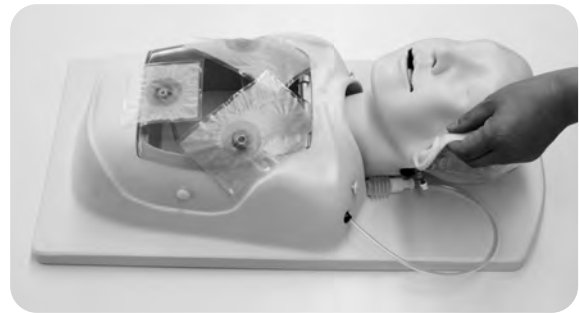

耳の留め具からマスクをはずします。


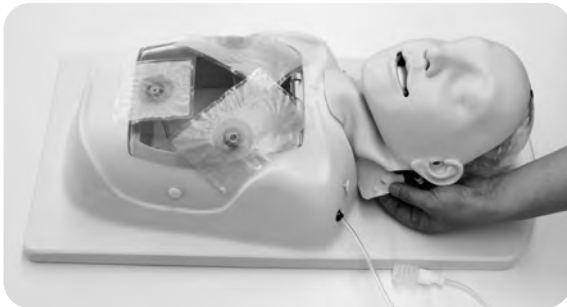


後頭部側のマスクを固定しているバンドの片側をマスクの穴からはずします。

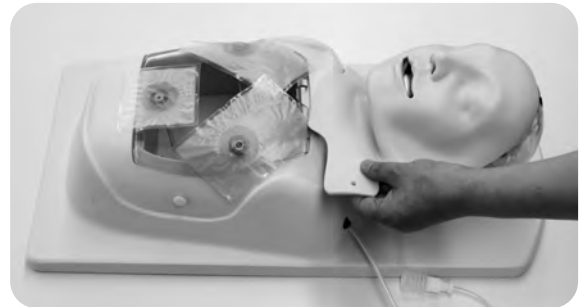

マスクをはずします。


2. 胸部カバーの上部を持ち上げカバーを浮かせ、カバー裏面で接続されたチューブ3本(肺袋部2箇所、胃袋部1箇所)を抜き取ります。チューブは図のようにチューブを接続しているコネクタのリング部を指で押し上げながら、チューブを下側に引っ張り抜き取ります。

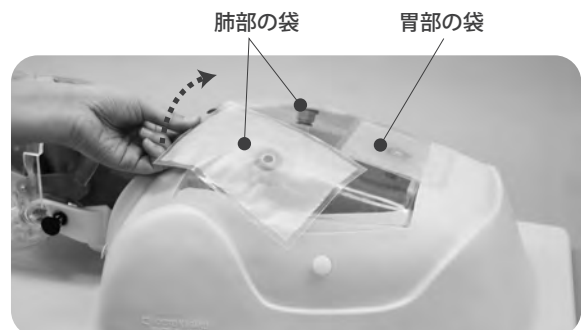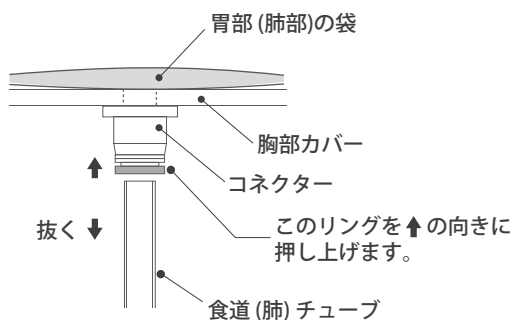

3. 胸部カバーを本体より取りはずし、頸部を支えながら内部の DAM トレーニング用気管支を取り外します。




4. 内視鏡用気管支上部の穴を喉部の気管支取付用の透明パイプに差し込み気管支を取り付けます。

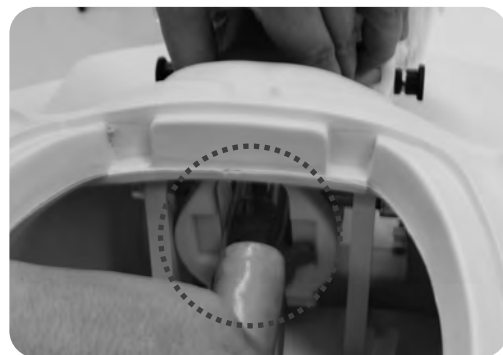

※ 気管支の左右にはご注意ください。

5. 胸部カバーをモデルにかぶせ、胸部皮膚とマスクを取り付けると交換は完了です。

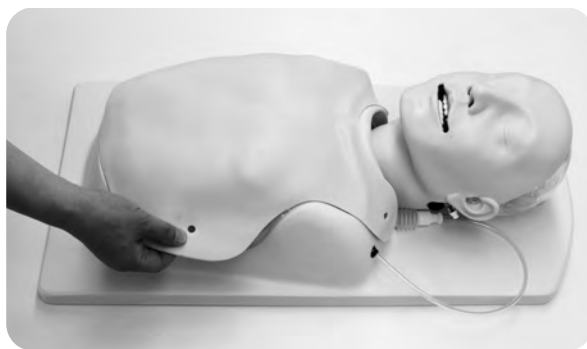

6. DAM の実習用に戻す場合は、逆の手順で、内視鏡用気管支から DAM トレーニング用気管支に交換してください。



株式会社 京都科学

URL ● <http://www.kyotokagaku.co.jp>  
e-mail ● [rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp](mailto:rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp)

■本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地

TEL : 075-605-2510 (直通)

FAX : 075-605-2519

■東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号

NREG本郷三丁目ビル2階

TEL : 03-3817-8071 (直通)

FAX : 03-3817-8075