

ご使用にあたって  
必ずお読みください!

M60 女性入浴介護実習モデル“おふくさん”  
M72 男性入浴介護実習モデル“ふきたろう”

このたびは、当社の入浴介護実習モデルをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
本製品は、成人に対する入浴および各種介護の理解と上達を目的として製作された実習用モデル人形です。  
ご使用にあたっては、下記の注意事項をご覧ください適切な使用と保管をお願いいたします。

### ●特徴

- 1、頭部以外を一体型に仕上げたモデルで、金属骨格により関節の動きを再現できます。
- 2、皮膚・関節部はできる限り人体に近い自然な動き・柔らかさを再現しており、体位変換、寝衣交換、清拭、車椅子による移動などの多目的に使用できます。
- 3、ボディは、防水タイプで内部に水が入らず後始末が簡単です。
- 4、実際と同様にシャンプー・ドライヤー・ブラシを使った洗髪実習が行えます。
- 5、体位変換、寝衣交換、清拭、車椅子による移動など多目的に使用できます。
- 6、義歯の脱着・口腔内ケアの実習が可能です。（男性モデルのみ）
- 7、人体同様の浮力で入浴時の高齢者体勢保持状態が再現されています。

### ⚠ 注意

<p>●モデルは丁寧に取り扱いください。 落下や強い衝撃、鋭利なものに触れるとは破損や故障の原因になります。又、腕をモデル本体の下に入れたまま長時間放置しますとと圧迫されて変形の原因になります。</p>	<p>●口唇部の取り扱いにご注意ください。 口唇部を過度にこじ開けると皮膚の破損の原因になります。</p>
<p>●指先の取り扱いにご注意ください。 過度の曲げ伸ばしを繰り返すと、内部の金具疲労により指関節の金具破損および皮膚の破損につながる恐れがあります。</p>	<p>●ボールペンやサインペンで書きこまないでください。 インクが吸収されて消えなくなります。又、ヨードチンキなども色移りの原因になりますので使用しないでください。</p>
<p>●印刷物をモデル表面におかないでください。 モデル表面に印刷物（新聞紙など）が直接接触すると、インクが吸収され消えなくなります。また、寝間着を着せる場合は裏地が白いガーゼタイプのものをご使用ください。裏地の色が染みこむ場合があります。</p>	<p>●汚れは中性洗剤、アルコールで拭き取ってください。 上記で汚れが取れない場合はアルコールをご使用ください。※眉など着色部分は避けてください。 注）シンナーなどの有機溶剤は、絶対に使用しないでください。</p>
<p>●高温多湿を避けて保管してください。 使用後は市販のベビーパウダーを薄く塗布しておく汚れが付きにくくなります。保管は、高温多湿や直射日光のあたる場所を避けてください。変形や故障の原因になります。</p>	<p>●かつらは必ず乾かして保管してください。 濡れたまま保管されますと次回のブラッシングなどが困難になります。</p>



株式会社 京都科学

URL : <http://www.kyotokagaku.co.jp> E-mail : [rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp](mailto:rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp)

■本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15

TEL. 075-605-2510（直通） FAX. 075-605-2519

■東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目26-6

NREG本郷3丁目ビル2F

TEL. 03-3817-8071（直通） FAX. 03-3817-8075

2017.12