

Multipurpose Patient care Simulator "Sakura"

万能型実習モデル さくら "SAKURA"

M75 11251-000

患者さんを想定した基本的な看護技術の習得と
アセスメントの学習にふさわしい、
単独で座位がとれる等身大の成人実習モデルです。

- 全身状態のアセスメント手順
- バイタルサインの診断手順
- 体位変換・運動の介助・排泄援助
- 寝衣交換
- 全身清拭・部分浴（足浴他）
- 洗髪
- 口腔内ケア・義歯のケア
- 女性導尿
- 浣腸
- 酸素吸入
- 経管栄養
- 気管切開患者のケア
- 胃洗浄
- 腸洗浄
- 膣洗浄
- 人工肛門のケア
- 皮下注射・筋肉注射（上腕・大腿部・臀部）
- 採血・静脈注射…付属品「かんたんくん」使用
- 死後の処置

単独で座位が
とれます！



シミュレータを活かした看護トレーニング

万能型実習モデル さくら "SAKURA"

実習項目

■全身状態のアセスメント手順



■バイタルサインの診察手順



つなぎ目のない手足と可動する関節をもつ全身モデルです。



■体位変換・運動の介助・排泄援助



■寝衣交換



■全身清拭・部分浴（足浴他）



部分浴・清拭

手足はつなぎめがなく、指関節内部に特殊な金具を入れており、指を曲げたり開いたりすることができます。

※無理なご使用は故障の原因になります。

■洗髪



人毛かつらを使用しておりますので、実際にシャンプー・ブラッシング・ドライヤーを用いた洗髪実習ができます。

※かつらは実習後必ず説明書に従ってお手入れを行って下さい。

■口腔内ケア・義歯のケア



■女性導尿



導尿実習はリアルにしかも使いやすいワンタッチ接続新方式を採用しています。（バルーンカテーテル対応可）

■浣腸・腸洗浄



浣腸実習（女）
カテーテルは 14 号をご使用下さい。

腰部の左臀部注射パッドを取り出して、腰側チューブのジョイントに直腸排水用ホースジョイントを差しこんで腸洗浄実習ができます。

■経管栄養



経鼻カテーテル実習ができます。
カテーテルは 4 号をご使用下さい。

■気管切開患者のケア



気管切開部は、内部の気管につながっています。

■胃洗浄



胃は着脱式で口腔から食道、胃とワンタッチジョイント部でつなげることができます。



■皮下注射・筋肉内注射（上腕・大腿部・臀部）



上腕・大腿部筋肉内注射パッド及び臀部パッドは、装着式で左右どちらにも使用でき実習に便利です。装着式新方式を採用しました。

■死後の処置



まぶたを閉じる、手を合わせる、また、耳・鼻・肛門部に綿を詰めることができます。

■人工肛門のケア



■酸素吸入

■腔洗浄

■採血・静脈注射… 付属品「かんたんくん」使用

『万能型実習モデル』の特長

- 腕・脚部はつなぎ目のない一体型で人体に近い可動域です。
- 独立して座位をとることができます。
- 上腕・大腿部・臀部の筋肉注射手技が練習できる、装着式注射パッドがセットされています。
- 導尿実習部位は、ワンタッチ接続方式を採用し、使いやすい構造です。(バルーンカテーテル対応可)
- 顎関節が可動し、口腔内実習ができます。
- 胸蓋・鼻管・口腔・気管・食道・胃・直腸・膀胱・子宮・性器部は、ジョイント金具や共通のネジ仕様を採用し簡単に接続、脱着できるよう設計されています。
- 男性性器(別売)と交換して男性実習モデルとしても使えます。

仕様・価格

M75 万能型実習モデル さくら“SAKURA” 11251-000

仕様 成人女性
身長約158cm
材質：軟質特殊樹脂・硬質特殊樹脂
重量：約18kg

- 構成
- モデル本体
 - かんたんくんー式(装着式採血静注シミュレータ)
 - かつら(あらかじめ装着しています)
 - パジャマ・下着
 - 義歯一式(あらかじめ装着しています)
 - 上腕注射パッド 2 個
 - 大腿注射パッド 2 個
 - 臀部注射パッド 2 個(あらかじめ装着しています)
 - 水袋
 - 排水用ホース
 - 排水用ポンプ(膀胱用)
 - 排水用ポンプ(直腸用)



患者さんを想定した基本的な看護技術の習得にぜひご利用ください。別売の男性性器と交換することで男性用モデルとしても使えます。

交換部品



かつら
11251-010



義歯
11251-020



肩パッド(左右1組)
11251-030



大腿パッド(左右1組)
11251-040



臀部パッド(左右1組)
11251-050



女性性器
11251-060



男性性器
11251-100



男性・女性導尿用共通交換弁
11214-010



●製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。

取扱店

製造元

株式会社 京都科学

URL ● <http://www.kyotokagaku.com> e-mail ● rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL.075-605-2510(直通) FAX.075-605-2519

東京支店

〒112-0002 東京都文京区小石川15丁目20-4
TEL.03-3817-8071(直通) FAX.03-3817-8075

