



注意

モデル表面に取扱説明書や印刷物などが直接触れないようにしてください。
樹脂表面にインクが吸収され消えなくなります。

注：モデル表面に取扱説明書や印刷物などが直接触れないようにしてください。
樹脂表面にインクが吸収され消えなくなります。

US-1

超音波トレーニングモデル “ECHOZY” エコジー

特許番号 第3650096号 (P3650096)

監修：大阪教育大学教授・保健センター所長 朝井 均


指導：長吉総合病院臨床検査科 技師長代理 中村 滋



取扱説明書

目次

- ご使用の前に
ご使用前の確認とご注意 P.1
- 準備
1 準備 P.2
- 実習
2 実習と画像 P.2
3 後片付け P.2

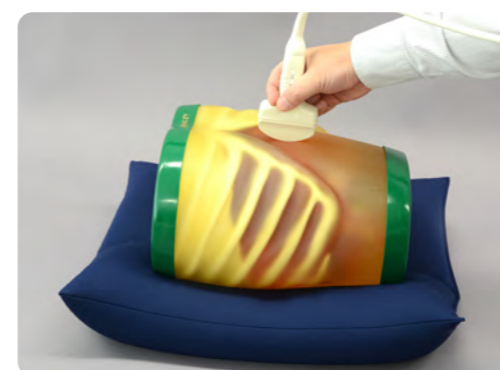

● はじめに

このたびは、当社の「超音波トレーニングモデル“ECHOZY”」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は、実際の診療現場で使用される超音波診断装置を使って診断トレーニングが行えるシミュレーションモデルです。

※適切な精度管理の行われている超音波診断装置をご使用ください。

超音波スクリーニングの基礎から臓器別スクリーニングの手順までを段階的に学習できます。医学実習用教材としてご使用ください。

● 特徴

・当社が新たに開発した素材により超音波走査に対して人体と同等のエコー値を示します。
(平成15年5月 AFSUMB2004にて発表)

・モデル内には、肺、大動脈、胆嚢、下大静脈、肝臓（門脈、胆管、肝動脈、肝静脈）、腎臓（左右）、膵臓（膵管）、脊柱、脾臓、肋骨がほぼ実物大で正確に再現されており、解剖学的理解と簡易なスクリーニングのトレーニングを同時に行うことができます。

・ご不明な点は、お買い上げの販売店、もしくは下記（株）京都科学まで御連絡下さい。



株式会社 京都科学

URL ● <http://www.kyotokagaku.com>

e-mail ● rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

■本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL:075-605-2510 (直通)
FAX:075-605-2519


■東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL:03-3817-8071 (直通)
FAX:03-3817-8075

2017.12

セット内容と各部の名称


ご使用前に、構成部品が全て揃っているかご確認ください。

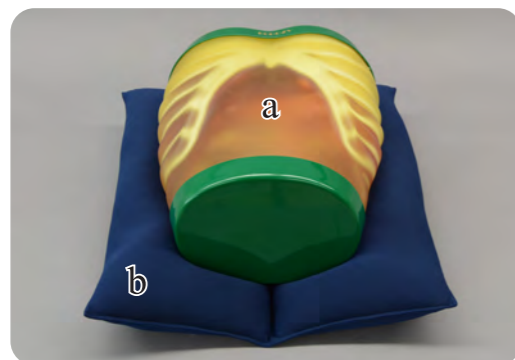

●主要構成

- a. 超音波ファントム 上腹部モデル本体 …… 1
 肝臓 (肝区域表現、門脈および肝静脈、肝門索、静脈管索を含む)
 胆道 (胆嚢、胆嚢管、肝臓内外の胆管を含む)
 膵臓および膵管、脾臓、腎臓
 脈管系 (動脈、下大静脈、腹腔動脈および分枝、門脈及び分枝、
 上腸管膜脈管、腎臓血管ほか)
- b. クッション …… 1


○クッションを利用して仰臥位と側臥位の設定が可能です。

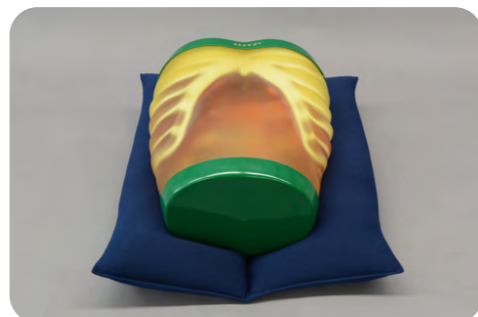

⚠注意

- 取扱いにご注意ください。
 特殊軟質樹脂を使用していますので、落下や強い衝撃を与えると破損の原因となります。
- 印刷物をモデル表面におかないでください。
 モデル表面に印刷物などが直接触れないようにしてください。
- ボールペンやサインペンを使用しないでください。
 サインペン、ボールペン等でモデルの表面に書き込みをしないでください。インクが吸収され消えなくなります。
- モデル腹部表面にシワが発生する場合があります。
 耐久性とメンテナンス性を高めるためのコーティング層をモデル腹部表面に設けており、材質の特性上、モデル腹部の表面にシワを生じることがありますが、超音波画像には影響ありません。
- 使用後のゼリーはすぐに拭き取ってください。
 使用後は、ウエットティッシュ等で拭き取ってください。
 ※汚れをシンナー等で拭き取る事は絶対におやめください。
- 表面が変色する場合があります。
 長期間使用されない場合や経年変化で変色することがありますが、ご使用には差し支えありません。
- 高温多湿を避けて保管してください。
 使用後は、高温多湿や直射日光のあたる場所での保管はさけてください。
 変形、変質の原因になります。

1 準備

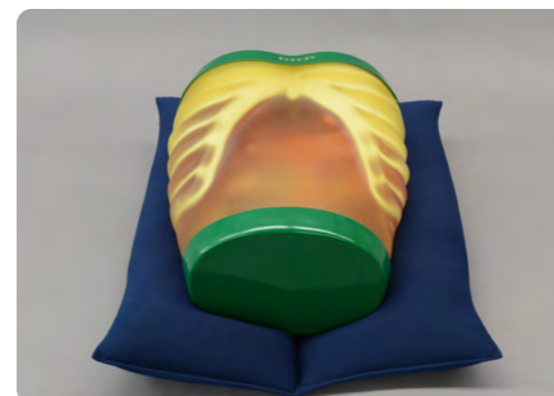

①クッションにトレーニングモデルをのせて位置を固定します。




②超音波用ゼリーをモデルに直接塗ります。モデルを横向きで使用する場合は、ゼリーがクッションにつかないようにご注意ください。

2 実習と画像



①プローブをモデルにあて、超音波画像を見ます。

●超音波画像例

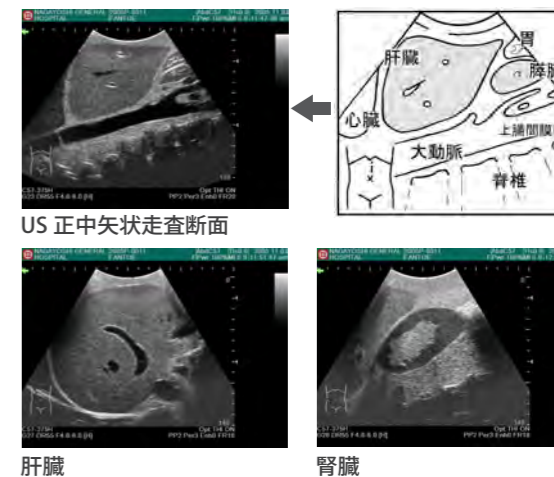


US 正中矢状走査断面

肝臓

腎臓

3 後片付け

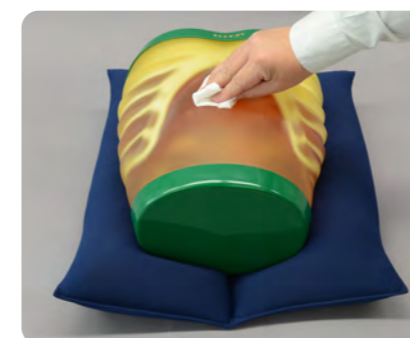

①ウエットティッシュ等で、表面にゼリーが残らないようによくふき取ってください。