

MW13



# Simulador de Manejo de Vía Aérea Difícil -Modelo de Entrenamiento-

## Para principiantes y expertos con un amplio rango de niveles de dificultad

Este simulador ofrece entrenamiento para usuarios de todos los niveles con 24 casos difíciles disponibles. Su estructura robusta y base estable hacen el modelo compatible con varios escenarios de entrenamiento como son los ámbitos de emergencia, prehospitalarios y clínicos. Una variedad de instrumentos clínicos reales se pueden usar, como laringoscopio, bolsa válvula mascarilla, y videolaringoscopio.



### Variación de Ajustes de MVA Difícil



Flexibilidad del cuello  
(movimiento realista de la mandíbula)



Abertura de la boca  
- Normal  
- Intermedio  
- Difícil



Lengua  
- Normal  
- Hinchada



Laringoespasmos  
- Normal  
- Laringoespasmos

### CARACTERÍSTICAS

- 24 variaciones de escenarios del paciente: (incluyendo 1 caso normal):
  - 3 grados de apertura de la boca
  - 2 grados de flexibilidad del cuello
  - 2 tamaños de lengua
  - 2 posiciones de las cuerdas vocales
- Los incisivos superiores están diseñados para que se safen cuando se aplica una fuerza excesiva.

### TECNICAS

- Técnicas de apertura de vía aérea (inclinación de cabeza, tracción de mandíbula)
- Ventilación de Bolsa Válvula Mascarilla
- Evaluación de la vía aérea de preintubación
- Posición de olfateo
- Presurización de la laringe externa para mejorar la vista laríngea
- Intubación intraoral/Intranasal
- Uso de la vía orofaríngea
- Uso de la vía nasofaríngea
- Uso de mascarilla laríngea
- Uso de videolaringoscopio
- Confirmación de la ventilación exitosa por:
  - observación del movimiento torácico y abdominal (expansión pulmonar, inflación del estómago) o auscultación torácica
- Simulación de procedimientos incorrectos incluyendo la intubación en el esófago e intubación unilateral
- Práctica de la fijación de los tubos después de la intubación

### Variaciones de Entrenamiento de MVAD



Ventilación de Bolsa Válvula Mascarilla

Confirmación de colocación del tubo endotraqueal

Una variedad de técnicas de vía aérea posibles

### ESPECIFICACIONES

Tamaño: A70 x P39 x A25 cm      Peso: 7kg / 15.4lbs  
A27.6 x P15.4 x A9.8 plgds

### CONTENIDO DEL JUEGO

1 maniquí	1 manual de instrucciones
3 incisivos superiores	
1 lubricante	
1 jeringa	
1 bolsa de transporte	

### DESCRIPCION

#### MATERIALES

Resina blanda  
Libre de látex

#### REPUESTOS

11392-010 10 incisivos superiores  
11392-090 1 máscara facial  
11392-040 1 cobertura torácica  
11392-080 2 lenguas II de repuesto  
11392-050 5 pares de pulmones  
11392-060 5 estómagos  
11229-050 lubricantes

#### INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

Laringoscopio Macintosh: tamaño de hoja 3, 4  
Tubo endotraqueal: Diámetro interno 7.0mm, 7.5mm  
Mascarilla laríngea Air-Q: tamaño 3.5  
LMA Supreme: tamaño 4  
I-gel: tamaño 4

#### PARTES OPCIONALES

11384-100 unidad de entrenamiento de broncofibroscopia

\* Los instrumentos no están incluidos.