

シミュレータソフトの起動とカメラ設定

シミュレータソフトを起動する前に、必ず縫合装置のUSBケーブルをパソコンに接続してください。


ソフトを起動するにはデスクトップ上の「縫合シミュレータ」のショートカットをダブルクリックするか、「Windows」の「スタート」ボタンをクリックし、表示されるメニューから「すべてのプログラム」→「縫合シミュレータ」を選択してください。




- ① TOP画面上部のカメラ設定をクリックします。



- ② カメラの撮影範囲が表示されるので、傷口の中心をクリックし、適切な撮影範囲に調節します。

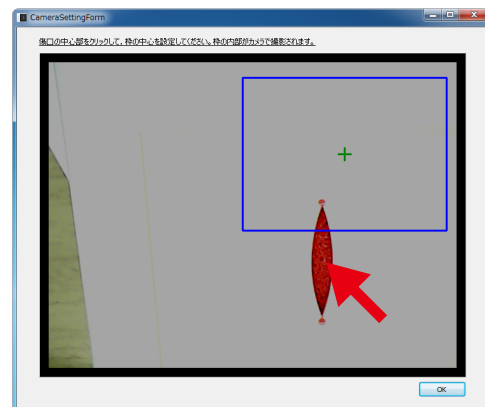


- ③ 右下のOKをクリックするとTOP画面に戻り起動は完了です。

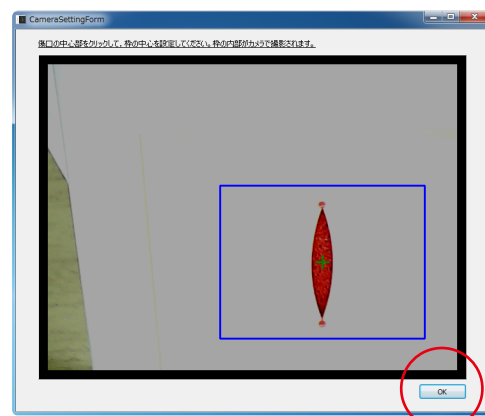

※ カメラ設定は初回起動時のみ行えば、次回から不要です。

Start up the Simulator-soft and Camera setting


Before starting up the suture simulator soft, connect the Suture Simulator USB cable into the PC.

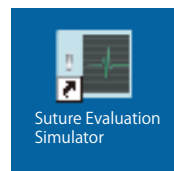


① Click "Camera Setting"



② Rectangle is shown as recording area. Click the center of the wound to set correct area.

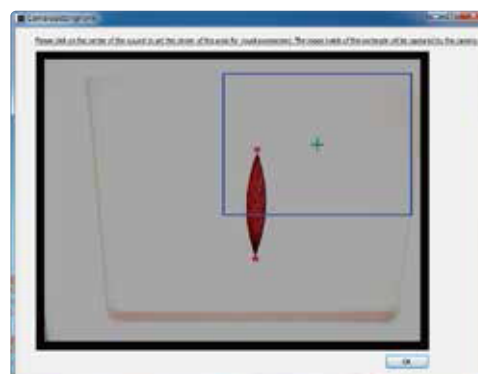

③ Click "OK" to complete the setting.

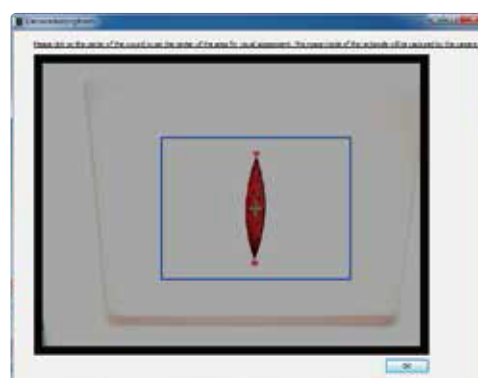

*Camera setting is required only at first use.

2020.04