


Gluteus Maximus Injection Simulator

殿筋注射2ウェイモデル

M74 11213-000


1台で3通りの
注射法が習得できます。
針跡が残りにくい新素材採用。

ランプ表示で位置や
深さの正誤を判断し、お知らせします。

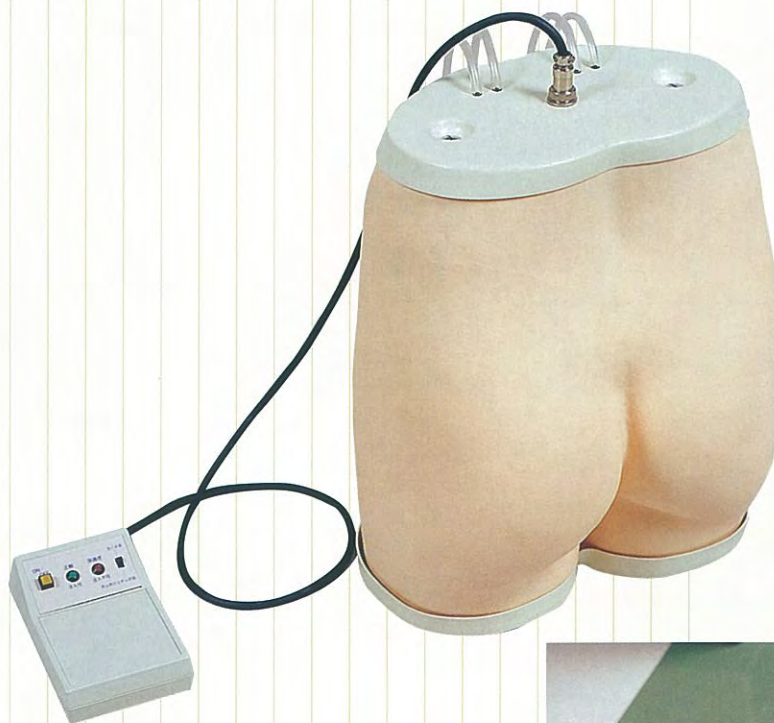

*For Objective Structured Clinical Examination
For Physical Assessment*

中殿筋への注射部位の確認、説明に最適です。

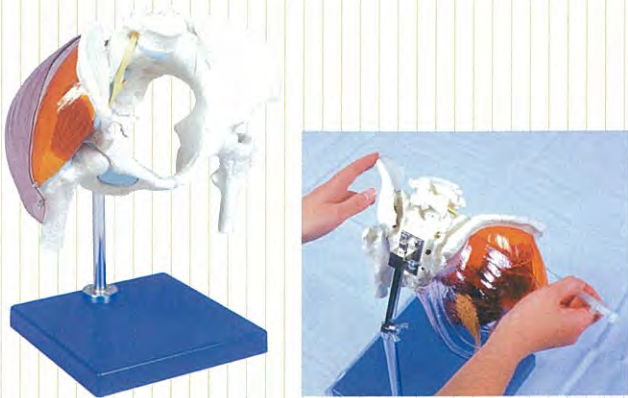

11096-000 | M96 骨盤付殿筋注射説明モデル

価格

- 成人女子臀部形状 ●実物大 ●台付 ●合成樹脂製 ●3分解
- 成人の女性骨盤に分解可能な大殿筋・中殿筋・小殿筋を示した模型です。筋肉注射の実習時などに併せてお使いいただくと効果的です。
- 大きさ 本体：約W28×D21×H45cm 台：約W21×D21cm

殿筋注射2ウェイモデル

M74 Gluteus Maximus Injection Simulator

11213-000

M74殿筋注射2ウェイモデルと
A96骨盤付き殿筋注射説明モデルのセットです。



11216-000 | MA7496 セット特別価格

価格

特長

- モデルは軟質皮膚・筋肉層・硬質土台骨格の三層から構成されており実際に近い感触で触診により注射部位を測定することができます。
- 注射部位測定は、四分三分法・ホッホシュテッタ法・クラークの点の3種類の方式に対応しています。
- 注射刺入時にランプ表示で位置や深さなどの注射部位の正誤を判定し、ランプ表示で警告します。
- 正しい注射部位に刺入時は実際に薬液(水)が注入できます。
- モデルの皮膚は特殊樹脂使用で刺入後の針跡がほとんど残りません。
- 内部に骨盤が埋め込まれており、注射部位の目安としての大転子・上前腸骨棘・後腸骨棘・仙骨の触診により注射部位の確認ができます。
- 皮膚・筋肉部は交換できます。

製品仕様

- モデル部：成人女子臀部形状・実物大
材 質：軟質特殊樹脂・硬質樹脂（三層構造）
重 量：本体部 約3.2kg
電 源：9V電池／100V用ACアダプター（2通り）
- ホッホシュテッタ法用スタンド付
 - 専用ケース

交換部品



コントローラー
11213-050



四分三分法部位センサー
11213-020



ホッホシュテッタセンサー 左右組
11213-030



クラークの点センサー 左右組
11213-040



皮膚
11213-010

- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。

取扱店

製造元

株式会社 京都科学

URL ● <http://www.kyotokagaku.co.jp> e-mail ● rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北環小屋町15番地
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店

〒112-0002 東京都文京区小石川15丁目20-4
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075

