

M56 **Simulador de Atención de
Paciente Pediátrico**

Manual de instrucción

KYOTOKAGAKU co.,Ltd. KYOTOKAGAKU co.,Ltd. KYOTOKAGAKU co.,Ltd.

 **KYOTO KAGAKU co.,LTD**

La tinta de este maual manchará el maniquí. No deje tener en contacto con la piel.

Tabla de contenidos

Características	P. 1
Antes del uso	P. 2
Especificaciones	P. 2
Items del entrenamiento	P. 3
Peluca	P. 4
Unidad de boca-nariz (desmontaje)	P. 5
Unidad de abertura para traqueotomía (desmontaje)	P. 6
Unidad de abertura para traqueotomía (montaje)	P. 7
Unidad de boca-nariz (montaje)	P. 8
Unidad de abertura de GEP	P. 9
Conectar el estómago-esófago	P. 10
Desconectar el estómago-esófago	P. 11
Estómago: relleno y drenaje del agua	P. 12
Unidad genital	P. 13
Juego de riego	P. 14
Cambio de la válvula de la unidad genital	P. 15 – 17
Coberturas torácica y abdominal	P. 18 – 19
Instrucción del Manejo y Almacenamiento	P. 20

Características

El Simulador de Atención de Paciente Pediátrico está diseñado para facilitar el entrenamiento para varias técnicas asociadas con diferentes situaciones de la atención de paciente pediátrico.

- Posicionamiento y manejo del paciente
- Cuidados de GEP y manejo de alimentación por sonda
- Cateterización masculina y femenina
- Succión de las vías aéreas: oral, nasal o a través de la abertura para traqueotomía

Antes del uso

El Simulador de Atención de Paciente Pediátrico (M56) está diseñado para la educación de atención médica y enfermera a los pacientes pediátricos.

No lo use para ningún otro objetivo.

Lea este manual minuciosamente antes del uso y siga a todas las instrucciones.

El mal uso y rotura causada por otra manera no indicada en este manual de instrucción anularán la garantía por el fabricante.

Maneje el Simulador de Atención de Paciente Pediátrico con cuidado todo tiempo. No ejerce una fuerza excesiva al maniquí.

Especificaciones

Alto: aproximadamente 125 cm o 4.1 pies (promedio del niño de 6-8 años)

Peso: aproximadamente 13kg o 26.7 lbs.

Asegúrese de que todos los componentes listados abajo están incluidos.



a. maniquí	1
b. placa de anatomía de cabeza y cuello	1
c. ropa de entrenamiento (diseño sujeto al cambio)	1
d. entrenador de venopunción colocable	1
e. bolsa de riego	1
f. unidad genital masculino	1
g. jeringa	1
h. unidad de abertura de GEP (hueco pequeño)	1

i. aceite de silicona (lubricante para el entrenamiento de cateterización)	1
--	---

Catéteres de muestra

(incluidos solo en el juego B)

j. tubo de GEP	1
k. catéter transnasal	1
l. catéter de succión	1
m. catéter urinario	1
n. cánula traqueal	1

Items de entrenamiento


Cateterización urinaria

Masculino
Femenino



Cuidados de GEP

Botón gástrico
Tubo de GEP
Inserción del catéter
Auscultación abdominal

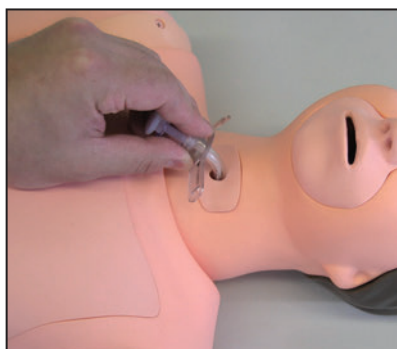


Succión de las vías aéreas

Oral
Nasal
Traqueal




Peluca

1

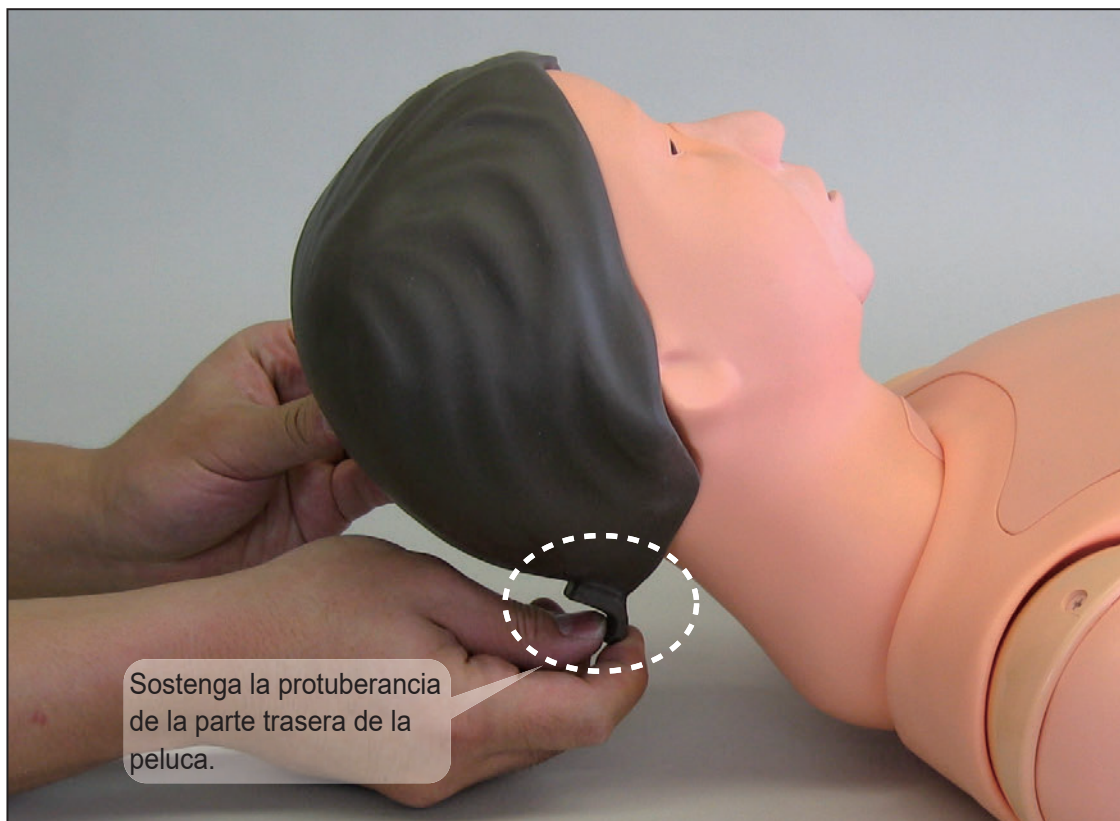

2

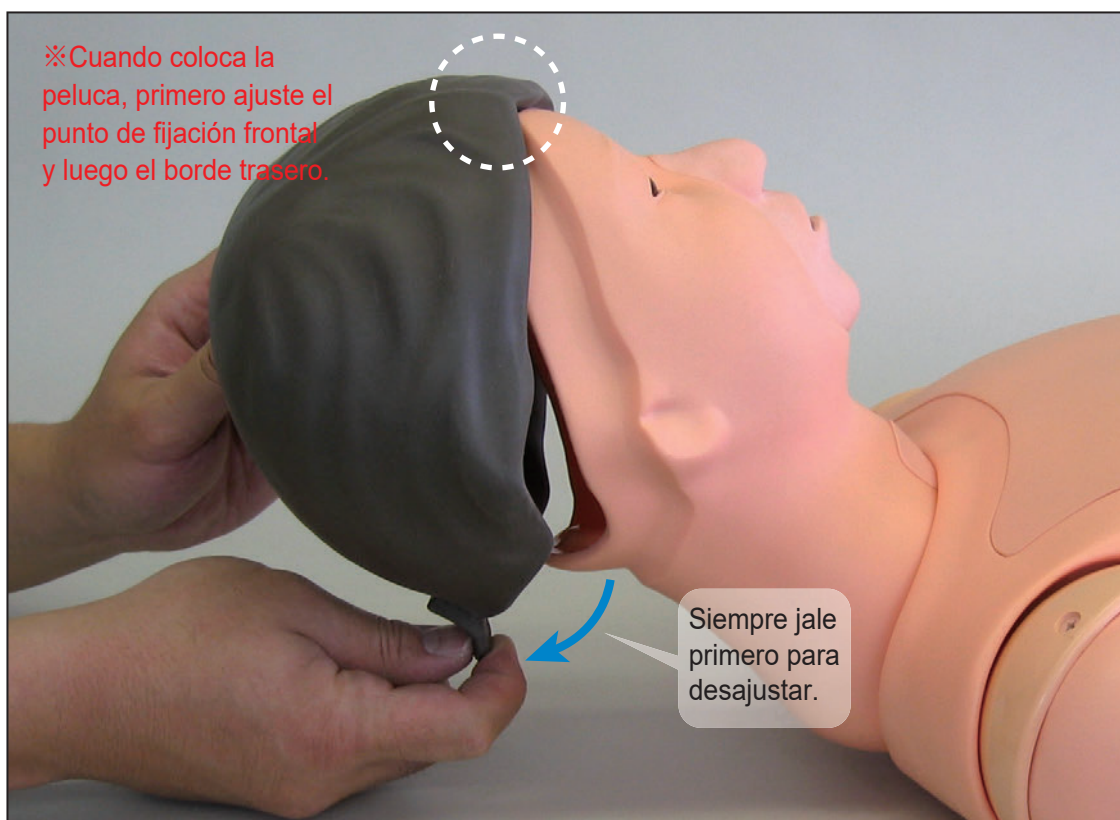


Unidad de boca-nariz (desmontaje)



Antes de desmontar la unidad de boca-nariz, desconecte el tubo de esófago desde el estómago. Véase las instrucciones de la página 11 →


1

Saque jalando la unidad desde el interior de la cabeza por levantarlo hacia arriba.

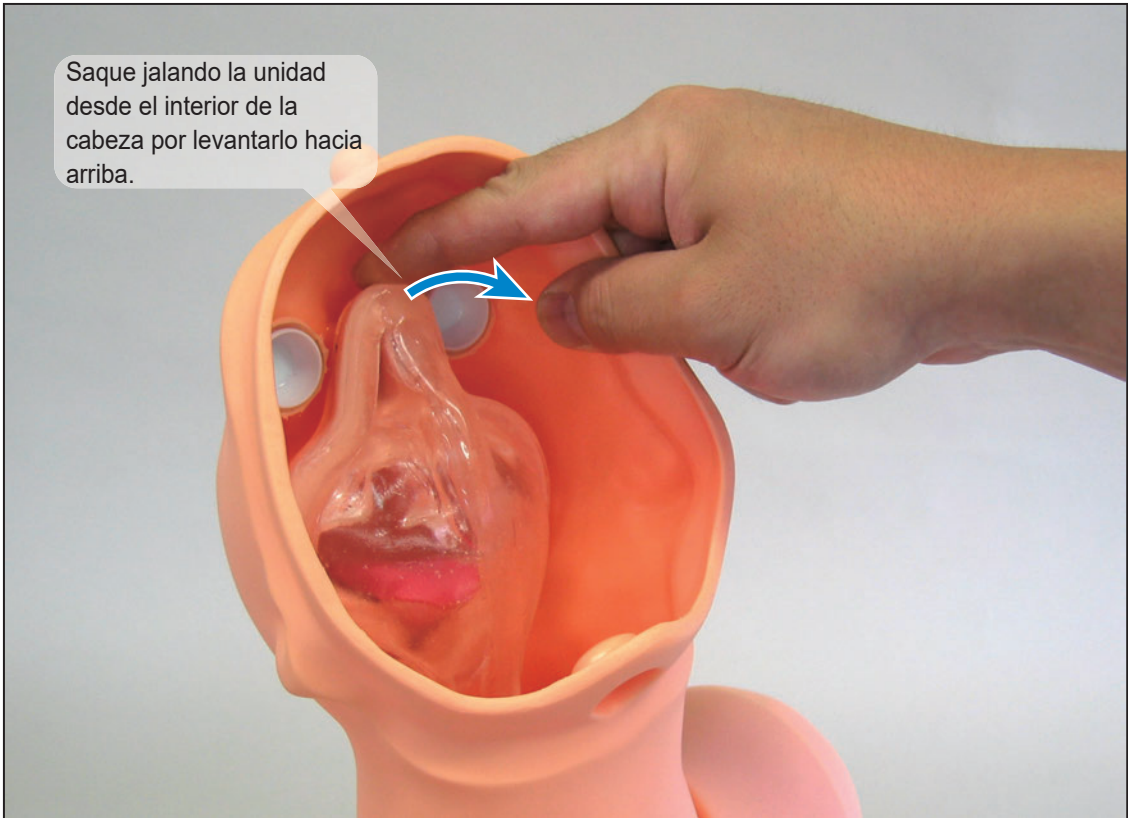


2

Desmontada

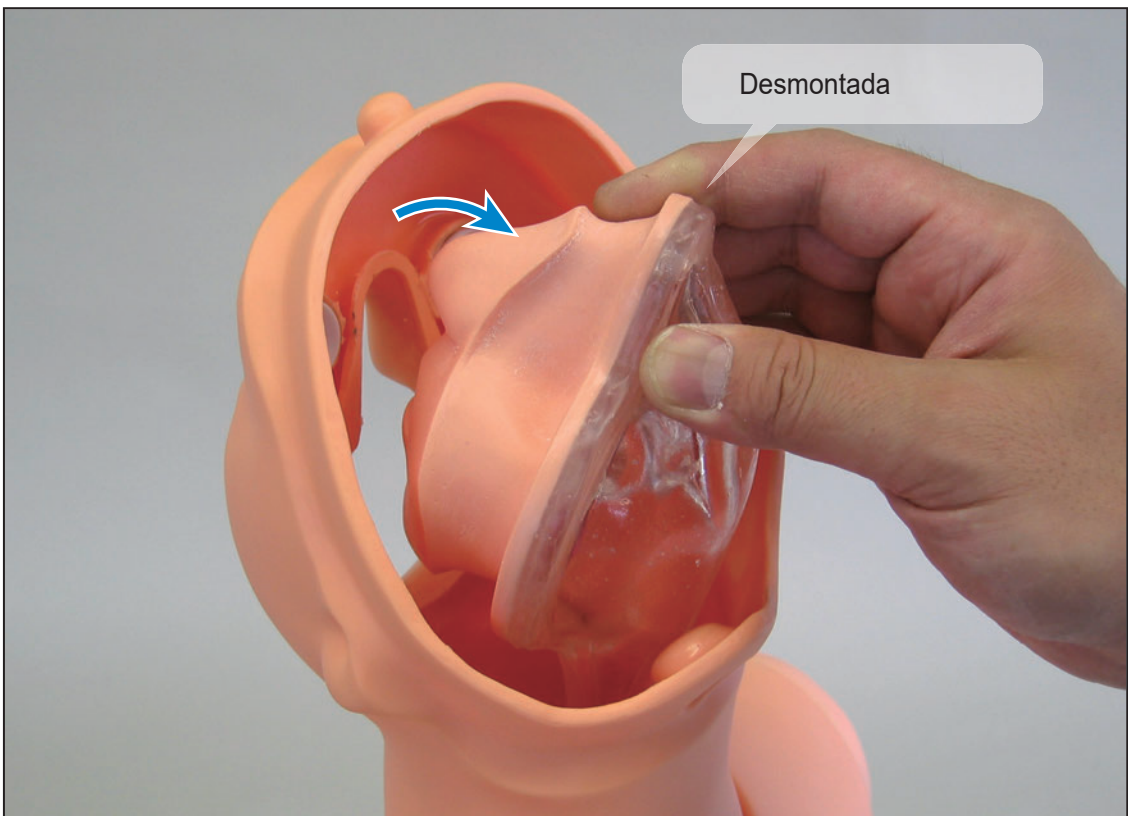


Unidad de abertura para traqueotomía (desmontaje)

1

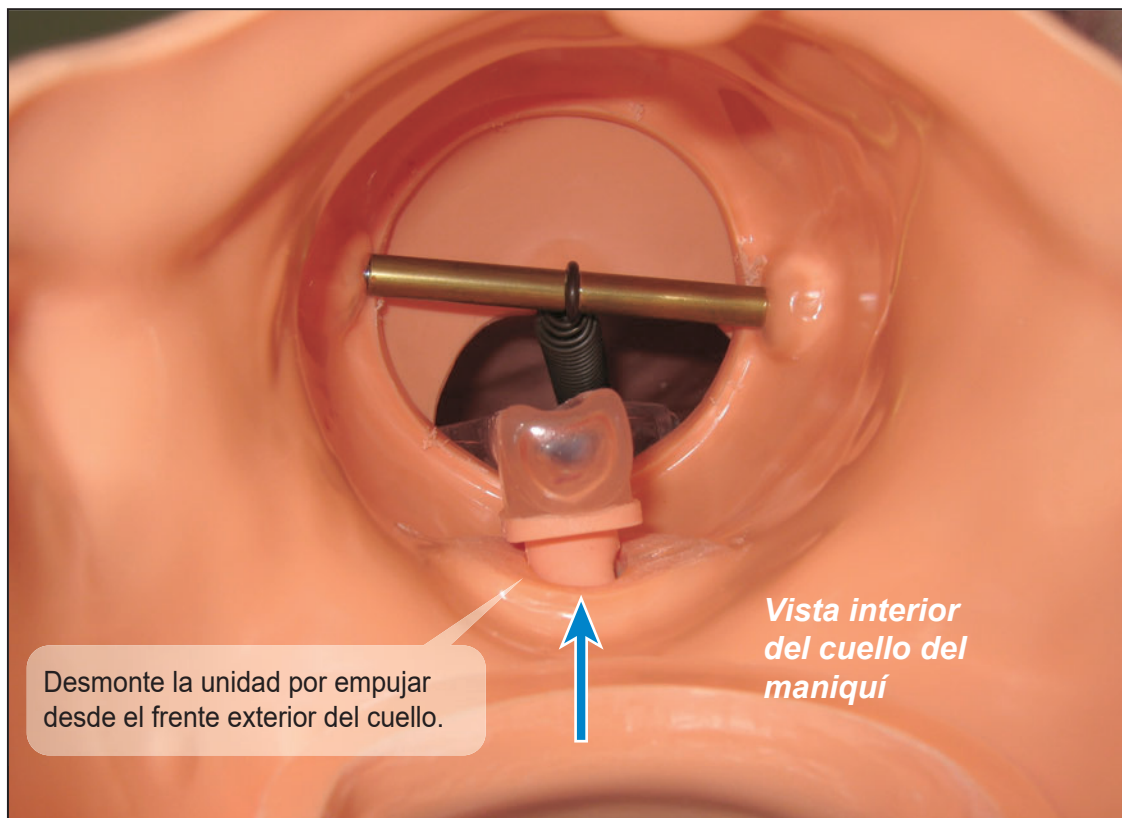

2

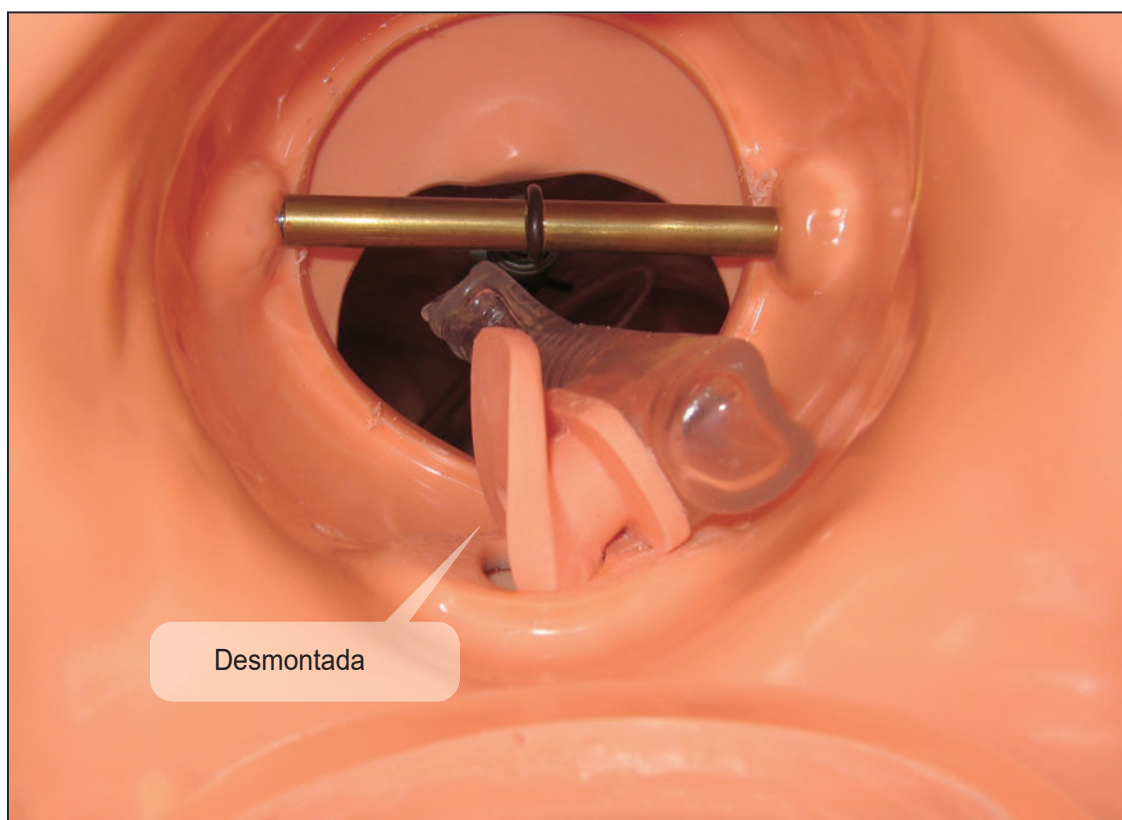

Unidad de abertura para traqueotomía (montaje)

1




2




Unidad de boca-nariz (montaje)

1

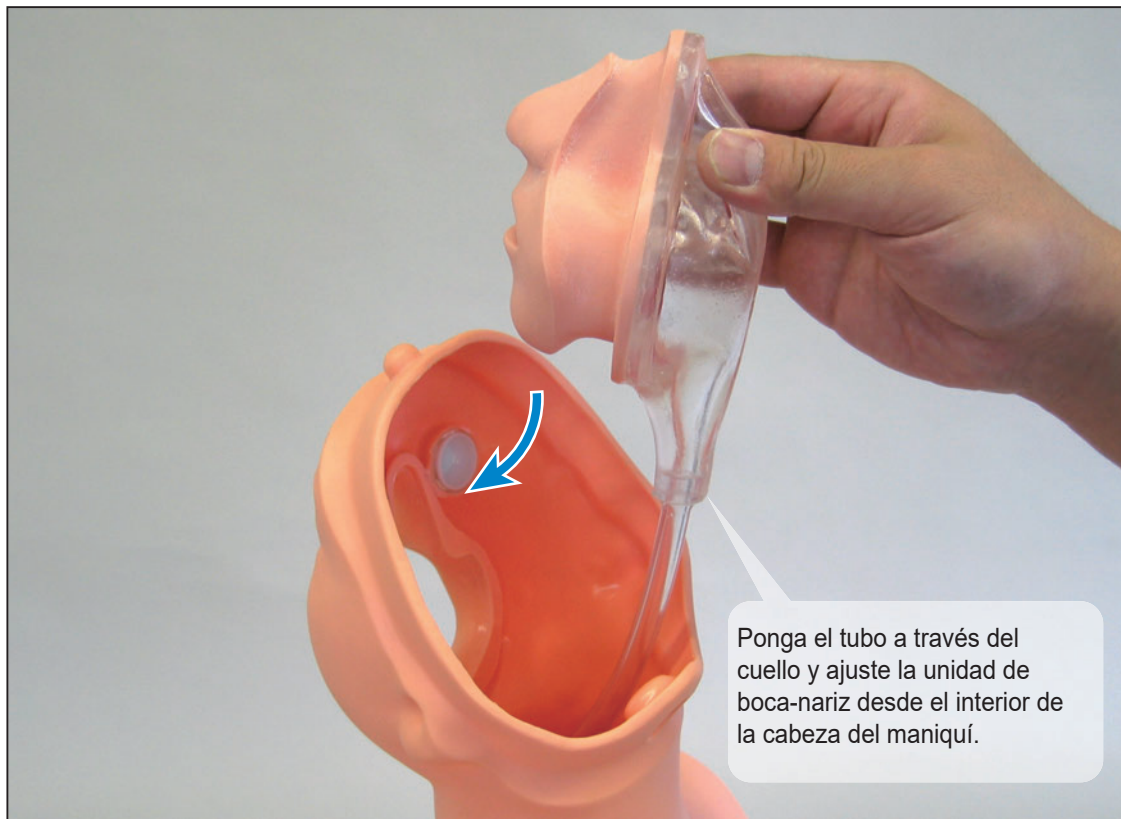


2

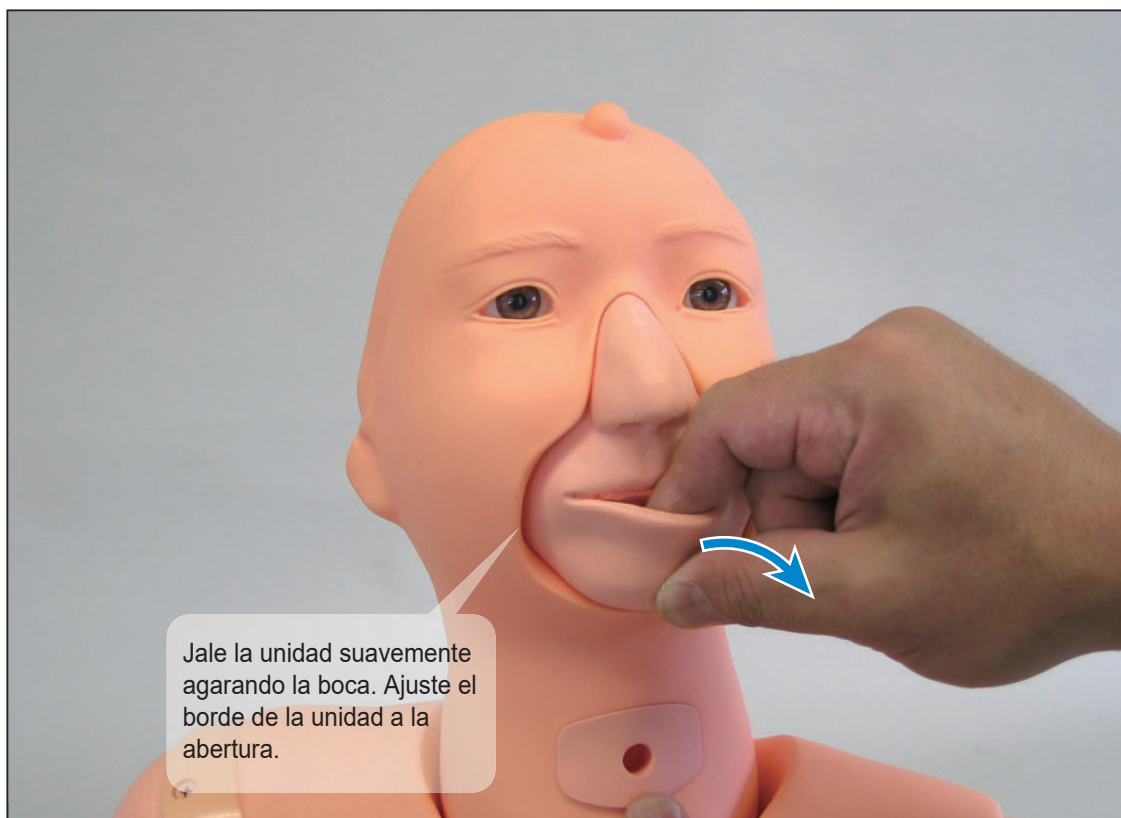


Advertencia: Después de colocar la unidad de boca-nariz a la cara del maniquí, asegúrese de conectar el tubo del esófago al estómago. Véase la instrucción de la página 10. ➔

Unidad de abertura de GEP

1

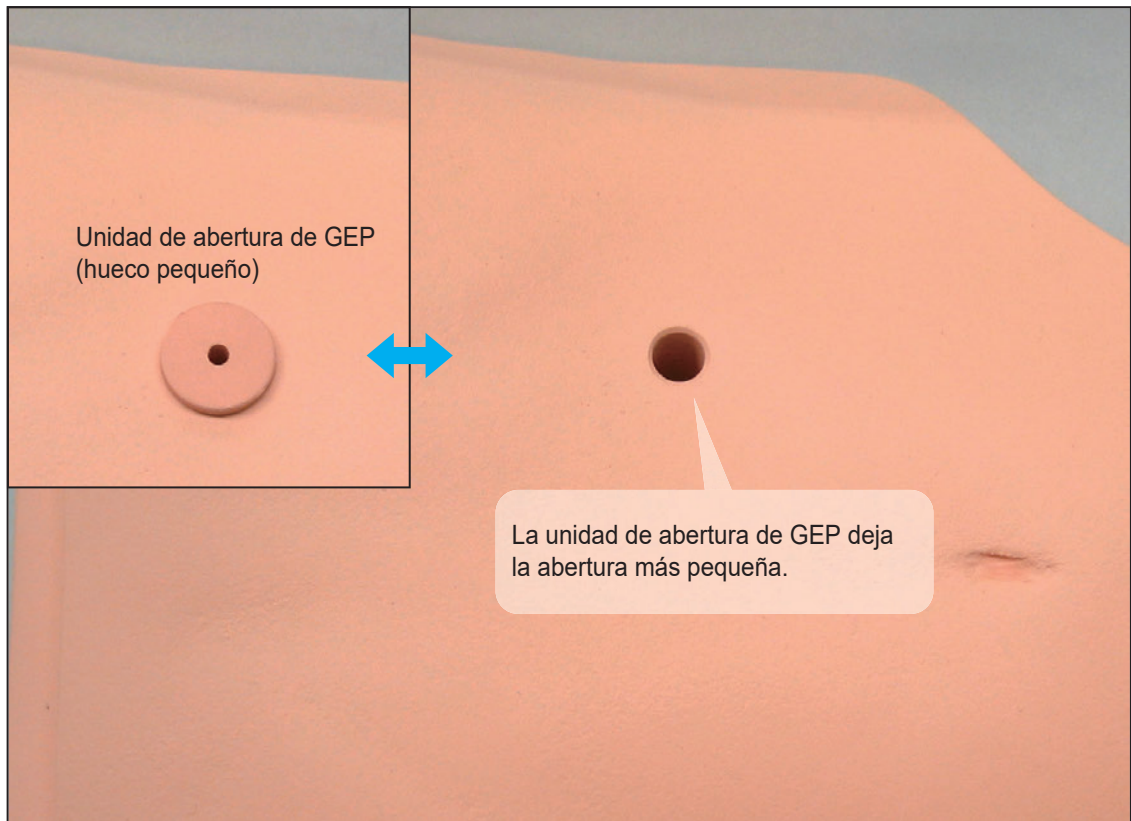


2

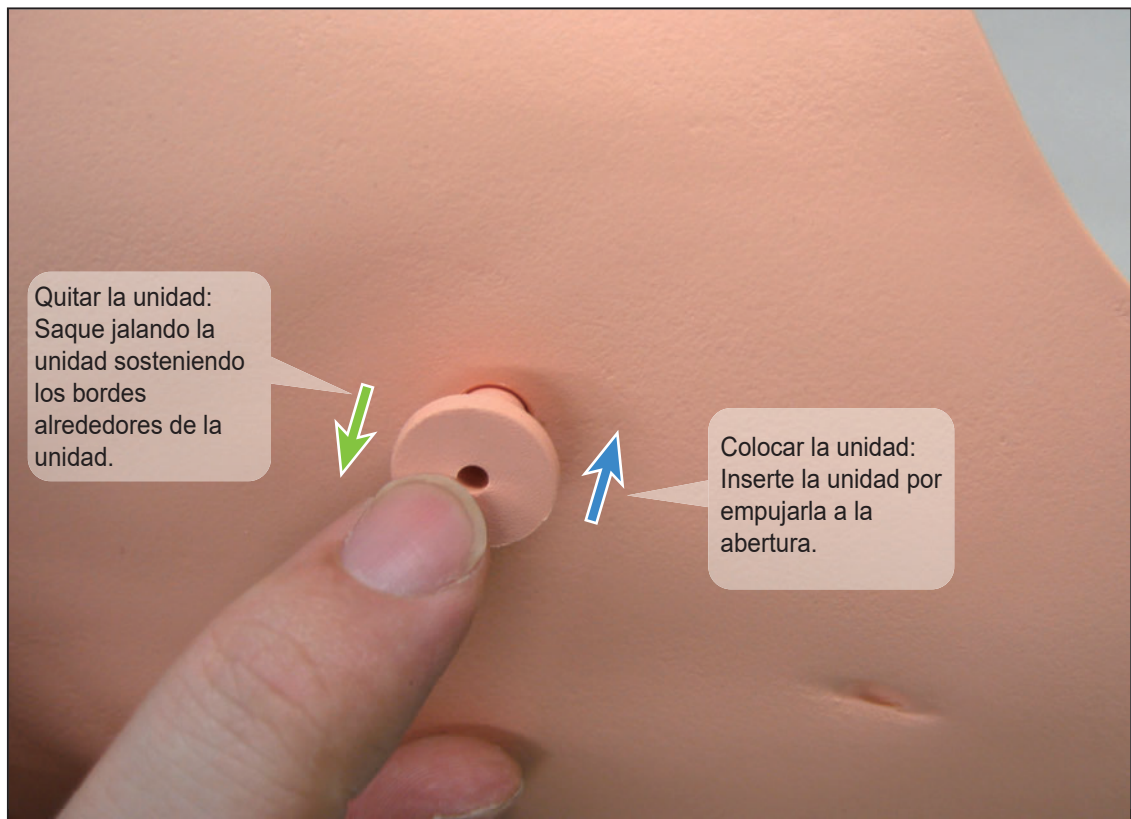


Conectar el estómago-esófago

1

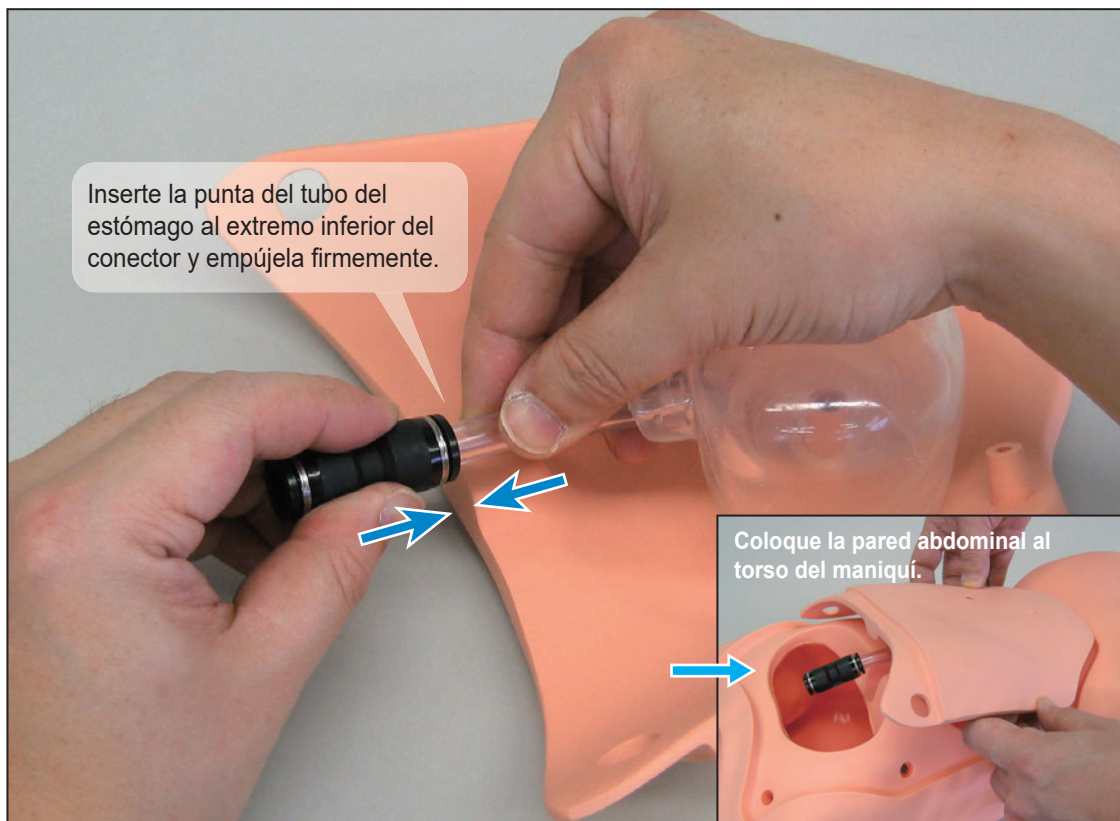

Advertencia: Coloque la pared abdominal al torso de maniquí por alinear las protuberancias con sus huecos correspondientes.


2

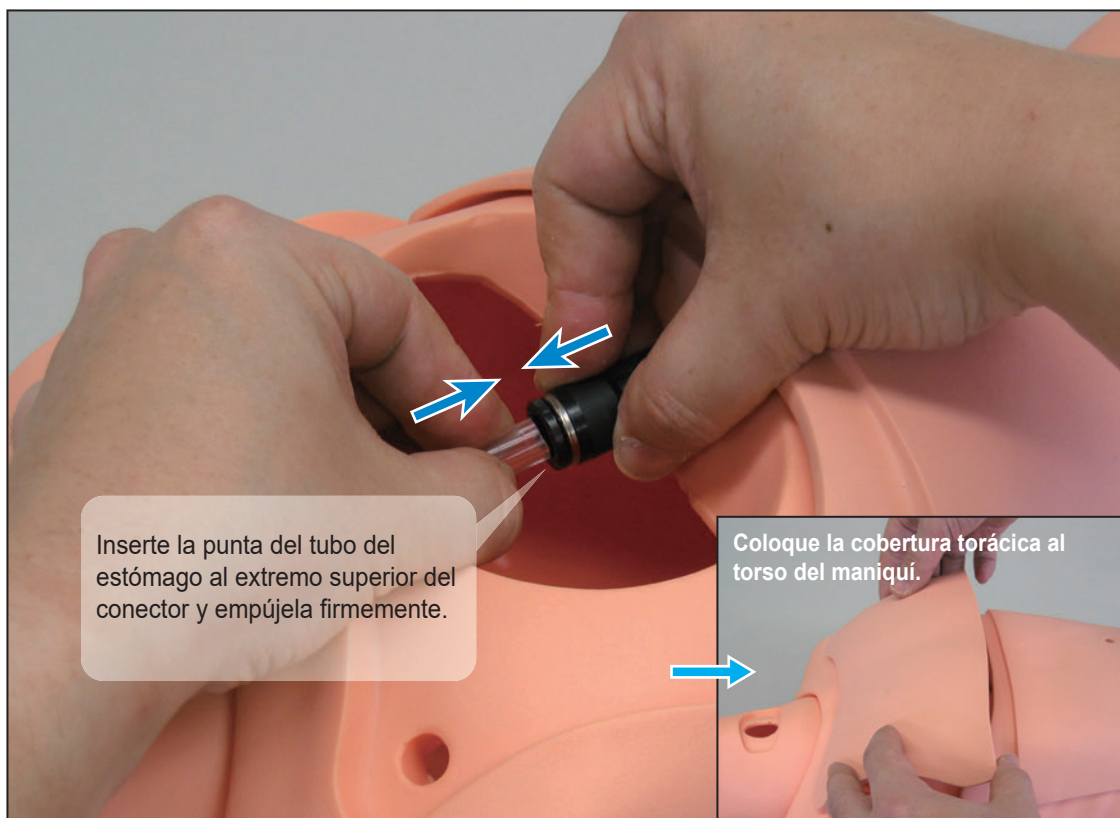

Advertencia: Coloque la cobertura torácica encima de la pared abdominal por alinear las protuberancias con sus huecos correspondientes. La pared abdominal tiene que ser colocada primero.


Desconectar el estómago-esófago

1

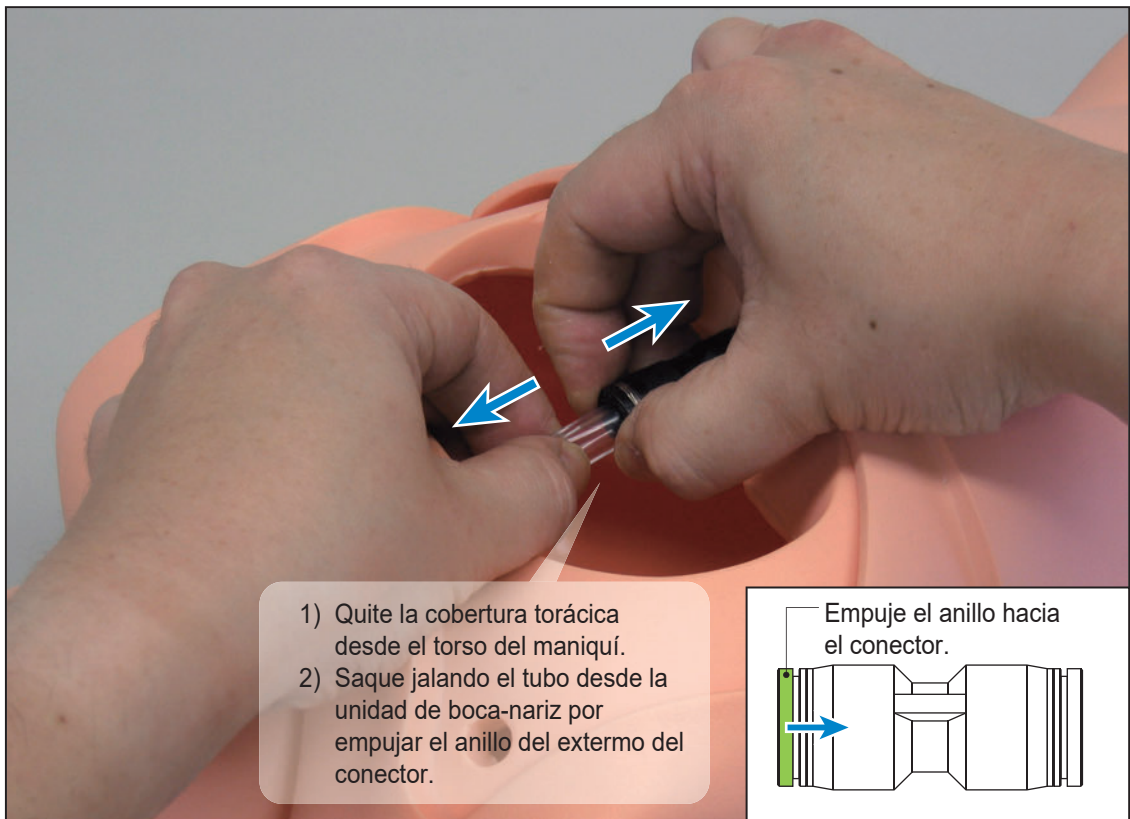

 Advertencia: Véase la página 18 para la instrucción de cómo quitar la cobertura torácica.

2

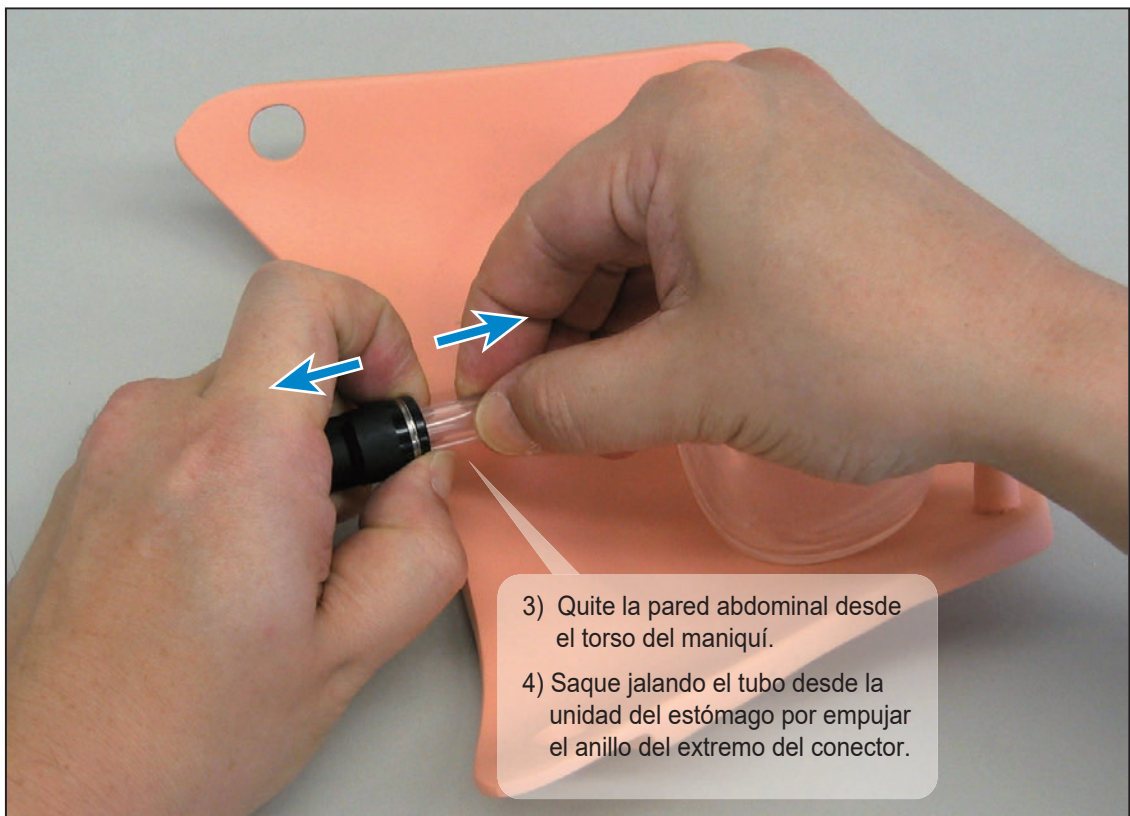

 Advertencia: Véase la página 19 para la instrucción de cómo quitar la pared abdominal.


Estómago: relleno y drenaje del agua

1



⚠ No inyecte más de 100ml de agua.


2

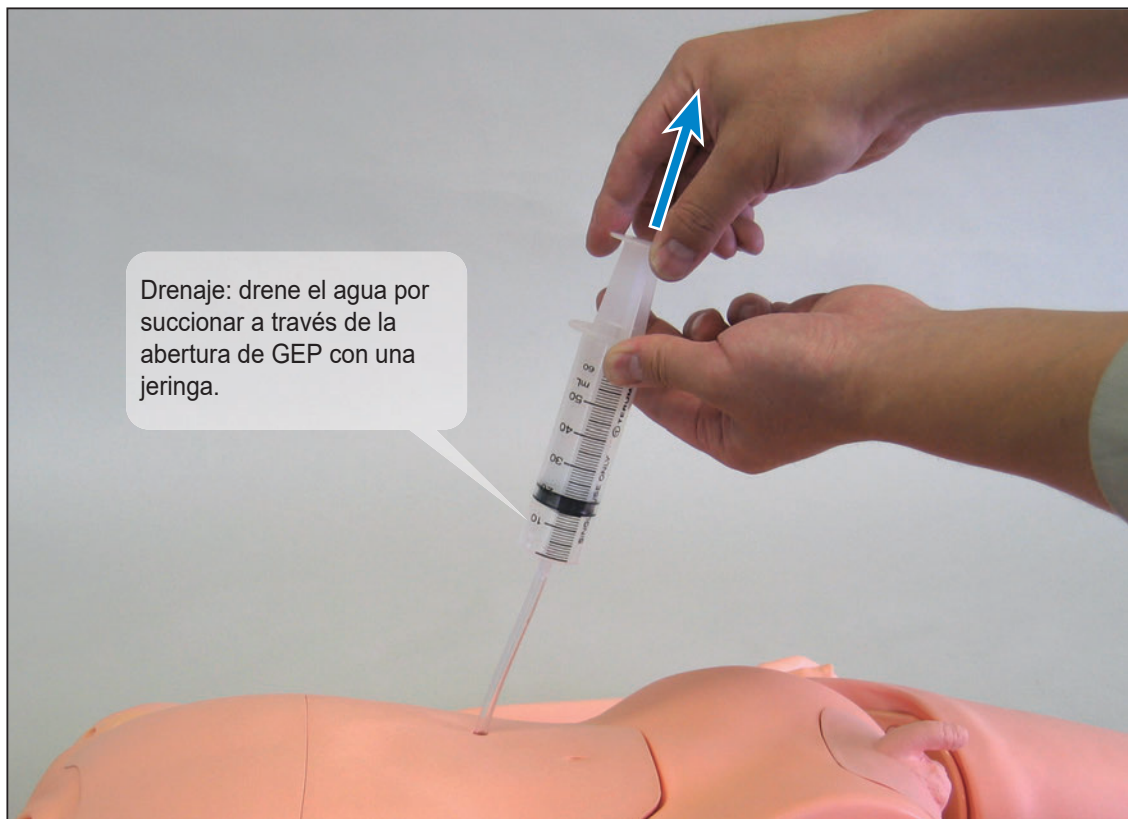

Unidad genital


1

Desajuste la unidad por empujar el botón hasta que suene el clic, luego desajuste el conector.

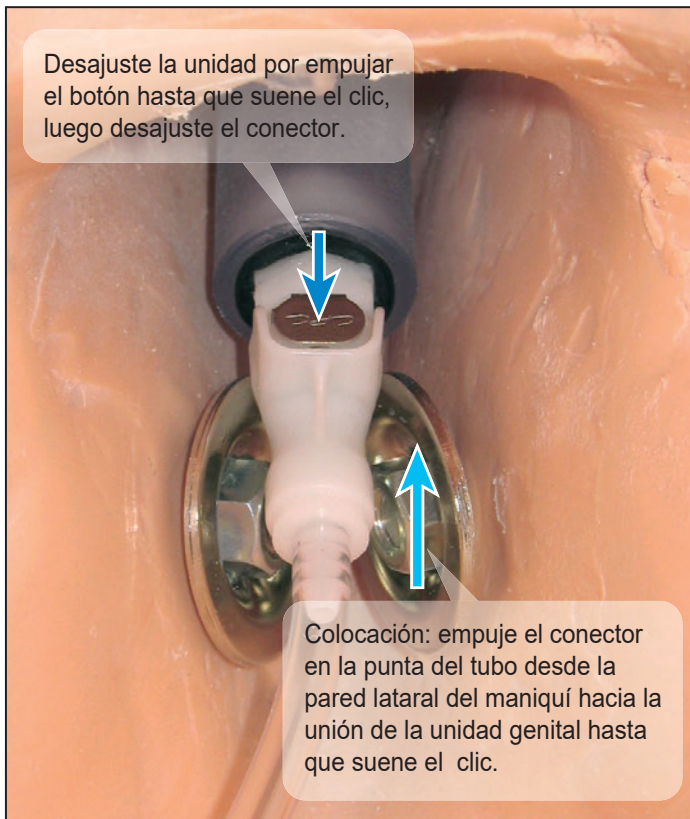

Colocación: empuje el conector en la punta del tubo desde la pared lateral del maniquí hacia la unión de la unidad genital hasta que suene el clic.


Antes de ajustar el tubo, abra el tapón por empujar el botón metálico encima del conector.

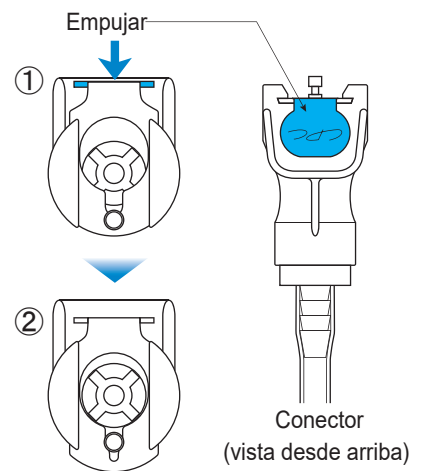

2

Colocación: Inserte el reservorio a la abertura, confirmando la orientación.


Descolocación: Saque jalando la unidad suavemente.

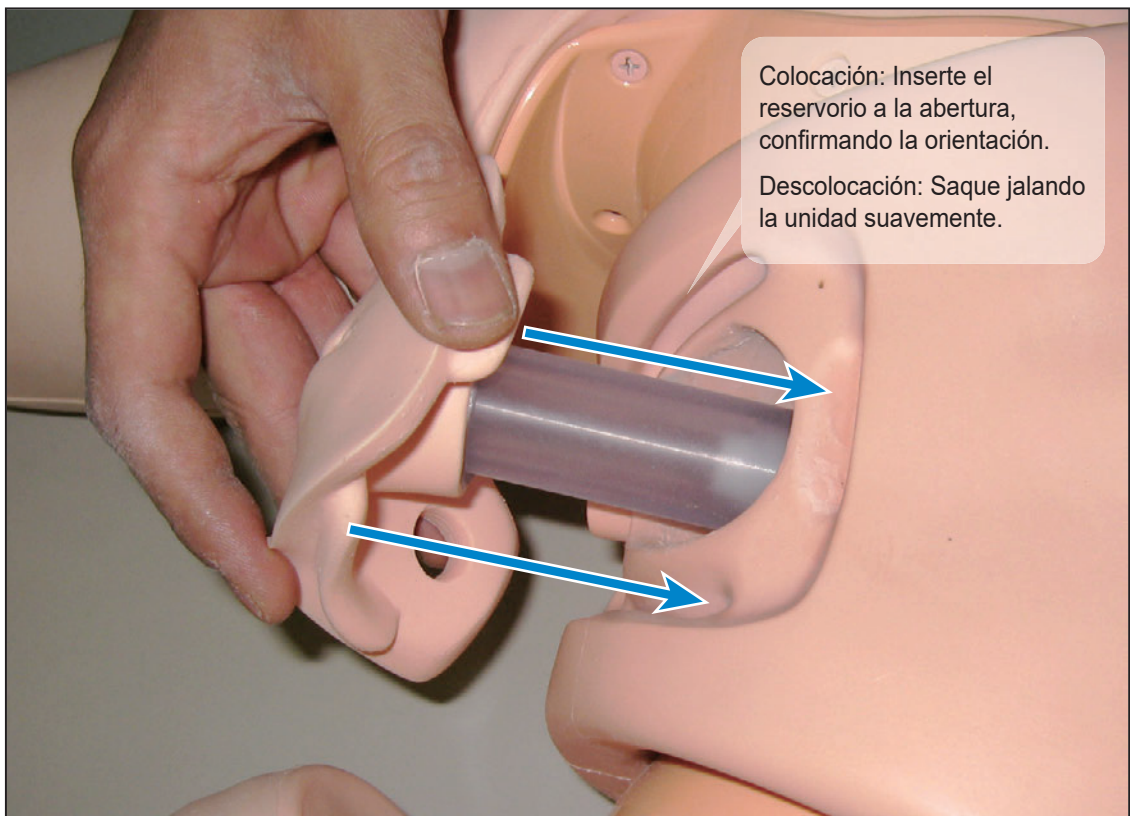


Juego de riego

1

Inserte la fijación de la punta del tubo de la bolsa de reservorio al conector de la pared lateral del maniquí hasta que suene clic.

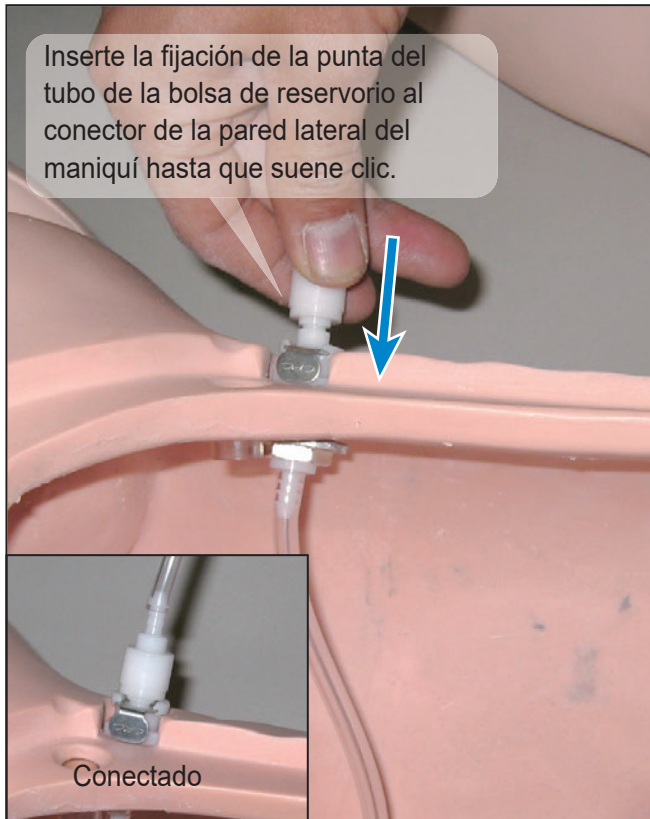

Antes de ajustar el tubo, abra el tapón por empujar el botón metálico encima del conector.

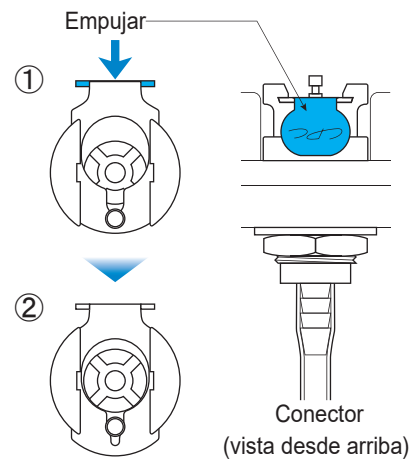


2


Note: el portasueros no está incluido en el juego.




Desajuste el conector

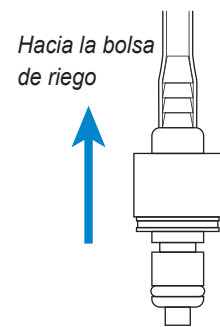


Empuje hasta que suene clic.

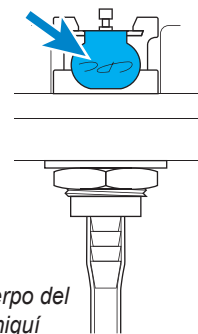

 **Advertencia:** Por favor espere un poco hasta que llegue el agua hasta la unidad genitalia en su primer uso; Prepare con anticipación para la primera sesión de entrenamiento.

Cambio de la válvula de la unidad genital

1

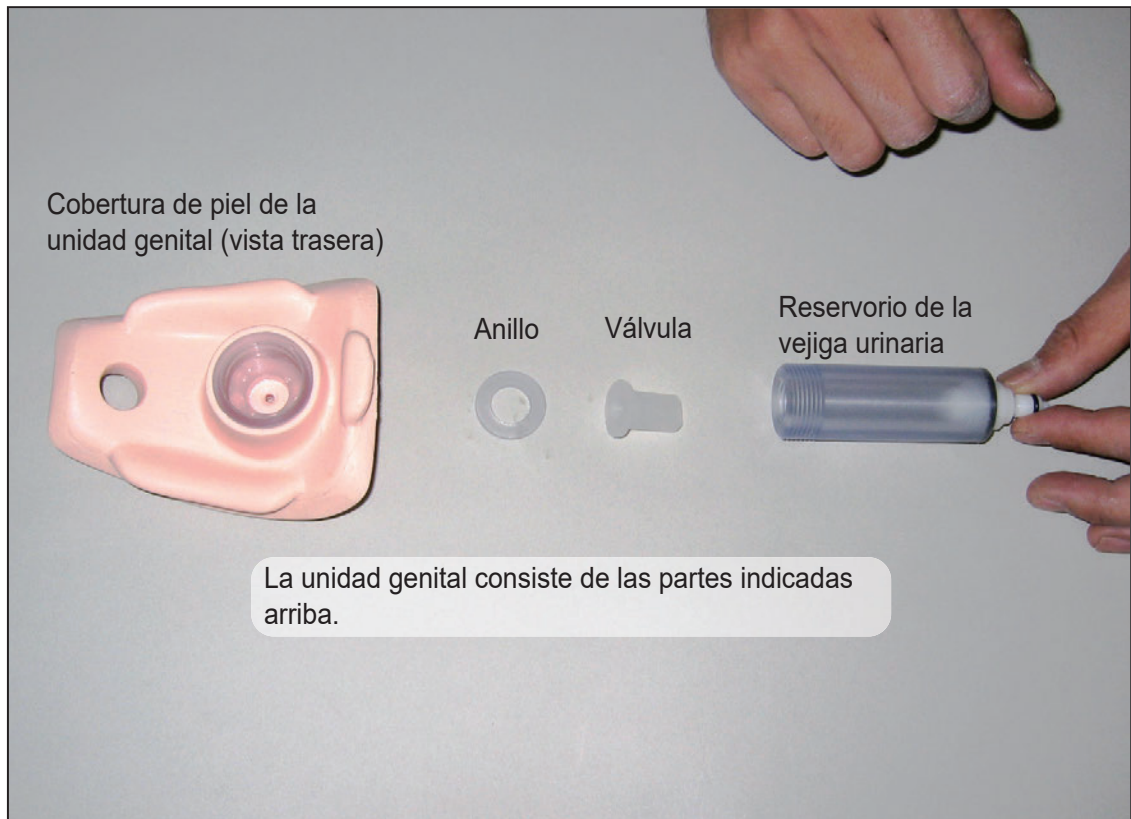

2



Cambio de la válvula de la unidad genital (continuo)

3



4




Cambio de la válvula de la unidad genital (continuo)

5




6




 **Advertencia:** No dé una fuerza excesiva para ajustar el reservorio. Si el reservorio no está bien alineada con la ranura, desajuste y ajuste de nuevo. Para desajustar, siga el orden reverse del procedimiento indicado arriba.

Coberturas torácica y abdominal

1

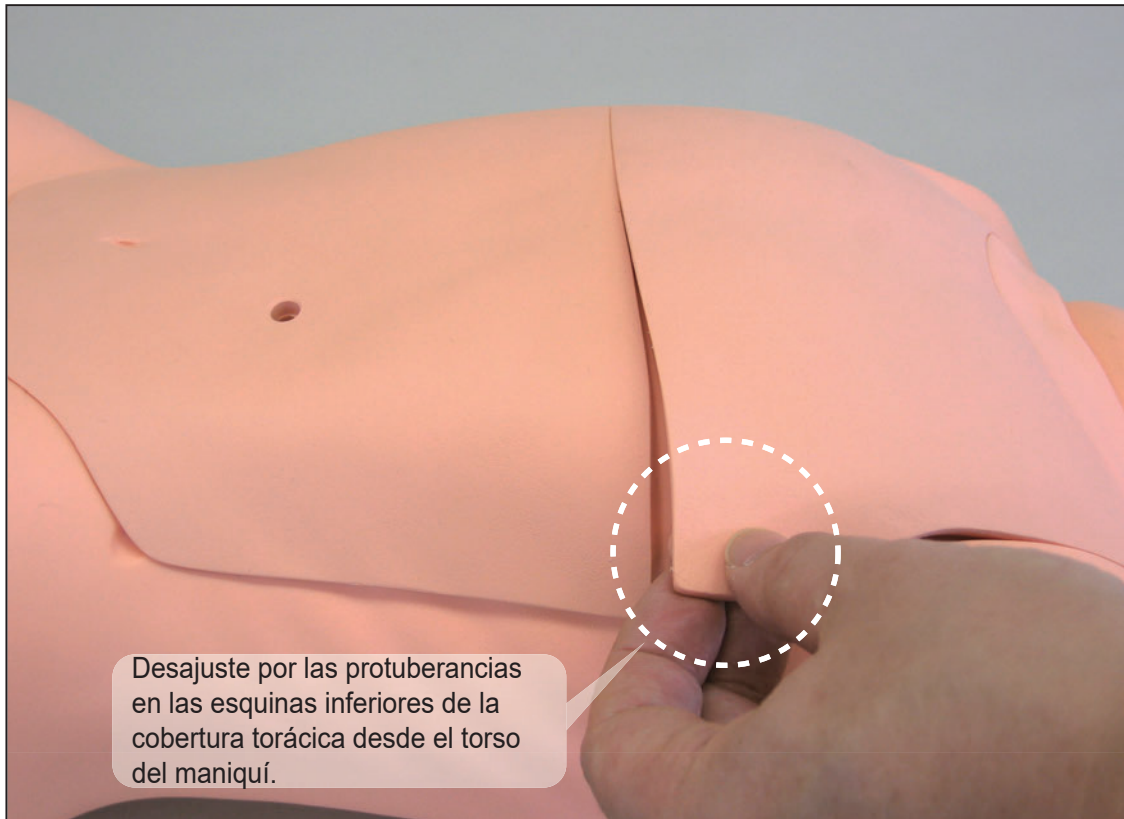


2

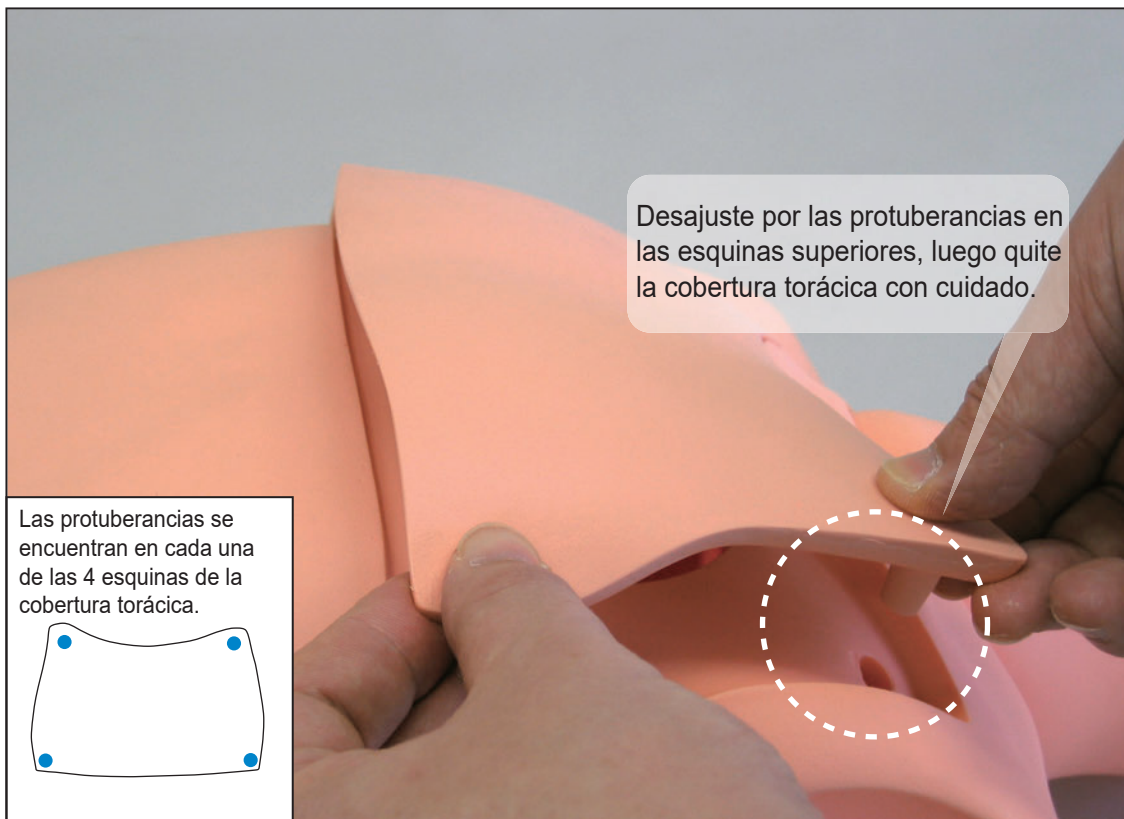


Coberturas torácica y abdominal (continuo)

3

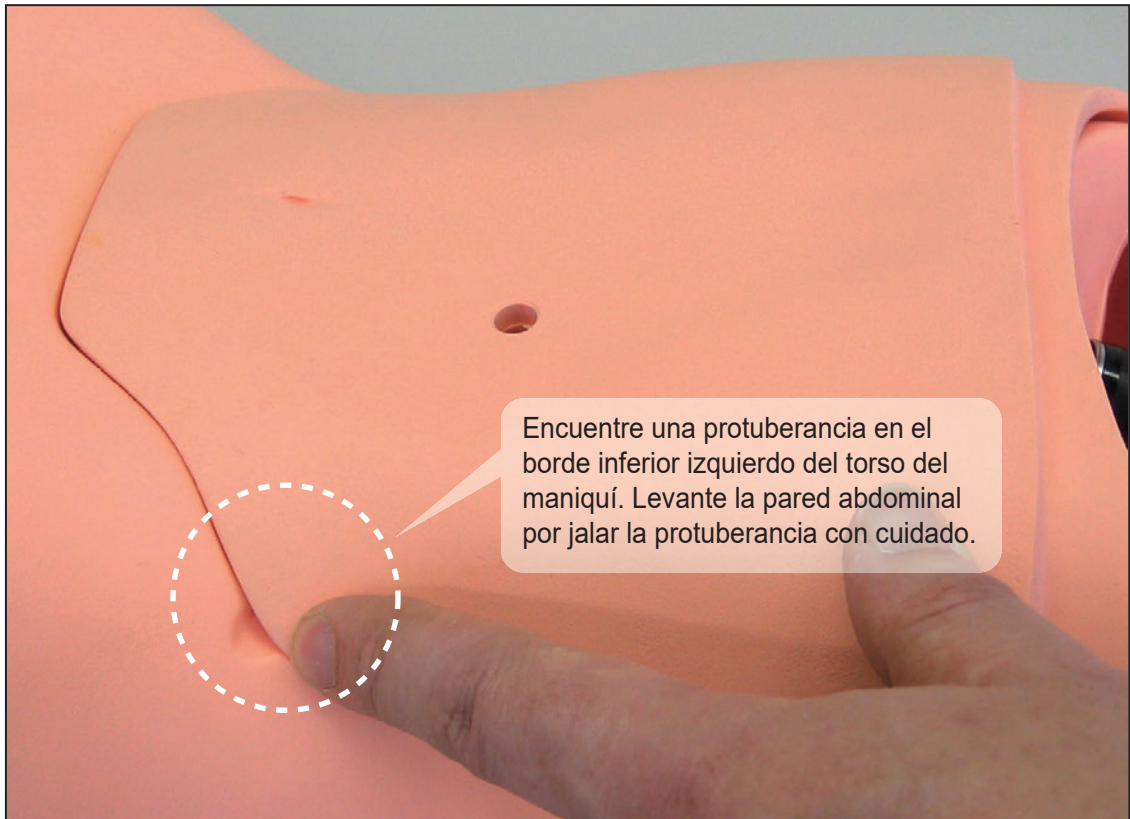

4

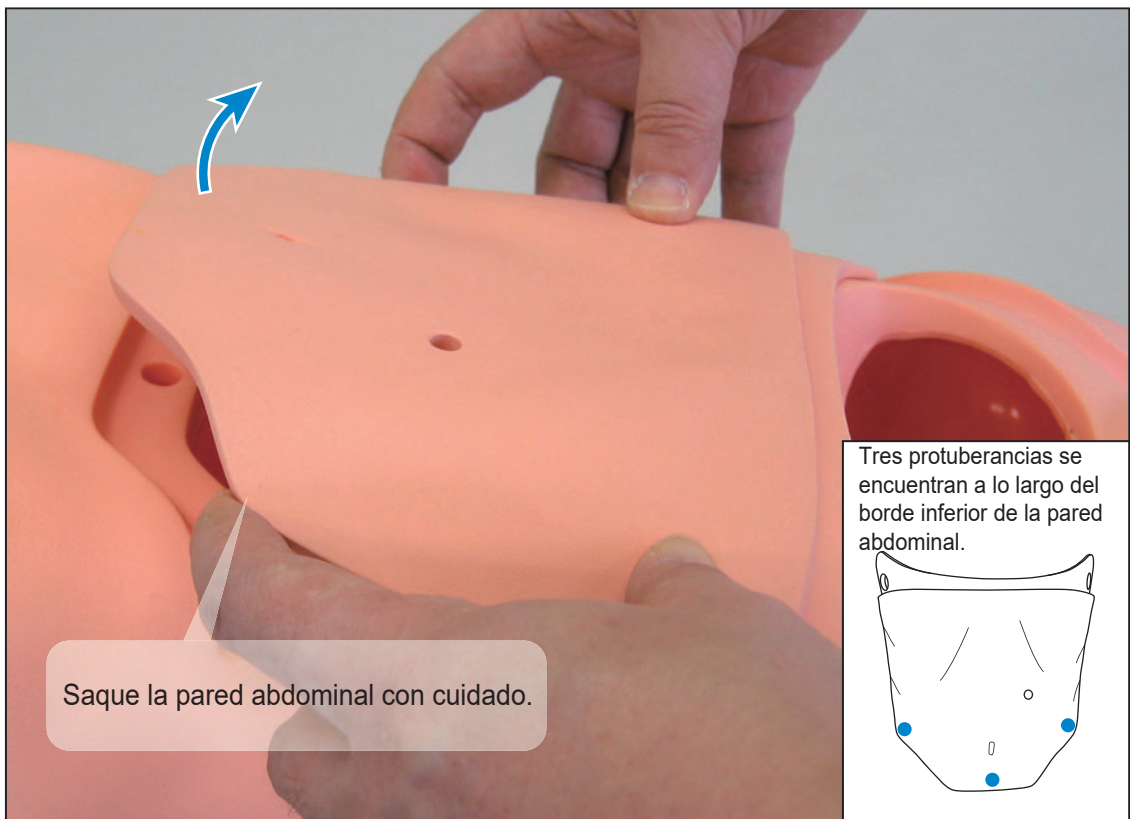

Instrucción del manejo y almacenamiento

Qué haceres

Siempre maneje el maniquí y otros componentes con un máximo cuidado.

Siempre use el aceite de silicona incluido como lubricante para las partes relevantes de la sesión de cateterización urinaria.

Transporte el maniquí sosteniendo su torso, teniendo cuidado de pinchar sus dedos en la junta.



Recuerde del resorte metálico en el lado trasero del cuello del maniquí.

Limpie la superficie del maniquí con una tela suave humedecida con agua o etanol, y luego seque en aire. Aplique el talco antes de almacenarlo para evitar la pegajosidad.

Almacene el maniquí a temperatura ambiente, alejado de las radiaciones solares directas, calor o humedad alta.

La tubería será amarilla pro el paso del tiempo; Esto no afecta al desempeño de la unidad.

Use los catéteres del tamaño recomendado listados abajo (o más delgados):

El uso de los catéteres más grandes podrá causar la rotura de las aberturas.

- Tubo GEP 20Fr . (6. 7mm) × 3. 4cm
- Catéter de alimentación nasal 14Fr . (4. 7mm) × 120cm
- Catéter de alimentación nasal 12Fr . (4. 0mm) × 40cm
- Catéter urinaria 9Fr . (3. 0mm) × 23cm
- Catéter urinaria I.D 6,0 8,3 O.D

Qué no haceres

Nunca use los catéteres de muestra incluidos en el juego B fuera del entrenamiento con el Simulador de Atención de Paciente Pediátrico (M56). Cualquier otro uso no está autorizado y el fabricante no asume la responsabilidad para cualquier daño o lesión si se usa para el tratamiento de los pacientes humanos reales.

La piel del maniquí es permeable con las tintas; no use la pluma con tinta o deje los materiales impresos cerca de la piel del maniquí, incluso este manual de instrucción.

No use desolventes orgánicos para limpiar el maniquí.

La tinta de este manual manchará el maniquí. No deje tener en contacto con la piel.

 **KYOTO KAGAKU co.,LTD**

URL: <http://www.kyotokagaku.com> e-mail: rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

Inquietudes y pedidos (global)

Oficina Matriz y Fábrica :

15 Kitanechoya-cho, Fushimi-ku, Kyoto, 612-8388, JAPAN

Tel: +81-75-605-2510 Fax: +81-75-605-2519

Todas las Américas:

KYOTOKAGAKU AMERICA INC.

3109 Lomita Boulevard, Torrance, CA 90505-5108, USA

Tel: 1-310-325-8860 Fax: 1-310-325-8867

Los contenidos del manual de instrucción están sujetos al cambio sin anticipación.

Ninguna parte de este manual de instrucción podrá ser reproducida o transmitida en ninguna manera sin el permiso del fabricante.

Por favor contacte con el fabricante para copias extras de este manual el cuál podrá contener importantes actualizaciones y revisiones.

Por favor contacte con el fabricante sobre cualquiera discrepancia en este manual o comentarios sobre el producto.

Su cooperación será cordialmente agradecida.