

褥瘡シミュレータ



褥瘡シミュレータ

型番	コード No
MW63	11446-000フルセット
	11446-100 ベーシックセット

■ 構成	11446-000	11446-100
ボディ	○	○
仙骨部褥瘡パッド		
ステージⅡ		
ステージⅢ	○	○
ステージⅣ(肉芽あり)		
ステージⅣ(ポケットあり)		
坐骨部褥瘡パッド ステージⅣ	○	○
エコーパッド 2 種セット	○	-
壊死組織の除去セット	○	-
消耗品セット(模擬膿、模擬血液、 模擬滲出液、模擬壊死組織)	○	○
収納ケース	○	○
取扱説明書	○	○



■ 本体	
本 体	成人腰部モデル
大 き さ	W44×D40×H38cm(腰部モデル本体)
材 質	軟質特殊樹脂／硬質特殊樹脂
重 量	約 3.8kg (パッド装着時)

交換部



消耗品セット(模擬膿／模擬
血液／模擬滲出液／模擬壊死組織)
11446-010



模擬膿(液体)
2 個組 各 100 ml
11446-020



模擬滲出液(液体)
2 個組 各 100 ml
11446-030



模擬血液(液体)
2 個組 各 100 ml
11446-040



模擬壊死組織
1 個組 50g
11446-050

別売部



壊死組織の除去セット
11446-200



壊死組織の除去ベース
11446-210



壊死組織の除去パッド
4 個組
11446-220



エコーパッド 2 種セット
(正常／水腫)
11446-070

※セット単体でのご使用も可能です

※リニアプローブ対応。
モデル坐骨部に設置して使用できます。

- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になることがございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

取扱店

製造元



<https://www.kyotokagaku.com/jp/rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp>

京都本社・工場
〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075

1

スケールを用いた

褥瘡の評価

A. 仙骨部では、ステージⅡ～Ⅳまでを再現。
スケールに沿った客観的評価を行うことができます。



真皮までの損傷



全層組織欠損

全層組織欠損
肉芽を再現皮下組織を越える損傷
ポケット・骨の露出も再現

B. 大転子部




全層組織欠損

C. 坐骨部



皮下組織を越える損傷

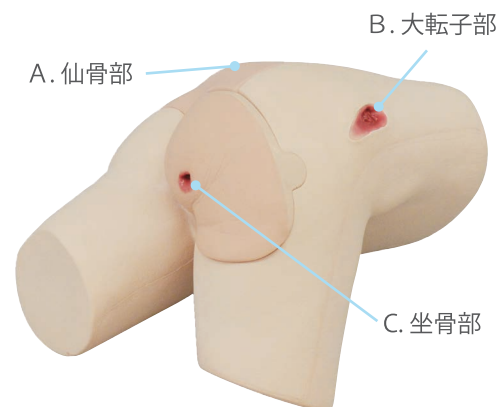

例) DESIGN-R® 2020 を用いた評価では、
ステージの異なるパッドと
創部再現キットを組み合わせ
て7項目全てをトレーニングできます。

Depth 深さ

Exudate 滲出液

Size 大きさ

Inflammation / Infection 炎症 / 感染

Granulation 肉芽組織

Neocrotic tissue 壊死組織

Pocket ポケット

※パッド部分は油性ペンで繰り返し書いて消すことが可能です。

一般社団法人 日本褥瘡学会 改定 DESIGN-R®2020
http://www.jspu.org/jpn/member/pdf/design-r2020_doc.pdf (2021年4月時点)


POINT

2


エコーを用いた

皮下軟部組織の観察

坐骨部では、お手持ちの超音波装置を使って、深部組織の観察をトレーニングできます。正常と水腫の2種類をご用意。

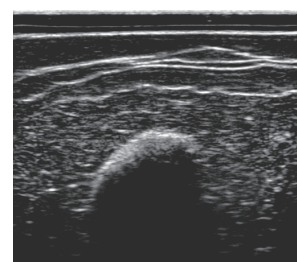

正常

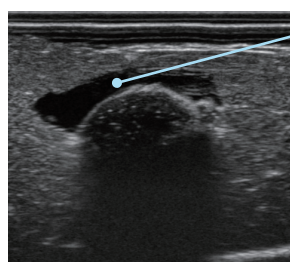

水腫

無エコー部分：水腫



POINT

3

予防と創部ケア

洗浄やドレッシング材の貼付



洗浄できる



貼付できる

創部の洗浄や、ドレッシング材の貼付、
外用薬の塗布や陰圧閉鎖療法の手順をト
レーニングすることができます。


POINT

4



より実践力を高めるために

忠実な質感の再現

滲出液や壊死組織の質感を忠実に再現できるキットが付属。
言葉や写真だけでは伝えることが難しかった様々な創部の状態
を、再現することができます。

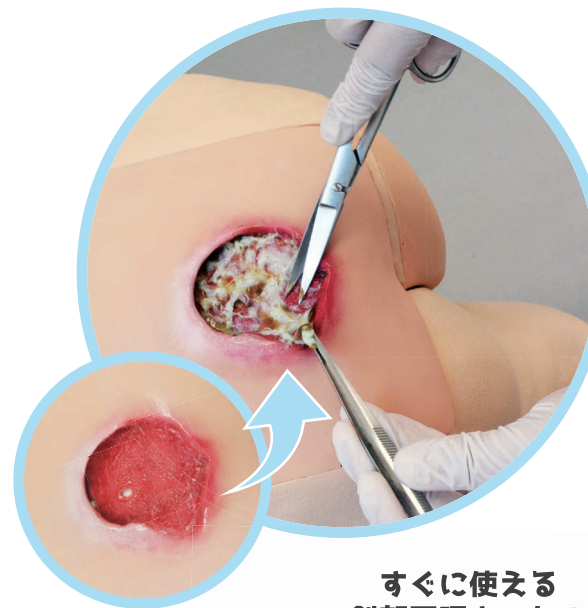すぐに使える
創部再現キット！壊死組織の除去セット
こだわりポイント

“三層構造”になっています

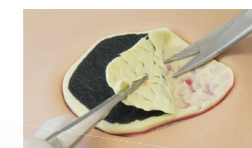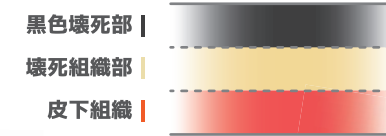

模擬血液

模擬膿

模擬滲出液

模擬壊死組織

壊死組織の除去セット

※フルセットにのみ付属

監修・指導

神戸大学医学部 形成外科学教室 教授 寺師浩人
富山リハビリテーション医療福祉大学 非常勤講師 杉元雅晴
神戸大学医学部附属病院 看護部 野口まどか

実習項目

DESIGN-R® 2020 を用いた評価
創部の触診
エコー撮像法を用いた観察（坐骨部の水腫）
創および創周囲の洗浄
ドレッシング材の貼付

外用薬の塗布
陰圧閉鎖療法の手順
デブリードマン
褥瘡予防