

## おむつ交換トレーニングモデル

型番 MW23 | コードNo 11402-000 | 価格 ¥お問い合わせください

モデル本体	1点
男性性器	1点
イルリガートル	1点
接続チューブ	1点
カテーテルチップシリンジ	1点
ディスクカップ	1点
模擬水様便	1点
エアポンプ	1点
着色用綿棒(青)	10本組



本体	成人腰部モデル
大きさ	約 W31×D50×H21cm
材質	PVC
重量	約 0.4 kg

# おむつ交換トレーニングモデル

快適で漏れないおむつのあて方が一目でわかる!  
ADL(日常生活動作)向上と  
褥瘡発生・悪化の予防につながります

交換部品



11402-010  
着色用綿棒(青) 10本組



11229-070  
模擬痰/模擬水様便 150ml×3袋

D  
V  
D

実践!看護技術シリーズ ■排泄の援助技術編 全4巻  
Vol.2 オムツを用いた排泄の援助

コードNo 12967-420 | 価格 ¥28,000 (税別)

オムツの適用(パンツ型、テープ型、平オムツ、尿取りパッド)、オムツによる弊害、オムツ援助(援助前の準備、交換方法、排便がある場合、水様便がある場合、側臥位が取れない場合など)



※DVDの詳細については、オンラインカタログ:  
<http://www.kyotokagaku.jp> の検索欄に  
コード番号(例: 12967-420)を入力してご覧ください。

関連製品



KT-26 12660-000  
おむつ交換実習セット

様々なタイプのオムツとオムツ交換実習時に必要となる制菌予防衣や手袋などをセットにしています。



KU-21 12314-070  
大人用紙おむつセットB  
小クラス単位

日常生活を送れる方から介護の必要な方まで、身体状態に応じたおむつの種類をセットしています。

- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

取扱店

製造元

株式会社 **京都科学** URL <http://www.kyotokagaku.com>  
e-mail [rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp](mailto:rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp)

京都本社・工場  
〒612-8388 京都市伏見区北塚小屋町15番地  
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店  
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号  
NREG本郷三丁目ビル2階  
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075



① 体の中心(背骨)におむつとパットの中心を合わせる




② お尻の割れ目に沿ってパットをあて尿道口・肛門に合わせる



Point 1

### 適切におむつをあてるランドマーク付

おむつとパッドをあてる手順を、体の部位を確認しながらトレーニングすることで上達につながります。

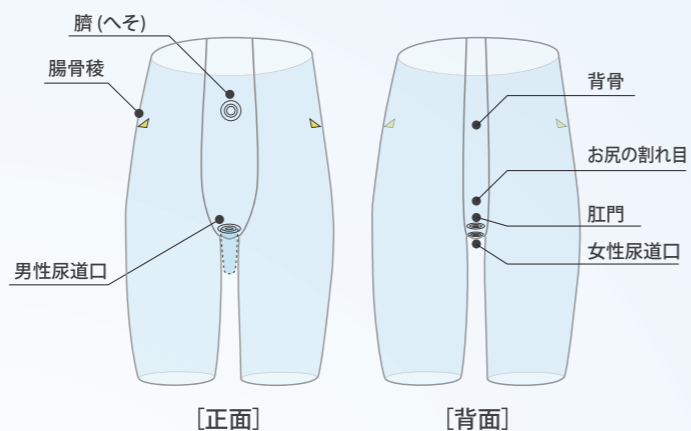

※ 写真はおむつのあて方が分かりやすいように一人で作業を行っていますが、実習時は他の人にモデルを支えてもらいながらトレーニングを行ってください。

③ おむつをかぶせ、片側ずつおむつの下側テープをとめてから腸骨稜の位置に上側テープをとめる



④ 臍(へそ)周辺を圧迫していないか確認する



Point 2

### 模擬尿や模擬水様便を流すことが可能


模擬尿や模擬水様便を流すとパッドに広がり、おむつ装着の良否の確認ができます。尿量の設定が可能のため、尿量とおむつやパッドへの吸収との関係がわかり、適切なおむつの選び方を検討できます。また排尿の速さを調整して成人や高齢者を想定したトレーニングが可能です。



Point 3

### おむつの内側が確認できる透明モデル

内側からおむつとパッドのあたっている位置が見えるため、体との密着具合やおむつとパッドの納まりずれの有無、ギャザーの立ち具合などを目で見ながら指で触って確認できます。また、尿や水様便が漏れた位置を確認することで、漏れが生じた原因や、適切なあてかたを習得できます。

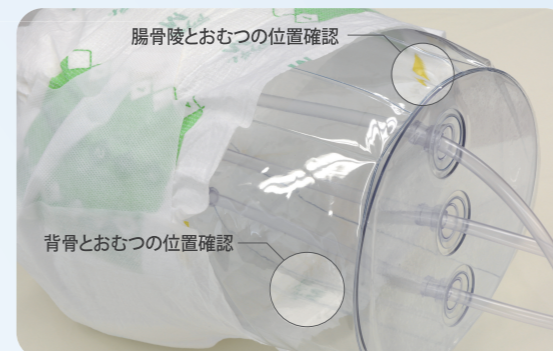

Point 4

### 男女を想定したトレーニングが可能

付属の男性性器を男性尿道口に取り付けるだけ。男性性器の長さや尿道口の向き(上向き・下向き)をかえることで、個人差に応じたおむつのあてかたをトレーニングできます。



Point 5

### 軽量で持ち運びが容易

空気を入れてふくらませるボディのため軽量です。持ち運びやすく、いつでもどこでもトレーニングできます。また、空気を入れたボディはおむつ装着に適した適度な弾力性を備え、空気の入れ方で体型の調整も可能です。