

# 万能型看護実習モデル “八重”

40 種以上の看護技術項目を網羅  
卒前教育から実践レベルまで活用できる看護実習モデル






撮影協力：京都看護大学

# 万能型看護実習モデル “八重”

## OVERVIEW 概要

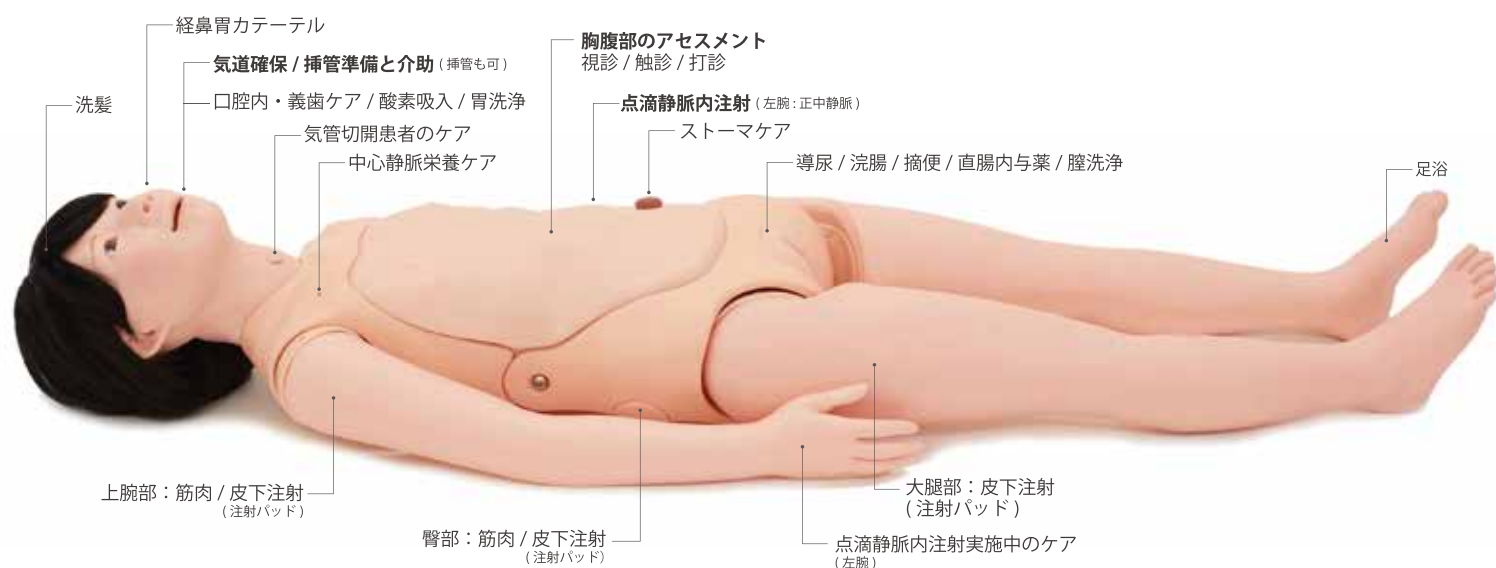

## 胸腹部のアセスメント

人間みたいな  
やわらかさ



### 多角的にアセスメントを学ぶ

視診・触診・聴診・打診で腹部アセスメントの手順を習得。  
胸腹部は、人体同様に柔らかく肋骨も再現しており、胸腹部のアセスメント手順の確認を実現。

視診

触診

打診

## 輸液管理



撮影に協力：京都看護大学

### 患者さんに配慮した輸液ケア

- 正中静脈（左腕）：  
静脈注射 / 薬液投与 / 点滴静脈内注射での滴下確認 / 固定法
- 手背静脈（左腕）：  
点滴静脈内注射実施中のケア / 点滴静脈内注射の手順



※手背部では薬液投与はできません

## マスク・かつらの変更 ※特許出願中



### 様々な患者設定がすぐにできる

マスク（顔）やかつら・性器の交換で、年齢・性別を変更。  
患者の状況設定に合わせて、より臨場感があるトレーニングが実現。



工具やねじを使わない  
かんたん交換！

※交換用のマスクは裏面参照

## 挿管介助



### 気道確保・胸骨圧迫

周手術期やICUでの救急対応の看護を想定した挿管介助のトレーニングが実施可能。

- 器具類の準備
- 経口挿管（喉頭鏡 / ビデオ喉頭鏡）
- 挿管後の聴診
- 気管チューブの固定
- 換気の挙上確認（両肺 / 片肺）
- 胸骨圧迫



“八重”は「さくらII」の技術項目を踏襲し、さらに「挿管介助」などの項目を追加より実践的な看護技術習得のための看護実習モデルです



#### 経管栄養（経鼻／経口）

カテーテル挿入、聴診によるチューブ位置の確認、固定方法



#### 気管切開患者のケア

気管カニューレの挿入、吸引手順



#### 胸腹部のアセスメント

胸腹部の触診、視診、打診方法（肋骨、腹部の質感を再現）



#### 挿管介助

器具準備、聴診確認、気管チューブの固定



#### 直腸内与薬

苦痛と羞恥心に配慮した坐薬の挿入法



#### 摘便

苦痛と羞恥心に配慮した技術の習得



#### ストーマケア

パウチ装着方法、排泄物の処理、ストーマ周辺の清拭



#### 導尿

一時的導尿  
持続的導尿：膀胱留置カテーテルの挿入



#### 皮下注射（臀部／大腿／上腕）

### 新人看護職員到達目標 一看護技術についての到達目標ー【該当項目】

#### 食事援助技術

- ・経管栄養：
- 経口／経鼻カテーテル挿入

#### 排泄援助技術

- ・浣腸・腸洗浄
- ・膀胱内留置カテーテルの挿入
- ・排泄援助、摘便
- ・ストーマケア
- ・導尿

#### 活動・休息援助技術

- ・体位変換／保持／運動の介助
- ・関節可動域訓練

#### 清潔・衣生活援助技術

- ・清拭
- ・洗髪
- ・口腔ケア／義歯のケア
- ・部分浴／陰部ケア／おむつ交換
- ・寝衣交換

#### 呼吸・循環を整える技術

- ・酸素吸入療法
- ・吸引の手順（気管／口腔／鼻腔）
- ・体位ドレナージの手順
- ・気管切開患者のケア

#### 創傷管理技術

- ・褥そうの予防
- ・包帯法

#### 与薬の技術

- ・直腸内与薬
- ・皮下注射／筋肉内注射
- ・静脈内注射／点滴静脈内注射
- ・中心静脈栄養ケア
- ・輸血の準備

#### 救命救急／処置技術

- ・気道確保
- ・気管挿管の準備と介助

#### 症状・生体機能管理技術

- ・全身状態のアセスメント手順
- ・バイタルサインの診察手順

#### 苦痛の緩和・安楽確保の技術

- ・安楽な体位の保持
- ・電法



筋肉注射（臀部 / 上腕）



中心静脈栄養ケア

カテーテル固定状態の患者さんのケア、消毒方法



点滴静脈内注射（正中静脈）

安全で確実な手技と滴下の練習



口腔内ケア

感染症予防  
口腔機能のリハビリトレーニング



清拭

清潔保持や安楽



部分浴（手浴 / 足浴）

清潔保持や安楽、ベッド上でのケアの所作



洗髪

洗髪及びドライヤーによる乾燥



寝衣交換

患者さんの状態に配慮した寝衣交換



酸素吸入の手順

酸素吸入療法の理解

## その他の実習項目

- ・陰部洗浄
- ・浣腸
- ・胃洗浄
- ・膣洗浄
- ・腸洗浄
- ・吸引の手順
- ・褥瘡ケア
- ・整容
- ・電法
- ・包帯法
- ・胸骨圧迫
- ・気道確保
- ・体位変換
- ・関節可動域訓練
- ・体位ドレナージの手順
- ・バイタルサインの診察手順




# 万能型看護実習モデル “八重”

型番 MW25      コードNo 11404-000      価格 お問い合わせください

## SET INCLUDES 構成

- ・モデル本体 1体
- ・正中注射パッド 1点
- ・女性性器ユニット 1点
- ・排水用チューブ(太・細) 各1本
- ・パジャマ・下着 1式
- ・義歯 1式
- ・上腕注射パッド 2点
- ・排便・直腸内与薬ユニット 1点
- ・排水用ポンプ 各1点
- ・取扱説明書
- ・かつら(成人女性) 1点
- ・大腿パッド 2点
- ・付属品: 模擬座薬・模擬便・潤滑剤 (コネクター大・小)
- ・マスク(成人女性) 1点
- ・臀部パッド 2点
- ・貯水袋(大・小) 各1点

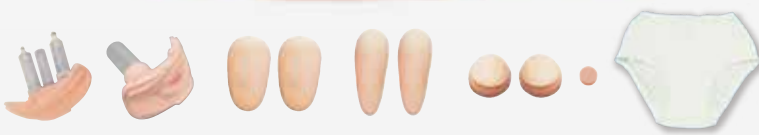

## DESCRIPTIONS

### 仕様

本体: 成人女性 全身モデル  
大きさ: 身長 約 152cm  
重量: 約 17kg


※パジャマのデザインは変更になる場合がございます。予めご了承ください。

## MASKS

### マスク



11404-010  
マスク (高齢者)

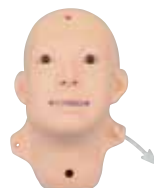

11404-020  
マスク (成人女性)

## WIGS

### かつら



11404-030  
かつら (高齢者)



11404-040  
かつら (成人女性)

## 交換部品



11404-060  
女性性器ユニット



11251-310  
排便・直腸内与薬ユニット



11251-350  
直腸弁



11404-080  
導尿用弁 6個組



11251-330  
模擬便 (硬便/軟便)




11251-320  
模擬座薬 (大/小)



11251-040  
大腿パッド



11251-030  
上腕注射パッド

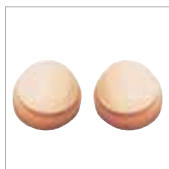


11251-050  
臀部パッド



11404-050  
正中注射パッド (4個組)



11229-050  
トレーニングモデル用潤滑剤

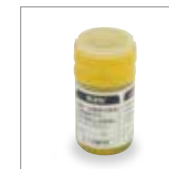

11381-800  
潤滑剤 (導尿・浣腸 他用)

## 別売部品



11404-070  
男性性器ユニット

12022-800  
MY-8 点滴静注シミュレータ器具セット (5名分)

12022-900  
MY-9 気道管理器具セット A

製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。  
このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

## 取扱店

## 製造元



株式会社 京都科学

URL: <http://www.kyotokagaku.com>  
e-mail: [rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp](mailto:rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp)

■ 京都本社・工場  
〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地  
TEL: 075-605-2510  
FAX: 075-605-2519

■ 東京支店  
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号  
NREG本郷三丁目ビル2階  
TEL: 03-3817-8071  
FAX: 03-3817-8075