

乳房マッサージモデル
CS-1形

使用上の注意

褥婦の乳房をマッサージするという乳房管理は、正しい手技を修得して行なわなければなりません。

このモデルは、人体に近い皮膚感触を出していますので、実際の褥婦に対するのと同様な感覚で手技の練習が行なえます。

（取り扱い上の注意）

- このモデルの皮膚部の材質は、生体の皮膚により似させた塩ビ製ですので柔軟性に富んでいます。しかし、材質上どうしても無理な力や鋭利な器具等による破損の可能性がありますので、できる限り、生体に対するのと全く同様な感覚で取り扱って下さい。
- モデルの使用前や、使用中に皮膚に脂気を含んできたらパウダーをつけて下さい。また、使用後は常にパウダーをつけるようおすすめします。
- 皮膚部の汚れは石けん水やぬるま湯で落とし、乾燥後はパウダーをつけて下さい。
- 油性のインクや塗料は、皮膚内部に浸み込んでとれなくなりますので、使用しないようにして下さい。

- モデルはケースに収めて保管して下さい。この時、首または乳房が上にくるようにして下さい。また、乳房部を下向きにして長時間放置しないで下さい。