

取扱説明書

⚠ 注意 | モデル表面に印刷物などが直接触れないようにしてください。
樹脂表面にインクが吸収されて消えなくなります。

M53B 前立腺触診モデル

このたびは前立腺触診モデルをご購入いただきありがとうございます。本製品は、前立腺触診の上達を目的としたシミュレーションモデルです。
前立腺触診用の補助機器としてご使用下さい。

● 特 長

1. 正常を含む10種類の前立腺症例の指診触診をトレーニングできます。
2. ひとつのモデルで3通りの体位をとることができます。
3. 症例はワンタッチダイヤル操作で簡単に切り換えることができます。
4. できるかぎり生体に近い指診部位の抵抗・感触を再現しました。

● 仕 様

本 体：成人男性臀部モデル
重 量：約5 kg
材 質：軟質特殊樹脂製
大きさ：モデル本体 約W36×D30×H24cm

● 症例

normal	正常	2種
enlargment	肥大症	2種
prostatitis	前立腺炎	1種
carcinoma	癌（局所・全体）	5種

● 構 成

- ① モデル本体（症例ユニット内蔵・ワンタッチダイヤル操作）1式
前立腺症例（症例ユニットに内蔵） 10例
 - ② 肛門部パッド 1点
 - ③ ワセリン 1点
 - ④ 手袋 1双
- 取扱説明書



● 交換部品

肛門部パッド
11272-040



⚠ 注意

● 取り扱いにご注意ください。

落下や強い衝撃を与えると破損の原因となります。特に症例ユニットの着脱については丁寧に扱い、落下には十分ご注意ください。

● 汚れは中性洗剤等で拭き取ってください。

モデルの汚れは水又は中性洗剤で、汚れが落ちにくい場合はアルコールで拭き、ベビーパウダーを塗布しておいてください。シンナーなどの有機溶剤は、絶対に使用しないでください。

● 印刷物をモデル表面におかないでください。

モデル表面に印刷物などが直接触れないようにしてください。
樹脂にインクが吸収されて消えなくなります。

● ボールペンやサインペンで書き込まないでください。

サインペン、ボールペンなどでモデルに書き込むと、インクが吸収されて消えなくなります。

● 高温多湿を避けて保管してください。


使用後は、高温多湿や直射日光のあたる場所での保管は避けてください。
変形や故障の原因となります。

● 表面が変色する場合があります。

長期間使用されない場合や経年変化で変色することがありますが、ご使用には差し支えありません。

使用方法

ダイヤルを回してトレーニングしたい症例に合わせてください。

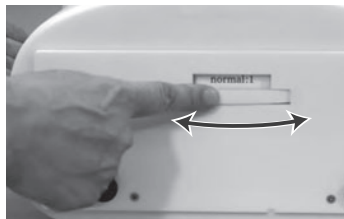

※ダイヤルがカチッと止まる
ところで使用してください。

○好みの体位でトレーニングを行ってください。

実習の際は、必ず付属のワセリンを指に塗布して指診してください。



腹臥位



側臥位



仰臥位

肛門部パッド及び症例の着脱方法

① 肛門部パッドの着脱方法



1. 肛門部パッドとモデル本体の隙間に指を少し差し込み、肛門部パッドを抜き取ります。




2. 肛門部パッドの直腸部をモデル本体の穴に合わせ差し込みながら、まず肛門部パッドの片側をモデル本体に合わせ、反対側の本体部を少し広げながら肛門部パッドを本体に取り付けます。




② 症例の着脱方法




1. モデル本体を腹臥位の状態にし、症例ユニットの2か所のネジをはずします。

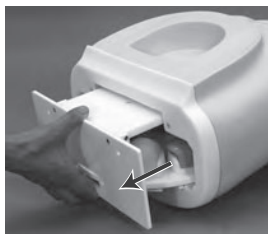

2. 症例ユニットが自然に出てきますので、手で支えゆっくりと引き出します。

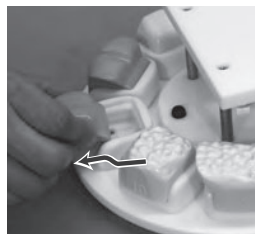

3. 症例をはずすときは、症例の手前を少し持ち上げ、症例を手前側に引き抜きます。

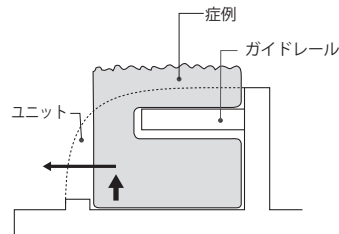

4. 症例の取り付けは、症例のミズをユニットのガイドレールに合わせ奥に押し込み、最後に症例の手前側を押し込みます。



5. 症例ユニットの固定時は、モデル本体を立て、穴の位置に合わせてネジを取付けてください。

本製品についてのお問い合わせや不具合等がございましたら、お買い上げの販売店、もしくは下記(株)京都科学までご連絡ください。



株式会社 **京都科学**

http://www.kyotokagaku.com
e-mail: rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

■ 本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL:075-605-2510 (直通) FAX:075-605-2519

■ 東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL:03-3817-8071 (直通) FAX:03-3817-8075