
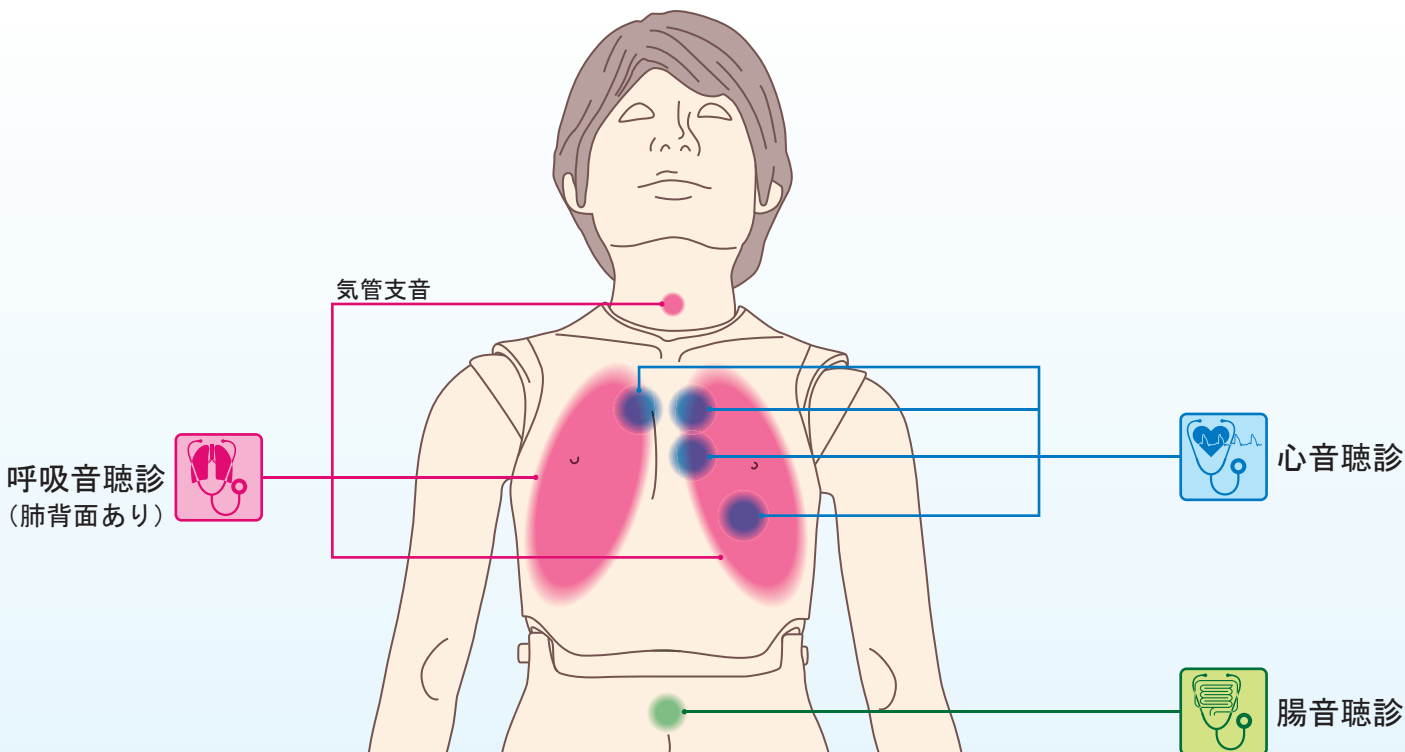


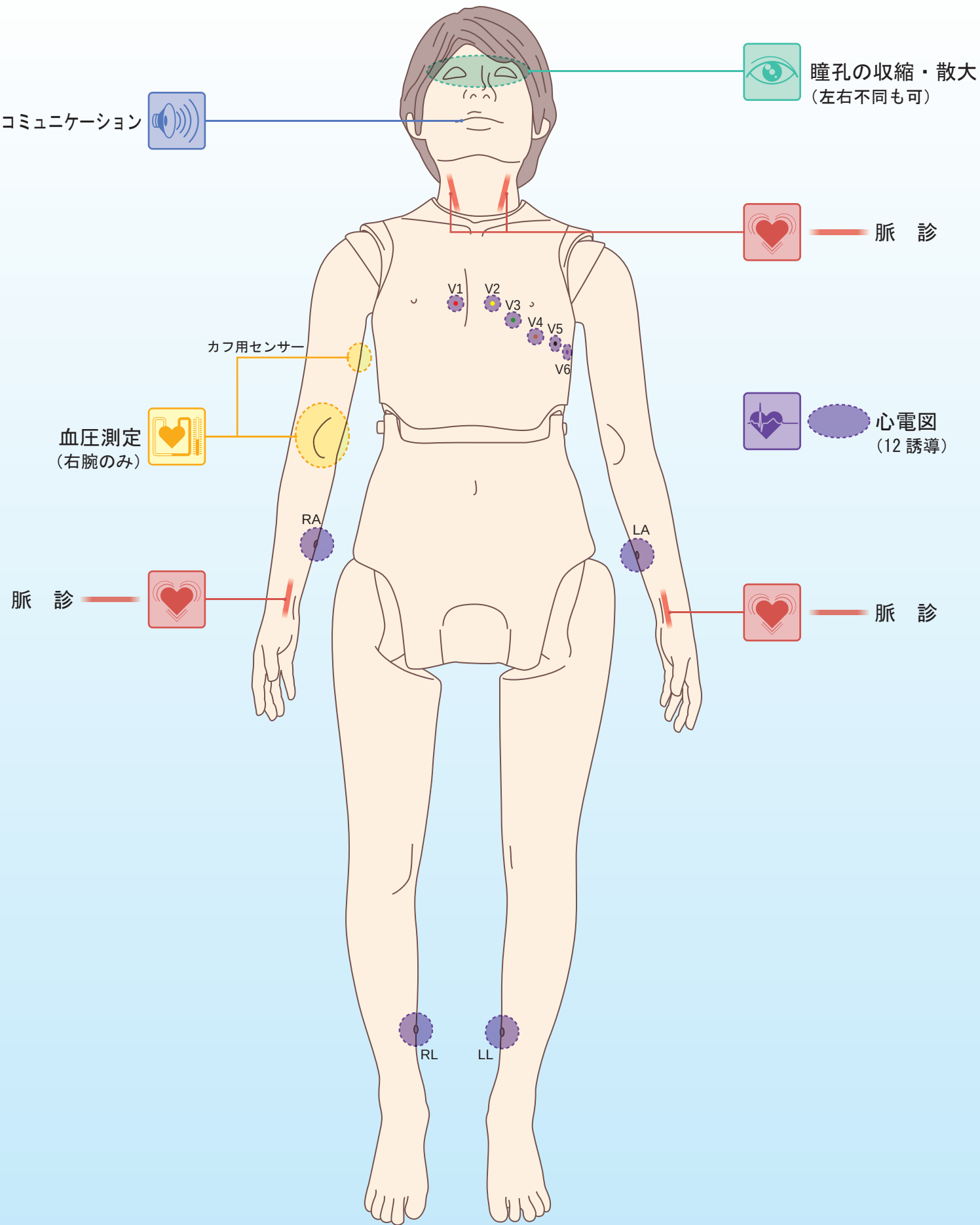


パソコンの起動

機器の接続が出来ましたら、パソコンの電源を入れてください。


←このマークのボタンがパソコンの電源スイッチです。

パソコンの電源が入ると自動的にソフトが起動し、トップのメニュー画面が表示されます。もしも画面上に「装置との接続を確認してください!」というメッセージが表示されるようでしたら、再び各機器類の接続を確認してください。

ソフトの終了方法

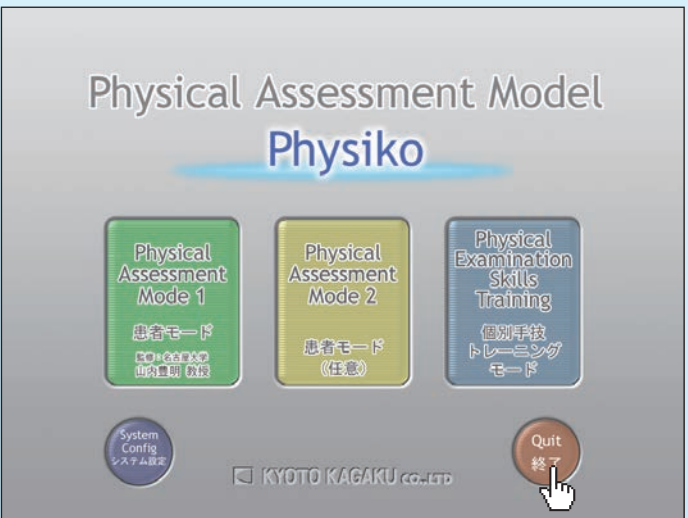


各画面右上の「トップへ」ボタンをクリックしてトップメニューへ戻ります。
次に右下の「終了」ボタンをクリックしますと、下のようなウィンドウが表示されますので、「はい」をクリックしてください。
ソフトが終了し、パソコンの電源が自動的に切れます。

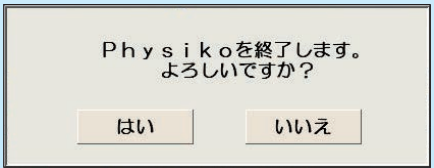

機器の接続方法

■各機器の接続 概略図

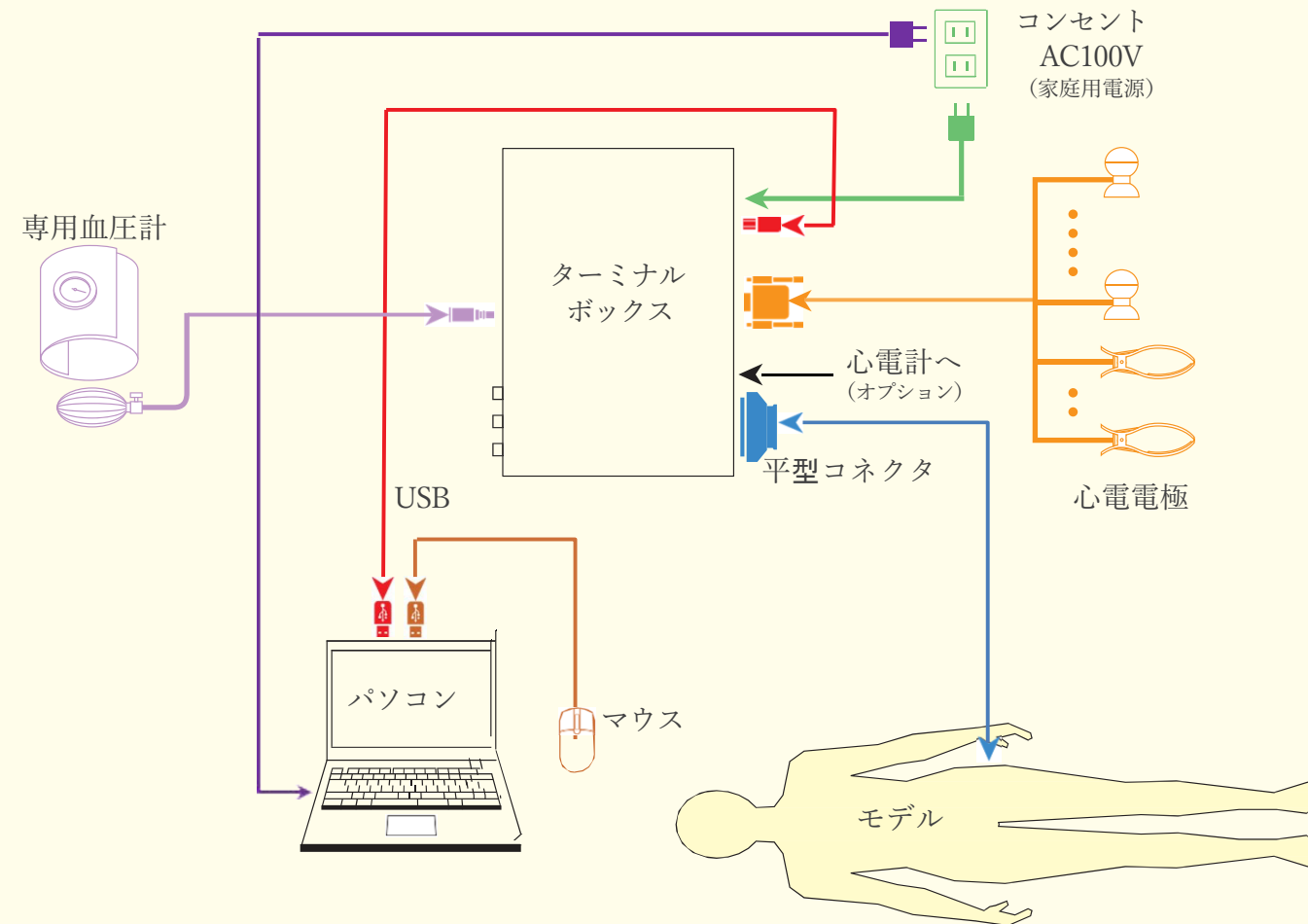

■パソコン 接続端子部



・パソコン背面にUSBコネクタが複数ありますが、どのコネクタに差し込んでもかまいません。

※パソコンのモデルにより写真とは配置が異なる可能性があります、USB端子の接続方法にかわりはありません。

■ターミナルボックス 背面




ターミナルボックスの背面の端子です。モデルを接続するコネクタの上下及び心電電極の向きに注意して取り付けてください。

心電計への端子には、お手持ちの心電計を繋いでください。
(心電計はオプションでもご用意いたしております。)

- * 血圧測定用カフ及び心電極計は必ずモデルに付属のものをご使用ください。
- * 本モデルではLANは使用できません。

■ターミナルボックス 前面

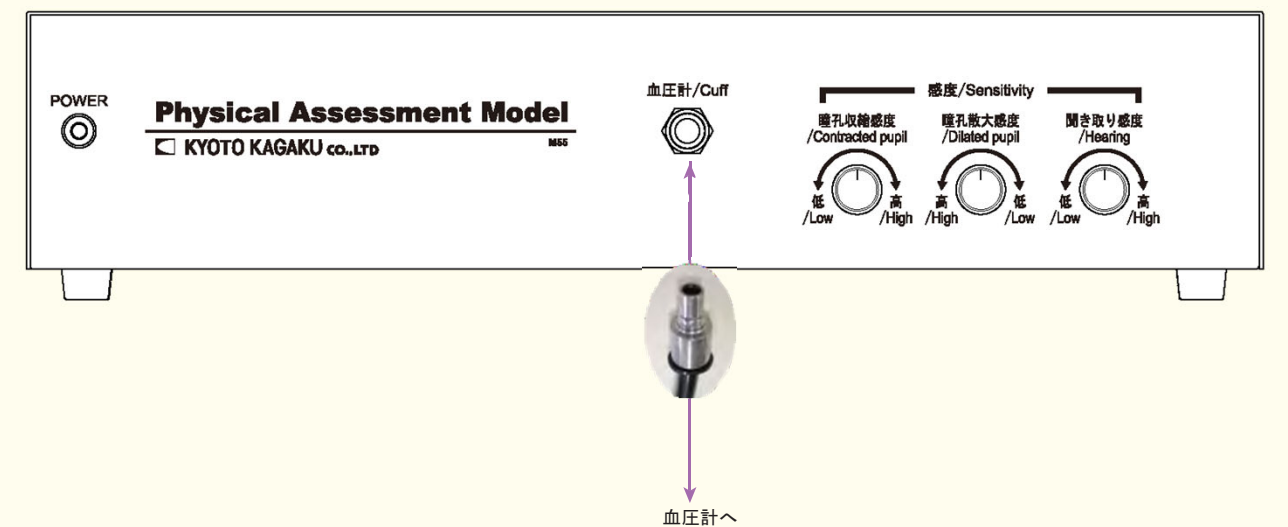

ターミナルボックス前面の端子です。