


このたびは、当社のバイタルサインベビーⅡをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- 制御BOXとベビー人形を接続する制御ケーブル及びエアチューブコネクタ部の仕様が、変更されました。
- この取扱説明書にしたがって正しく接続の上、ご使用ください。

1 各部名称

●制御BOX

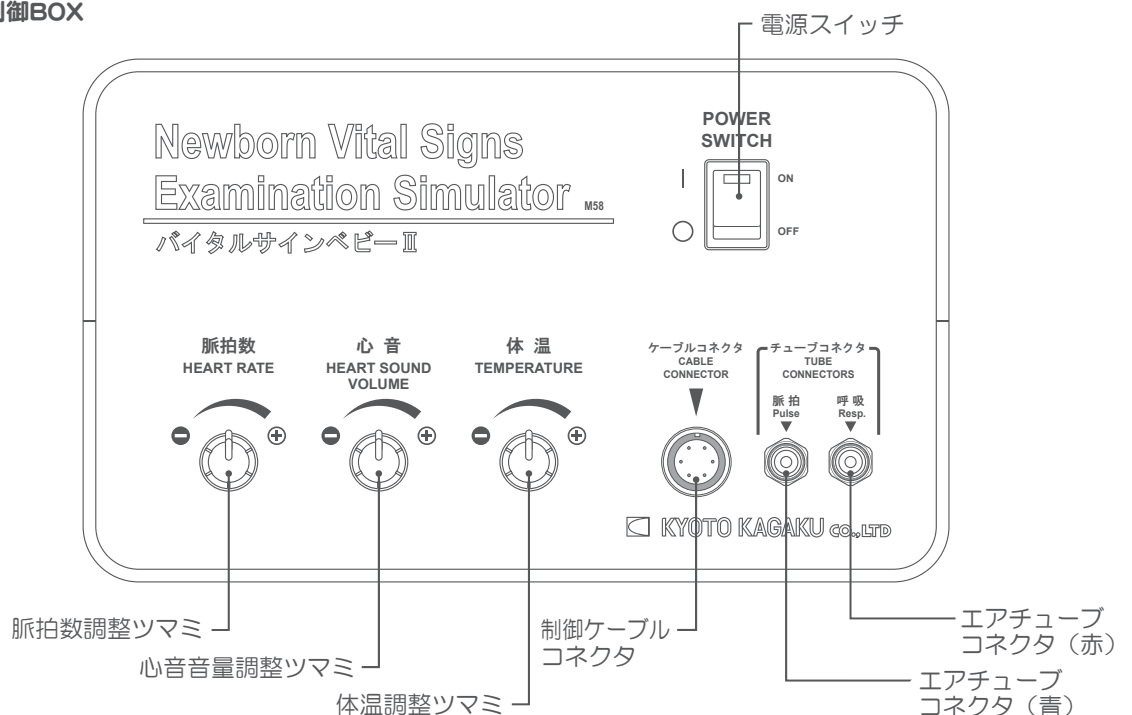

エアチューブ (赤)

制御ケーブル


エアチューブ (青)

●ベビー人形

エアチューブコネクタ (赤)

エアチューブコネクタ (青)

制御ケーブルコネクタ

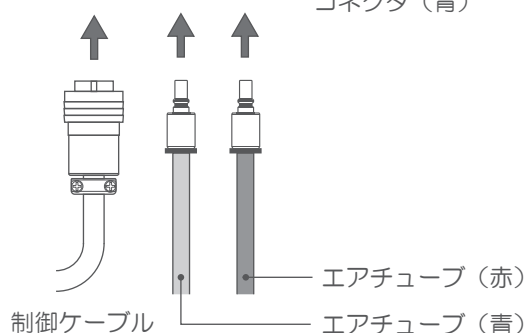


2 接続

●制御ケーブルの接続



- ①制御ケーブル先端の切り欠きとピンの位置を、制御BOX側のコネクタと合わせて、奥までしっかり差し込みます。
- ②ベビー人形への接続も、同様に行ってください。

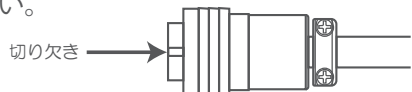

注意

制御ケーブルはコネクタの切り欠き位置を合わせて、カチッと音がするまでしっかり差し込んで無理な接続や不十分な接続は、コネクタや制御BOX、人形が破損する原因となります。
・エアチューブは、コネクタとチューブの色を合わせて、カチッと音がするまで確実に差し込んでください。

●エアチューブの接続



- ①エアチューブは、チューブの色と制御BOX側のコネクタの色を合わせて、奥までしっかり差し込みます。
- ②ベビー人形への接続も、同様に行ってください。

3 取り外し

●制御ケーブルの取り外し



- ①制御ケーブル先端のリングを手前に引くとロックが外れます。
- ②ベビー人形も同様に行ってください。

●エアチューブの取り外し



- ①制御BOX側のコネクタを押し込むと、ロックが外れます。
- ②ベビー人形も同様に行ってください。



株式会社 **京都科学**

URL ● <http://www.kyotokagaku.com>
e-mail ● rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

■本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL :075-605-2510 (直通) FAX :075-605-2519

■東京支店

〒112-0002 東京都文京区小石川5丁目20-4
TEL :03-3817-8071 (直通) FAX :03-3817-8075