

妊婦体験用モデル

● はじめに

この度は、「妊婦体験用モデル」をご購入いただきありがとうございます。

本製品は、妊娠中期から後期の妊婦さんの体型や重さ、毎日の生活動作を体感的に理解できる教材として製作しました。製品はどれもひとつひとつ心をこめた手作り品です。本モデルはできるだけやさしくお取扱くださいますようお願い申し上げます。

○ 実習項目

- 妊産婦になったときの体型を鏡で見してみる。
- 毎日の生活動作を体験する。
(歩く・立つ・椅子に座る・起き上がる・床に座る・大きな荷物を運ぶ・靴紐を結ぶ・靴下をはく・足の爪を切る・床に落ちたものを拾う等)
- 体に感ずる重さを体験する。(妊娠中期から後期まで)

セット内容



- 妊娠中の腹部モデル・・・約 8.6 kg
腹部保護カバー・胸部ベルト・腹部ベルト
おもりは調節可能 (1kg×3 個)
- 妊婦エプロン・・・約 0.3 kg
- 腹部モデル置き台・・・約 0.8 kg
- ダンボールケース入り (サイズ 46×41×H25cm)

- | | | |
|-------|----|-------------------------|
| ● 仕 様 | 材質 | 妊娠中の腹部モデル・・・軟質特殊樹脂製 |
| | | 腹部保護カバー・・・素材 綿 100% |
| | | 妊婦エプロン・・・素材 ポリエステル 100% |
| | | 腹部モデル置き台・・・軟質特殊樹脂製 |

装着範囲	身長	約 150 ～ 185cm まで	交換部品	腹部ベルト	(12021-020)
	胸囲	約 70 ～ 110cm まで		胸部ベルト	(12021-030)
	腹囲	約 60 ～ 95cm まで		おもり 1kg	(12021-040)
				妊婦エプロン	(32518-020)

商品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観などが予告なく変更されることがございますので予めご了承ください。



取扱上の注意

- 腹部ベルトは傷みが生じたら交換してください。プラスドライバー1本で交換できます。
- 保管するときは、必ず付属の置き台にのせて保管してください。
- 教育目的以外には使用しないでください。
- おもりを内蔵していますので、取扱は丁寧に注意深く行ってください。
- 装着したとき身体に不具合を感じたときはすぐに中止し、先生の指示に従ってください。特に、腰痛のある人などはご注意ください。

装着手順

※装着するときは2人で行ってください。

1. 装着者は腹部モデルをおへその中心あたりに位置を決め、両手で支えます。
2. もう1人が後ろから頸紐を軽く結び、胸部ベルトを固定します。
3. 腹部ベルトは後ろで十分に締め、交差させて装着者に手渡します。
4. 手渡された腹部ベルトをおへその下あたりでしっかり固定します。
5. 付属の妊婦用エプロンをつけ後ろで結びます。

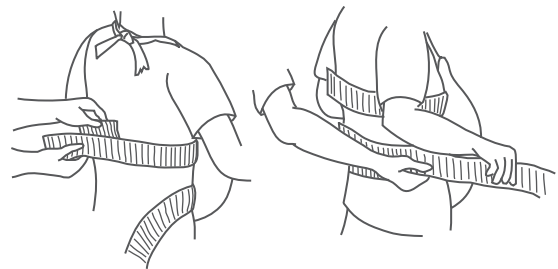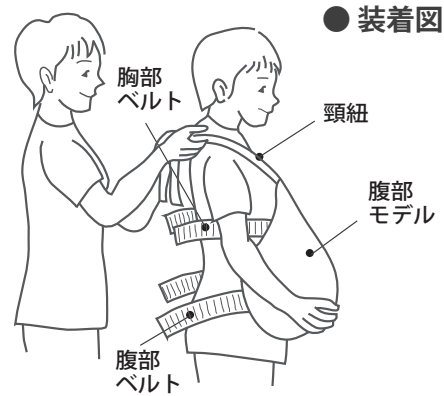

腹部モデル装着時



妊婦用エプロン装着時



.....
腹部モデルは重たいので、紐やベルトを持って持ち上げないでください。

交換方法

● おもりの交換

1. 腹部モデルを付属の腹部置き台にのせます。
2. 腹部モデルの下ファスナーをあけると、3個のおもり（各1kg）の取り外しができます。
3. おもりが入っているので、絶対にモデル本体を仰向けにしないでください。また丁寧かつ注意深く取り扱ってください。

● ベルトの交換

1. 腹部モデルを付属の腹部置き台にのせます。
2. 腹部保護カバーのファスナーをあけてカバーをはずし、プラスドライバーでベルトを止めているビスをはずします。
3. 新しいベルトをビスでしっかりと固定して腹部カバーを装着してください。



株式会社 京都科学

URL ● <http://www.kyotokagaku.co.jp>
e-mail ● rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

■ 本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL：075-605-2510（直通）
FAX：075-605-2519

■ 東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL：03-3817-8071（直通）
FAX：03-3817-8075