

M66

Medical Foot care model メディカルフットケアモデル フツティ

監修・協力：京都大学名誉教授

関西看護医療大学 学部長 教授 江川 隆子



Caution | Don't mark on the model and other components with pen or leave printed materials contacted on their surface.
Ink marks on the models will be irremovable.



注意 | モデル表面に印刷物などが直接触れないようにしてください。
樹脂表面にインクが吸収されて消えなくなります。

Instruction Manual

取扱説明書

Contents / 目次



Movie Site



English Site

<https://youtu.be/DxnGRqoujls>

動画サイト



日本語サイト

<https://youtu.be/tc5zx3-7dMs>

M66

メディカルフットケアモデル

フッティー

取扱説明書

目 次

- ご使用の前に
ご使用前の確認とご注意…………… P.6
- 準備・実習
フットケアの準備・実習…………… P.7

●はじめに


このたびは、当社の「メディカルフットケアモデル“フッティー”」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品は、大切な足を生涯守る「フットケア」の実践に向けたトレーニングモデルです。
看護教育用実習教材としてご使用ください。

●特徴

巻き爪、肥厚爪（爪白癬）、胼胝、鶏眼などの病変を付け替えることで、フットケアトレーニングが繰り返し行えます。
また、足部の皮膚や関節の正確な再現により、足のアセスメント（観察方法と手順）などフットケアに関する様々な実習が可能です。

セット内容と各部の名称

ご使用前に、構成品が全て揃っているかご確認ください。

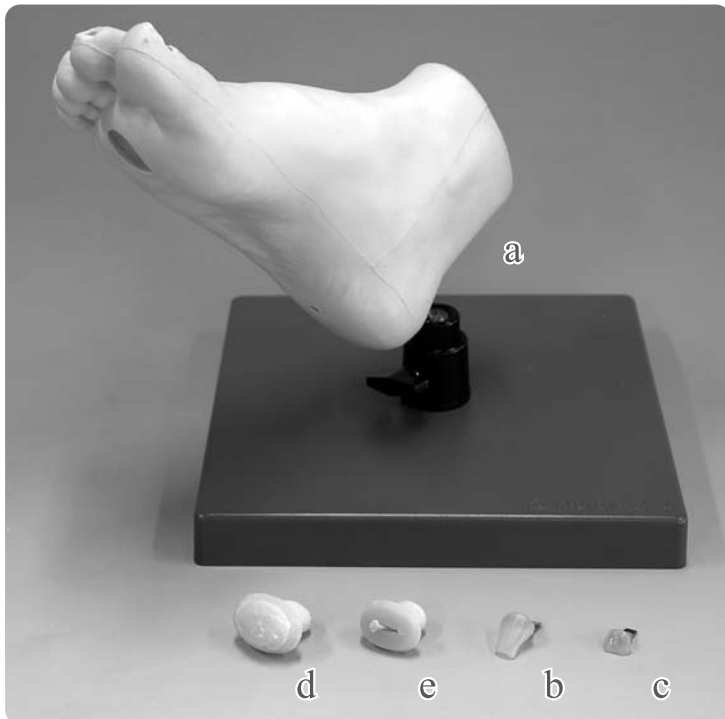

● 構成

- a. 足部本体（専用台共）…………… 1台
- b. 爪（肥厚・巻き爪）…………… 20個
- c. 爪（肥厚・爪白癬）…………… 20個
- d. 胼胝（たこ）…………… 10個
- e. 鶏眼（うおのめ）…………… 10個


※製品は専用台への足部の取り付け位置が写真とは異なります。

消耗品 一覧

コード番号	部品名
11273-030	爪（肥厚・巻き爪）20個
11273-040	爪（肥厚・爪白癬）20個
11273-050	胼胝（たこ）10個
11273-060	鶏眼（うおのめ）10個




爪（肥厚・巻き爪）

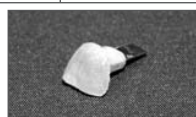

爪（肥厚・爪白癬）



胼胝（たこ）

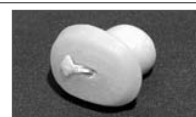

鶏眼（うおのめ）

⚠ 注意

● 取り扱いにご注意ください。

特殊軟質樹脂を使用していますので、落下や強い衝撃を与えると破損の原因となります。

● 印刷物をモデル表面におかないでください。

モデル表面に印刷物などが直接触れないようにしてください。
樹脂にインクが吸収されて消えなくなります。

● 高温多湿を避けて保管してください。

使用後は、高温多湿や直射日光のあたる場所での保管は避けてください。
変形や故障の原因となります。

● 表面が変色する場合があります。

長期間使用されない場合や経年変化で変色することがありますが、ご使用には差し支えありません。

● ボールペンやサインペンで書き込まないでください。

サインペン、ボールペンなどでモデルに書き込むと、インクが吸収されて消えなくなります。

● 中性洗剤又はアルコールで拭き取ってください。

モデルの汚れは水又は中性洗剤で拭いてください。
水又は中性洗剤で拭いても汚れが落ちない場合は、アルコールで拭いてください。シンナーなどの有機溶剤は、絶対に使用しないでください。

1 準備



胼胝(たこ)



鶏眼(うおのめ)





爪

①実習部品の取り付け

実習に使用する胼胝、鶏眼、爪をそれぞれ足部本体にセットします。

胼胝は取り付け部の小さな穴を指側、鶏眼は金属部を下側にして、足本体の取り付け穴にセットします。爪は金属板部をスリットに差し込みセットします。

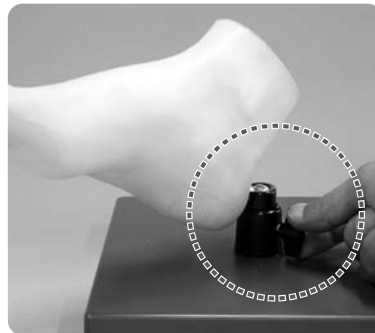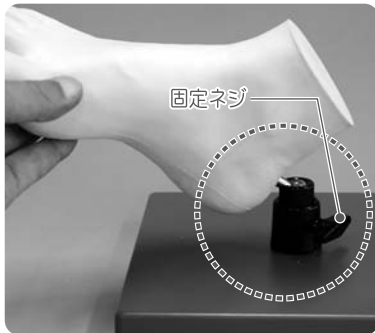

②足モデルの角度調節

ユニバーサルジョイントの部分は、自由に動きます。固定ネジをゆるめて、実習しやすい角度にセットし、固定ネジをしっかり締めてください。

2 実習

●実習項目

- ・爪のケア
- ・胼胝(たこ)のケア
- ・鶏眼(うおのめ)のケア
- ・足部の血管位置の確認
(足背動脈、後頸骨動脈の触診場所)
- ・触圧覚検査でモノフィラメントをあてる位置の確認
- ・振動覚検査で音叉をあてる位置の確認
- ・足部の傷や腫れの有無、色調の変化、足底部のアーチの変形の有無などを観察
- ・外用剤の塗布方法、マッサージ法
- ・踵部の乾燥や角質化に対するケア方法の確認



爪のケア



胼胝(たこ)のケア



鶏眼(うおのめ)のケア



足部アーチの変形の観察



Caution

Don't mark on the model and other components with pen or leave printed materials contacted on their surface.
Ink marks on the models will be irremovable.



注意

モデル表面に印刷物などが直接触れないようにしてください。
樹脂表面にインクが吸収されて消えなくなります。

- For inquiries and service, please contact your distributor or KYOTO KAGAKU CO., LTD.
- 本製品についてのお問い合わせや不具合等ございましたら、お手数ですがお買い上げの販売店、もしくは下記（株）京都科学まで御連絡ください。

KYOTO KAGAKU co.,LTD

<http://www.kyotokagaku.com> e-mail: rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

■ Main Office and Factory

15 KitaneKoya-cho Fushimi-ku Kyoto 612-8388, Japan
Telephone : 81-75-605-2510
Facsimile : 81-75-605-2519

■ 本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL : 075-605-2510 (直通)
FAX : 075-605-2519

■ KyotoKagaku America Inc.

USA, Canada, and South America
3109 Lomita Boulevard, Torrance, CA 90505, USA
Telephone : 1-310-325-8860
Facsimile : 1-310-325-8867

■ 東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL : 03-3817-8071 (直通)
FAX : 03-3817-8075

The contents of the instruction manual are subject to change without prior notice.
No part of this instruction manual may be reproduced or transmitted in any form without permission from the manufacturer.
Please contact manufacturer for extra copies of this manual which may contain important updates and revisions.
Please contact manufacturer with any discrepancies, typos, or mistakes in this manual or product feedback. Your cooperation is greatly appreciated.

本書の内容は、予告なしに変更することがあります。本書の内容の一部もしくは全部を当社に無断で複写・転載することを禁じます。
本書の内容に、万一不審な点や誤りなど、お気づきの点がございましたら、当社もしくは販売店にご連絡ください。