

11219-020 縫合手技トレーニング A腹部セット

取扱説明書

このたびは本製品をご購入いただきありがとうございます。本製品は縫合手技の上達を目的としたシミュレーションモデルです。医学教育用の補助器具としてご使用ください。

《セット内容》

支持台、模擬皮膚 各 1
スぺア腹部 1枚

【ご使用にあたって】

- 皮膚縫合モデルの模擬皮膚部分の切り込みで縫合練習をしてください。このモデルは腹部を想定して作られています。必要に応じてお手持ちのメス等で模擬皮膚を切開し使用していただくこともできます。
- 模擬皮膚は消耗品です。交換部品として別途ご用命ください。
- 模擬皮膚表面に印刷物を密着させたり、サインペン等で書き込まないでください。消えなくなります。
- 模擬皮膚を強く引っ張る等、無理な負荷をかけないでください。破損の原因になります。実際の人体の皮膚同様やさしく扱ってください。
- 模擬皮膚の発泡体部分が黄色く変色することがありますが不良品ではありません。
- 使用後は高温多湿、直射日光の場所を避けて保管してください。

本製品についてのお問い合わせや、不具合等ございましたら、お手数ですがご購入の販売店または京都科学までご連絡ください。

株式会社 京都科学

■本社・工場 〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町 15 番地
TEL : 075-605-2510 FAX : 075-605-2519

■東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目 26 番 6 号
NREG 本郷三丁目ビル 2 階
TEL : 03-3817-8071 FAX : 03-3817-8075

【Bset用】血管縫合モデル付属品

管固定セット(管ジョイント+ライン+ストップ-)1セット
結束バンド 小(模擬血管固定用5本)-予備1本
支持台(青クリップ 付き)

取り付け方法

1. 管ジョイントに模擬血管を結束バンドにて固定してください。
(このとき必要以上に結束バンドを締め付けますと模擬血管が破損します。)
2. ラインを支持台側面の穴に表側より通し、台裏側でストップ-にて長さを調節しながら留めて下さい。(すでにラインはセット済みです。)

【Bset用】血管縫合モデル付属品

管固定セット(管ジョイント+ライン+ストップ-)1セット
結束バンド 小(模擬血管固定用5本)-予備1本
支持台(青クリップ 付き)

取り付け方法

1. 管ジョイントに模擬血管を結束バンドにて固定してください。
(このとき必要以上に結束バンドを締め付けますと模擬血管が破損します。)
2. ラインを支持台側面の穴に表側より通し、台裏側でストップ-にて長さを調節しながら留めて下さい。(すでにラインはセット済みです。)

【Bset用】血管縫合モデル付属品

管固定セット(管ジョイント+ライン+ストップ-)1セット
結束バンド 小(模擬血管固定用5本)-予備1本
支持台(青クリップ 付き)

取り付け方法

1. 管ジョイントに模擬血管を結束バンドにて固定してください。
(このとき必要以上に結束バンドを締め付けますと模擬血管が破損します。)
2. ラインを支持台側面の穴に表側より通し、台裏側でストップ-にて長さを調節しながら留めて下さい。(すでにラインはセット済みです。)

【Cset用】腸管縫合モデル付属品

管固定セット(管ジョイント+ライン+ストップ-)1セット
結束バンド 大(模擬腸管固定用5本)-予備1本
支持台(青クリップ 付き)

取り付け方法

1. 管ジョイントに模擬腸管を結束バンドにて固定してください。
(このとき必要以上に結束バンドを締め付けますと模擬腸管が破損します。)
2. ラインを支持台側面の穴に表側より通し、台裏側でストップ-にて長さを調節しながら留めて下さい。(すでにラインはセット済みです。)

【Cset用】腸管縫合モデル付属品

管固定セット(管ジョイント+ライン+ストップ-)1セット
結束バンド 大(模擬腸管固定用5本)-予備1本
支持台(青クリップ 付き)

取り付け方法

1. 管ジョイントに模擬腸管を結束バンドにて固定してください。
(このとき必要以上に結束バンドを締め付けますと模擬腸管が破損します。)
2. ラインを支持台側面の穴に表側より通し、台裏側でストップ-にて長さを調節しながら留めて下さい。(すでにラインはセット済みです。)

【Cset用】腸管縫合モデル付属品

管固定セット(管ジョイント+ライン+ストップ-)1セット
結束バンド 大(模擬腸管固定用5本)-予備1本
支持台(青クリップ 付き)

取り付け方法

1. 管ジョイントに模擬腸管を結束バンドにて固定してください。
(このとき必要以上に結束バンドを締め付けますと模擬腸管が破損します。)
2. ラインを支持台側面の穴に表側より通し、台裏側でストップ-にて長さを調節しながら留めて下さい。(すでにラインはセット済みです。)

縫合手技トレーニング 腕セット

Suture Practice Training Arm

取扱説明書



- ・本製品についてのお問い合わせや不具合等ございましたら、お手数ですがご購入の販売店、または下記までご連絡下さい。



株式会社

京都科学

本社工場 〒612-8388 京都市伏見区北葎小屋町15番地
TEL : 075-605-2510 FAX : 075-605-2519

東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階

TEL : 03-3817-8071 FAX : 03-3817-8075

ホームページURL : <http://www.kyotokagaku.com>

E メールアドレス : rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

2017.12

はじめに

このたびは本製品をご購入いただきありがとうございます。
本製品は縫合手技の上達を目的としたシミュレーションモデルです。
医学教育用の補助器具としてご使用ください。

必ずお読みください

本製品は、医学実習を目的として製作されたモデルです。
本来の使用目的以外にはご使用にならないでください。また、説明書に記載された以外の方法でのご使用による万が一の破損や事故の場合、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

ご使用にあたって を必ずお読みになってからご使用ください。


必要以上の力を加えたり、落下させますと破損等の原因となりますのでご注意ください。

ご使用の際に不具合等がございましたら、お手数ですがお問い合わせの販売店もしくは株式会社京都科学までご連絡ください。
(連絡先はこの取扱説明書の巻末に記載されています)

セット内容 (各1個)

- a. モデル本体
(模擬皮膚、支持台、ベルト)
- b. ヘガール持針器
- c. 外科用有鉤ピンセット
- d. 眼科剪刀
- e. 外科用強弯針バネ
: No. 1・2・3・5・7 各2本
- f. 絹製縫合糸
: No. 05 (40cm×6)

※収納ケース

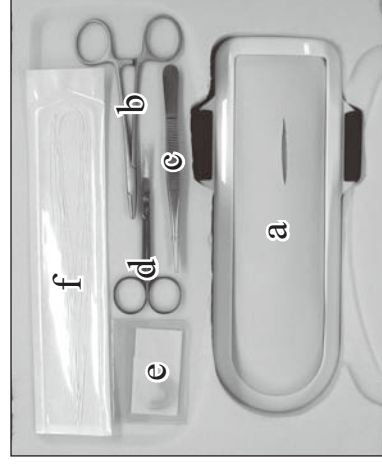

ご使用にあたって

- ・モデル本体の模擬皮膚部分の切り込みで縫合練習をしてください、また必要に応じて皮膚にお手持ちのメス等で切開して使用していただくこともできます。
- ・模擬皮膚は消耗品です。交換部品として別途ご用命下さい。
- ・皮膚表面に印刷物を密着させたり、サインペンで書き込むことはしないでください、消えなくなります。
- ・内部発泡体が黄色く変色することがありますが、不良品ではありません。
- ・不具合点などございましたら、お手数ですが販売代理店、または株式会社京都科学までお問い合わせください。

模擬皮膚交換方法

1. 要らなくなった模擬皮膚をつまみ、引き出して取り除きます。
2. 新しい模擬皮膚の縁を支持台枠の内側に押し込んでください。