

<セイケツくん>

取扱説明書

このたびは本製品をご購入いただきありがとうございます。本製品は口腔清潔の上達を目的としたシミュレーションモデルです。口腔ケア実習用の補助器具としてご使用ください。

製品構成

・軟質口腔・透明マスク・義歯・口腔汚物・スタンド・ミラー・ブラシ・収納ケース

～ご使用にあたって～

- ・実習の際に色水(イソジン等)を使用しますと口腔に色が移りとれなくなりますので、なるべく水をお使いください。またサインペン等の書き込みも消せませんのでご注意ください。
- ・ご使用後は十分に水分を拭き取ってください、カビ等の原因になります。
- ・軟質口腔は消耗品ですので交換部品として別途ご用意下さい。
- ・不具合点などございましたらお手数ですが販売代理店または株式会社京都科学までお問い合わせください。

～ご使用方法～

- ・ご使用時はマスク裏の黒いノブ反時計回転で一旦はずしスタンドに取り付けてください。
→黒いゴムシートはスタンドと透明マスクの間に取り付けてください。
- ・マスクの向きの調節は黒いノブを緩め(反時計回転)必要とする向きで再びノブを締め(時計回転)てください、縦方向は7段階にカチカチと回してご使用できます。



*ノブの締めすぎに注意



本社・工場
〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル 2階
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075