



LANポート


ルータセット (ACアダプター付き)

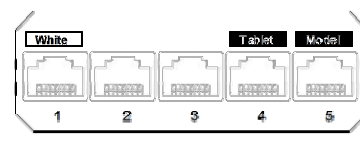


①

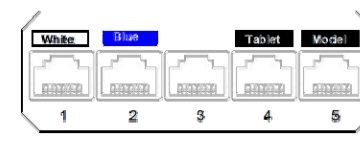


②

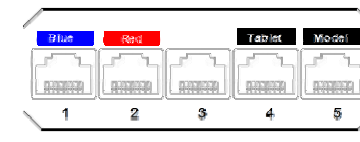

③

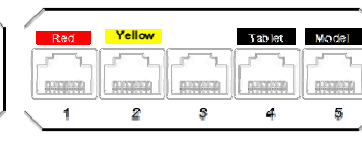

④

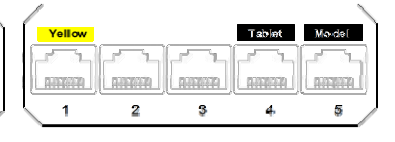

⑤

ルータは合計5台あります。各ルータの背面は上図の様にLANポートにシールが貼られています。


準備



1.ルータセットのACアダプターをラングⅡ本体の電源プラグに挿します。




2.ラング側面の穴からACアダプターのケーブルを出しルータと接続します。

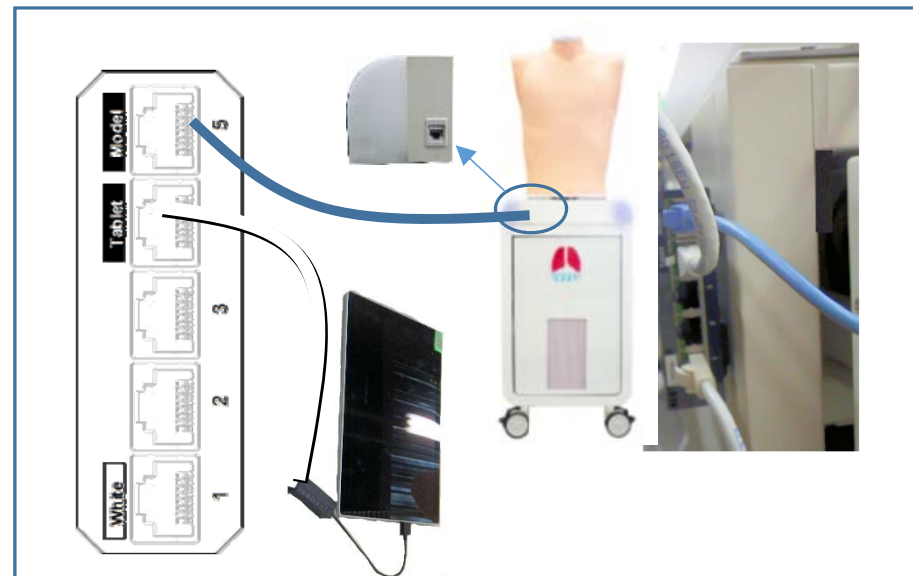


3.ルーターの[モデル]とシールがあるポートとラングⅡ本体を接続します。

4.[Tablet]とシールがあるポートとタブレットを接続します。

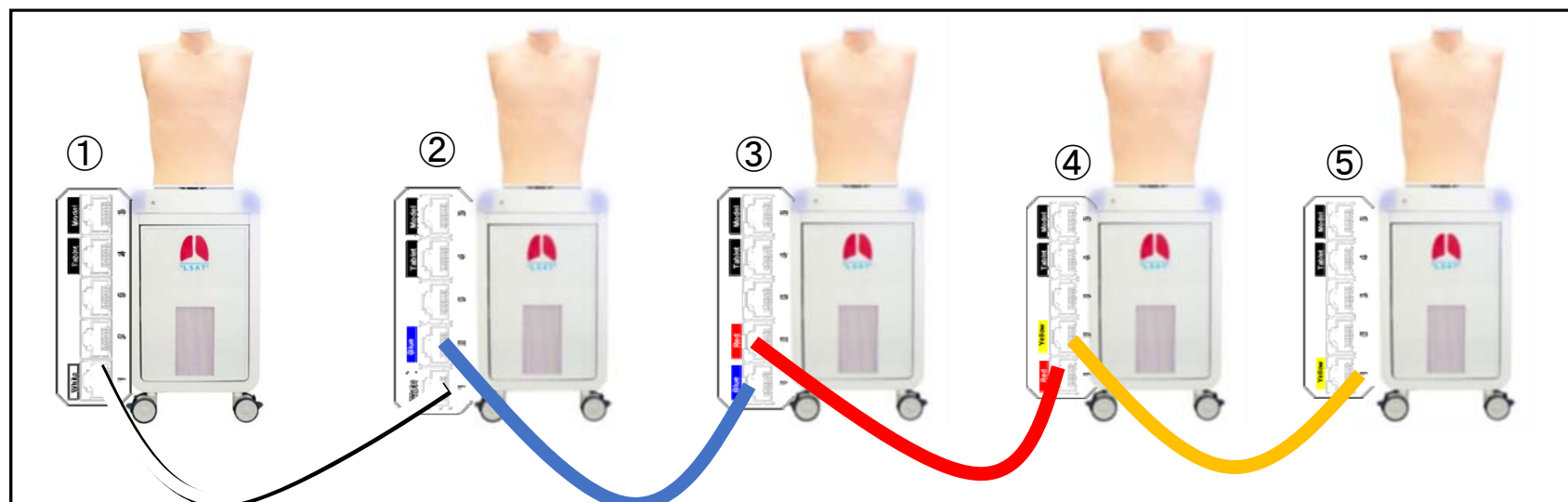

5.各モデルを同じ色同士のポートをLANケーブルで接続します。

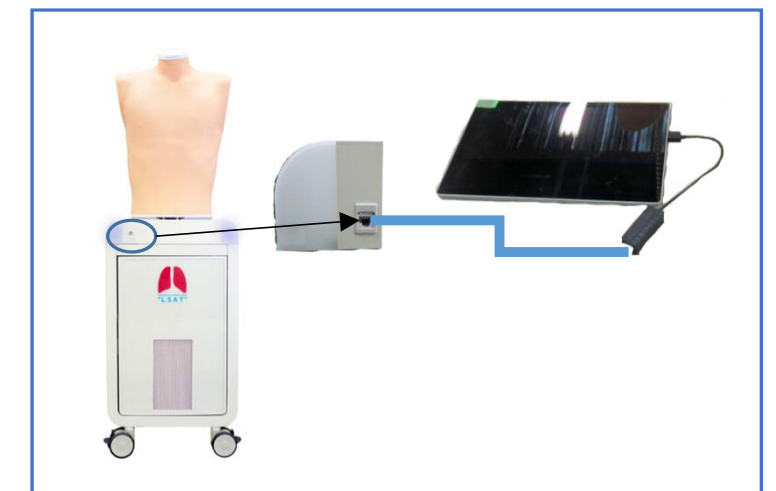

単体でお使いになる場合は、ラングⅡ本体のLANポートとタブレットを接続してください。