

取扱説明書 必ずお読み下さい！

PICC 超音波パッド お取り扱い上のご注意

このたびは、当社の PICC 超音波パッドをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は、医学実習を目的として製作されたモデルです。本来の使用目的以外にはご使用にならないでください。

⚠ 注意

- 本製品は、人体に近い柔らかさを再現するために水溶性の材料を使用しており、時間の経過とともに変形する場合がありますが、実習には差し支えありません。
- 誤って開封した場合は、一時的な保管として密閉できる袋などに入れてください。
(保管状態によっては、変形して使用できなくなる場合があります)
- 高温多湿や直射日光を避けて保管してください。
- 穿刺部位を指で広げたり、強く押さないでください。
- 使用後は一般ごみとして廃棄してください。



①パッド裏側のフィルムをはがします



② 容器のサイドを軽く押し、容器内に空気を入れてパッドを取り出します



■ご注意■
パッドのゲル部分を持って取り出さないでください



※一時的な保管方法

原則1セッション(一回の実習)での使い切りをおすすめしますが、誤って内部の透明フィルムをはがしてしまった場合は、パッドを本体容器に入れ、フィルムを当てた上で、密閉容器や袋などに保管してください。(但し一時的な保管となります)



株式会社 京都科学

■本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL: 075-605-2510 (直通) FAX: 075-605-2519

URL ● <http://www.kyotokagaku.com>

e-mail ● rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

■東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目2番6号
NREG本郷三丁目ビル2階

TEL: 03-3817-8071 (直通) FAX: 03-3817-8075 2018.2.8

Instruction Manual

PICC Puncture Pad WARNING

Opening the puncture pad



1) Turn the film of the pad.



2) Flip the puncture pad upside down and push down on the corners to empty onto a tray.



■WARNING■
Do not attempt to pull the pad directly out of the plastic container.

⚠ WARNING

- Do not open the package until you are using the product.
- We recommended using these pads within one session. The aqueous material in the product will cause the pad to shrink after it is removed from its packaging.
- Keep the product away from high temperature, high humidity and direct sunlight.



- After it has been used, the puncture pad may be stored again by placing it back into its plastic case with the transparent seal and keeping it in a sealed bag. This method will preserve the product size and quality for a short period of time.

■ Main Office and Factories (World Wide)

 **KYOTO KAGAKU co.,LTD**

WEB•www.kyotogagaku.com
E-MAIL•rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

15 Kitanechoya-cho Fushimi-ku Kyoto 612-8388, Japan
TEL: +81-75-605-2510
FAX: +81-75-605-2519

■ Americas

 **KKAmerica**
Kyoto Kagaku America Inc.

WEB•www.kkamerica-inc.com
E-MAIL•info@kkamerica-inc.com

3109 Lomita Boulevard, Torrance, CA 90505-5108, USA
TEL: +1-310-325-8860
(Toll-free in North America: 877-648-8195)
FAX: +1-310-325-8867