



Precaución No marque al modelo con el bolígrafo o no deje los materiales impresos tener en contacto con la superficie del modelo. Los marcados de tinta en el modelo no se pueden borrar.



Precaución No marque al modelo con el bolígrafo o no deje los materiales impresos tener en contacto con la superficie del modelo. Los marcados de tinta en el modelo no se pueden borrar.

MW22

Simulador de Atención de Paciente "Cereza"

Para las inquietudes y servicio, por favor contacte con su distribuidor o KYOTO KAGAKU CO., LTD.

Consumibles

Código	Nombre
11401-010	Almohadillas de inyección IV
11401-020	Almohadillas de IM glútea
11401-030	Unidad genital femenina
11401-040	Unidad genital masculina
11388-200	Almohadillas de inyección para la vena media del antebrazo
11401-050	Almohadillas de IM del hombro (un par)
11401-060	Almohadillas de IM del muslo (un par)
11401-070	Almohadilla de cuidados de herida



6 almohadillas de inyección IV



4 almohadillas de IM glútea



1 unidad genital femenina



1 unidad genital masculina



2 almohadillas de inyección para la vena media del antebrazo



2 pares de 2 almohadillas de IM del hombro



2 pares de 2 almohadillas de IM del muslo



1 almohadilla de cuidados de herida

Manual de instrucción

Contenidos

- **Introducción**
Nota del Fabricante/Qué hacer y Qué no hacer...P.1
- **Antes de empezar**
Contenidos del juego...P.2
- **Preparación**
Montaje de las piernas...P.3
- **Entrenamiento**
 - Manejo del modelo...P.4
 - Cuidados orales y dentales...P.4
 - Inhalación del oxígeno...P.4
 - Catéter intranasal e intraoral...P.4
 - Cuidados de traqueotomía...P.4
 - Cuidados de NPT y GEP...P.5
 - Cuidados de úlceras de presión...P.5
 - Bombeo del estómago...P.6
 - Cuidados del estoma...P.7
 - Cateterización urinaria, enema, inserción de los supositorios, cuidados perineales...P.7
 - Inyección subcutánea...P.8
 - Inyección glútea...P.8
 - Cuidados de herida...P.8
 - Inyección IV y cuidados...P.9
 - Cuidados del PICC...P.9
 - Inyección subcutánea e IM...P.10



KYOTO KAGAKU co.,LTD

URL • <http://www.kyotokagaku.com> e-mail • rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

Oficina matriz y Fábrica

15 Kitanechoya-cho Fushimi-ku Kyoto 612-8388, Japan
Telephone : 81-75-605-2510
Facsimile : 81-75-605-2519

Kyotokagaku America Inc. : Todas las Américas

3109 Lomita Boulevard, Torrance, CA 90505-5108, USA
Telephone : 1-310-325-8860
Facsimile : 1-310-325-8867

Los contenidos del manual de instrucción están sujetos al cambio sin anticipación.

Ninguna parte de este manual de instrucción podrá ser reproducida o transmitida en ninguna manera sin el permiso del fabricante. Por favor contacte con el fabricante para copias extras de este manual el cuál podrá contener importantes actualizaciones y revisiones. Por favor contacte con el fabricante sobre cualquier discrepancia en este manual o comentarios sobre el producto. Su cooperación será cordialmente agradecida.

2018.02

KYOTO KAGAKU co.,LTD

Nota del Fabricante

"Cereza" es un maniquí de atención de paciente básico para la enfermería introductoria. El maniquí puede sentarse sin soporte. Los materiales blandos como vivos proveen un entrenamiento realístico. Este maniquí de enfermería del cuerpo entero básico ofrece los entrenamientos de atención al paciente para los profesionales de cuidados de salud día a día.

● Características

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Poder sentarse sin soporte • Extremidades sin costuras incluyendo los dedos de manos y de pies • Rutas de NPT e IV para simular los pacientes con líneas de catéter • Manejo del paciente con las articulaciones reales • Las úlceras de presión varían en su profundidad depende de la ubicación. | <ul style="list-style-type: none"> • Cánula del oxígeno/nasal • Application of apoyacabezas • Habilidad de vendaje • Inyección subcutánea • Cuidados de la dehiscencia por herida |
|--|--|

● Items de entrenamiento

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Cuidados orales y dentales • Bombeo del estómago • Colocación del tubo nasogástrico • Colocación de cánula del oxígeno/nasal • Cuidados y manejo de traqueotomía • Cuidados de NPT y PICC • Inyección intramuscular | <ul style="list-style-type: none"> • Posicionamiento del cuerpo • Manejo del paciente • Ejercicio pasivo • Cambio de ropas • Cuidados de GEP • Cuidados de úlceras por presión • Inserción IV y cuidados | <ul style="list-style-type: none"> • Cuidados del estómago • Inyección subcutánea • Cateterización urinaria • Enema • Inserción de supositorios • Cuidados perineales • Cuidados de herida |
|---|---|---|

⚠ Qué hacer y Qué no hacer

Qué hacer

Maneje el maniquí y sus componentes con cuidado. Almacenarlo en un lugar oscuro y fresco servirá para prevenir la decoloración de la piel. La piel del maniquí podrá ser limpiada con una tela húmeda, si necesita, usando el agua ligeramente enjabonada o detergente diluido.

Qué no hacer

No deje la tinta de bolígrafos, periódicos, este manual u otras fuentes tener en contacto con el maniquí, ya que no se puede borrar de la piel del maniquí. Nunca use desolventes orgánicos como el diluyente de pintura para limpiar la piel, ya que dañarán el simulador.

Cuidados de PICC



① Se puede colocar el catéter de PICC en el brazo superior derecho para el entrenamiento de cuidados de PICC.

Precaución

- No se puede inyectar a la abertura de PICC.
- La abertura de PICC tiene solamente 2cm de profundidad. Corte el catéter para ajustar.

Inyección subcutánea e IM

① Coloque la almohadilla de inyección al brazo superior. ② Coloque la almohadilla de inyección IM al muslo.



Nota Se puede inyectar el líquido a las almohadilla de inyección subcutánea e IM.

Después del entrenamiento

① Empuje la placa de fijación hacia dentro. Jale sacando el borde de la piel entre la fijación y placa trasera transparente.



② Quita la piel con cuidado. Luego, quite la esponja y placa trasera transparente.



③ Escorra la esponja. Después de todas las piezas estén secas completamente, ensámblelos de nuevo con cuidado.




Precaución No jale ni torza la esponja. Una fuerza excesiva podrá causar rotura.

Inyección IV

① Jale la almohadilla con sus dedos desde el corte y quítela.



※El espaciador está en el brazo derecho. El entrenamiento de inyección IV y cuidados está disponible en ambos brazos.

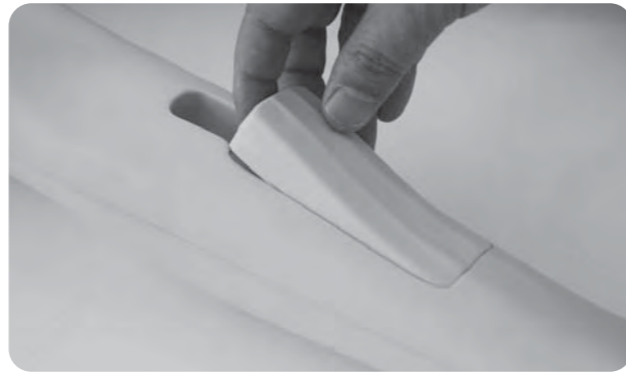

Preparación de la inyección IV

① Llene la botella con agua. Conecte el tubo de la almohadilla de inyección a la botella.



② Conecte el otro tubo de la almohadilla de inyección a la jeringa. Jale despacio la jeringa para llenar la almohadilla con agua.



③ Completada.





Precaución

Empuje lentamente la jeringa, o la vena en la almohadilla de inyección podrá dañarse. Si no se puede empujar la jeringa suavemente, confirme la conexión entre el tubo y jeringa.

Contenidos del juego

Antes de su primer uso, asegúrese de que tiene todos los componentes listados abajo.

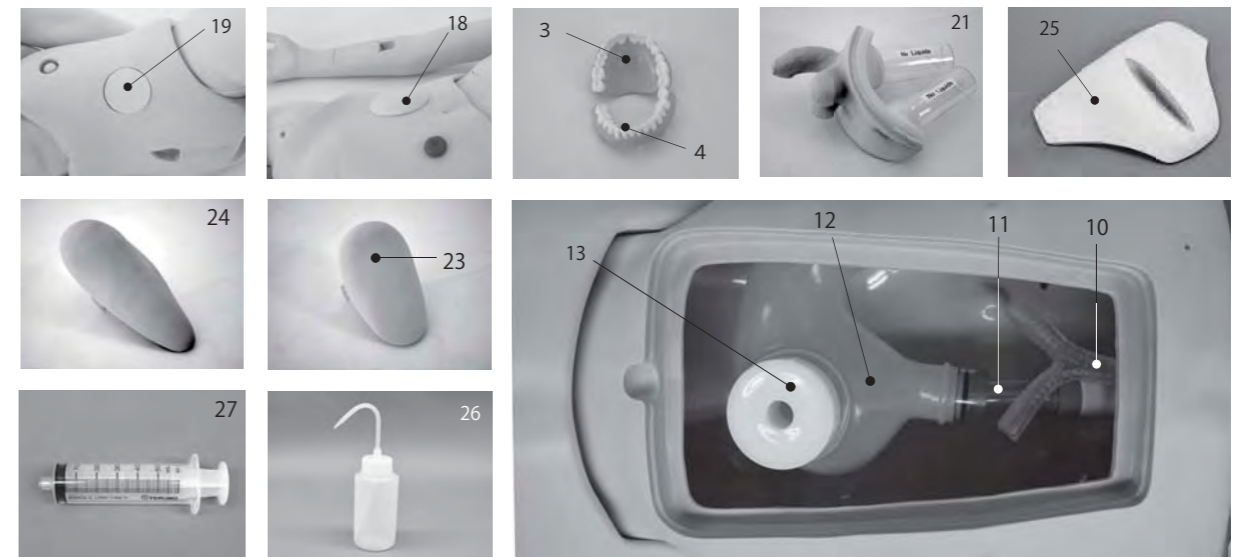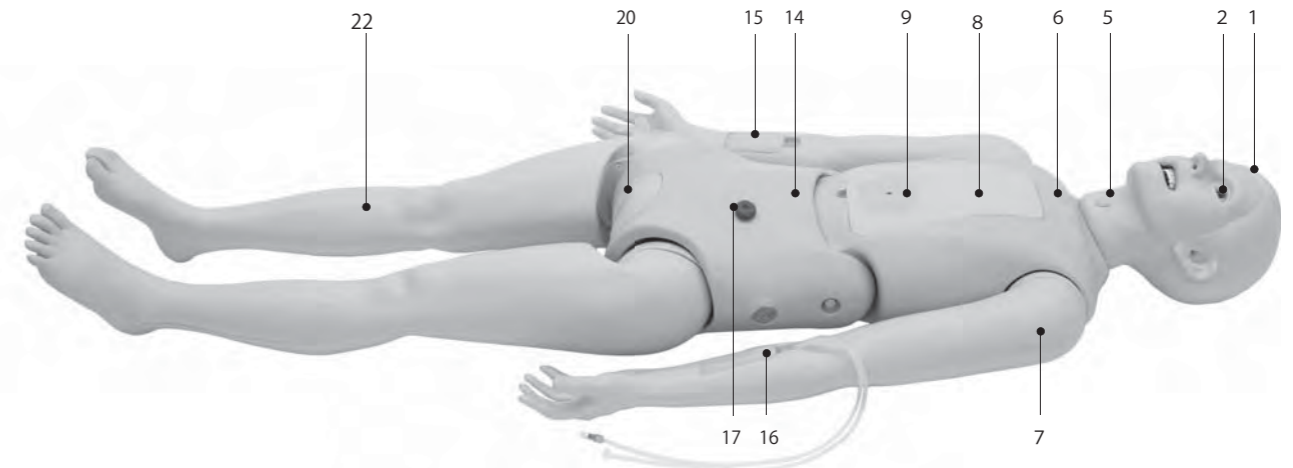


1. Cabeza	10. Brónquios	19. Almohadilla de inyección glútea
2. Ojos	11. Esófago	20. Genitalia femenina
3. Dentadura superior	12. Estómago	21. Genitalia masculina
4. Dentadura inferior	13. Tapón del estómago	22. Piernas
5. Abertura de traqueotomía	14. Parte lumbar	23. Almohadilla de inyección IM femoral
6. Pecho	15. Espaciador	24. Almohadilla de inyección IM de superior del brazo
7. Brazos	16. Almohadilla de inyección IV	25. Almohadilla de cuidados de herida
8. Cobertura torácica	17. Estoma	26. Botella
9. Abertura de GEP	18. Almohadilla de inyección subcutánea	27. Jeringa


Montaje de las piernas

Nota Las piernas están separadas por el motivo de empaque. Por favor conecte las piernas al torso antes del entrenamiento.


① Jale la manija negra para desbloquear el seguro.

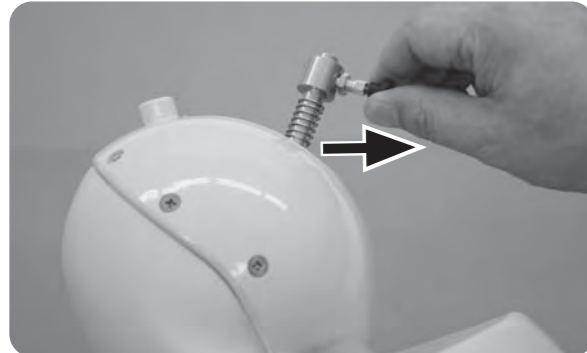


② Siga jalando la manija y quite el seguro desde la barra metálica.

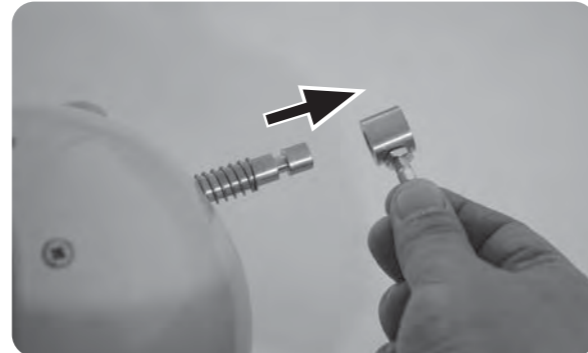

③ Pull out the spring. Saque el resorte.

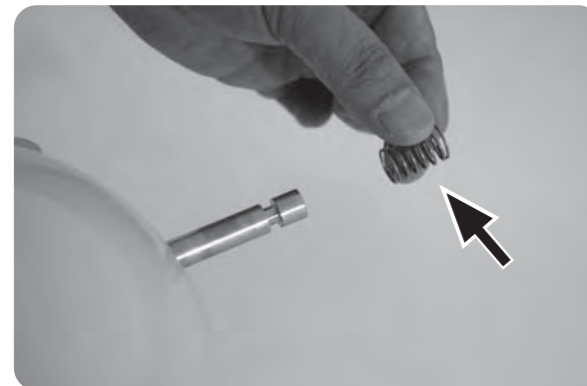

④ Inserte la barra metálica en el hueco del modelo.

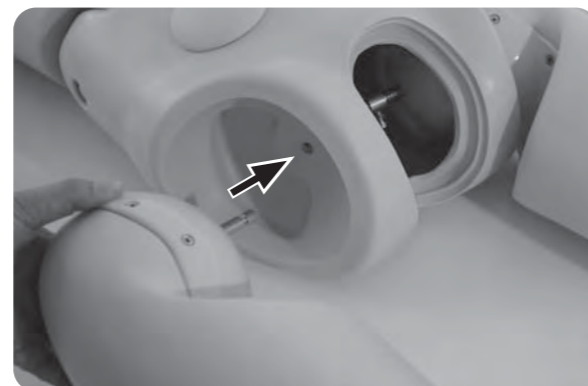

⑤ Ajuste el resorte y seguro para fijar la pierna.



⑥ Completa. Luego, monte la otra pierna.



Precaución Tenga cuidado de que no pierda el resorte y seguro en el modelo.

Inyección subcutánea

① Empuje el borde de la almohadilla por los dedos y quítela. ② Coloque la almohadilla en la orientación correcta.



Precaución No se puede inyectar el líquido a la almohadilla de inyección subcutánea.

Inyección glútea

① Empuje el borde de la almohadilla por los dedos y quítela.



※ Coloque la almohadilla en la orientación correcta siguiendo a la guía de almohadilla y cuerpo.

Precaución No se puede inyectar el líquido a la almohadilla de inyección glútea.

Cuidados de herida

① Coloque la almohadilla de cuidados de herida encima del stoma y la almohadilla de inyección subcutánea. Luego, ajuste uno a otro.



Cuidados de estoma



Se utiliza para el entrenamiento de cuidados de estoma.

Cateterización urinaria, enema, inserción de supositorios, cuidados perineales (Femeninos)

① Jale el borde de la unidad genital con sus dedos.



② Quite la unidad genital.



Cateterización urinaria, enema, inserción de supositorios, cuidados perineales (Masculinos)



① Jale el borde de la unidad genital y quítela.

Tamaño recomendado de catéter: Nelaton catheter 13Fr
Balloon catheter 16Fr

Precaución Se puede inyectar el líquido a la vejiga, útero y recto.

Manejo del modelo

- Articulaciones realísticas para posicionamiento del paciente, ejercicio pasivo, etc.
- Poder sentarse sin soporte.
- Los brazos y piernas sin costura ofrecen el entrenamiento de baños en cama y baños de piernás realísticos.



Precaución

lija una pijama que no causa la migración de cloro al maniquí. (El alto del maniquí es unas 62 pulgadas.)

Cuidados orales y dentales

- Quite la dentadura superior: Jale la dentadura hacia abajo. Dentadura inferior: Jale la dentadura hacia arriba.



- Montaje
Agarre la dentadura e inserte el perno de la dentadura al hueco de la boca. Empuje el centro y ambos extremos laterales de la dentadura para fijar la dentadura firmemente.


Ambas dentaduras superior e inferior se fijan con el perno de cada dentadura en su centro y lado izquierdo.

Inhalación del oxígeno



La cánula nasal puede estar puesta para la inhalación del oxígeno.

Inserción del catéter intranasal e intraoral

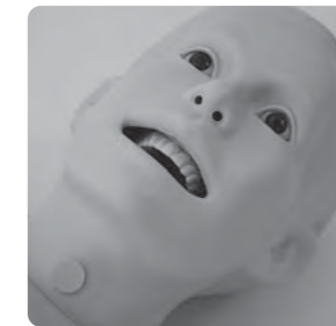

① Se puede insertar el catéter al estómago vía nasal y oral.


Tamaño recomendado del catéter: 12Fr

Precaución


No se puede inyectar el líquido por el catéter intranasal e intraoral.

Cuidados del catéter de traqueotomía

① Jale el tapón.

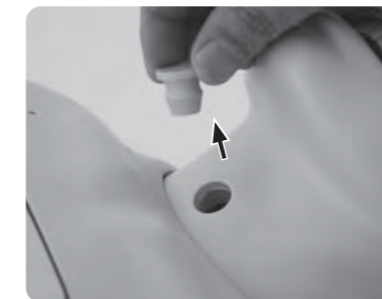

Precaución No se puede empear la succión del líquido aunque la traqueotomía está conectada a la tráquea del modelo.

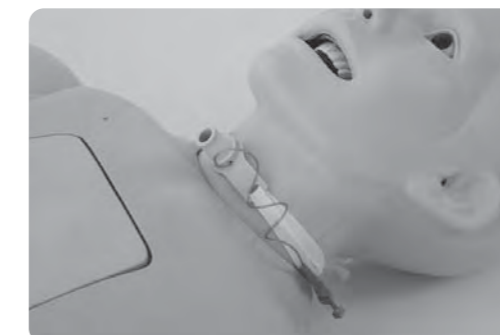


② Coloque y fije un catéter de traqueotomía. Después del entrenamiento, coloque el tapón de traqueotomía al hueco para traqueotomía.


Tamaño recomendado del catéter de traqueotomía:
Diámetro interior: 8mm,
Diámetro exterior: 11mm

Cuidados de NPT y GEP

① Se puede insertar el catéter por los accesos subclavicular y subclavia para los cuidados de NPT.

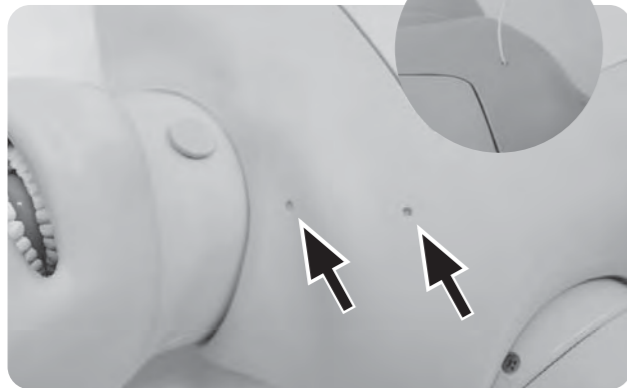

② Se coloque el catéter de GEP para cuidados de GEP.
Tamaño recomendado del catéter de VC: 4Fr x 60cm
Tamaño recomendado del catéter de GEP: 20Fr x 34mm

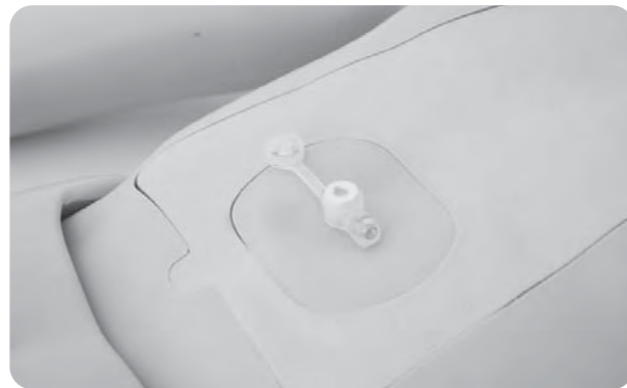

Precaución No se puede inyectar el líquido por los huecos para NPT y GEP.

Cuidados de úlceras de presión

① Úlcera de presión por la escápula (Estepa 1)




② Úlcera de presión por el tróncater mayor. (Estepa 2)



③ Úlcera de presión por el sacro (Estepa 4)



④ Úlcera de presión por el talón. (Estepa 3)

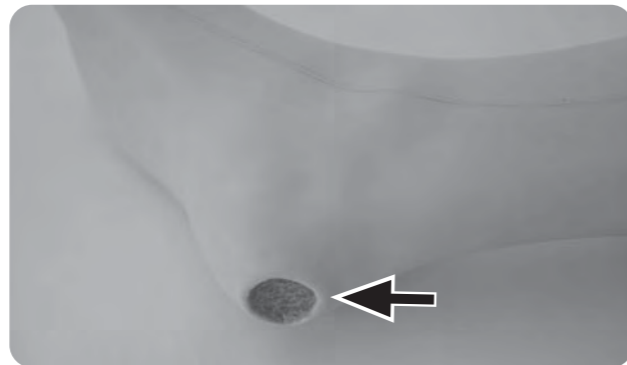


Desmontaje del estómago

① Abra la cobertura torácica por jalarla desde el corte.



② Quite la cobertura de GEP.

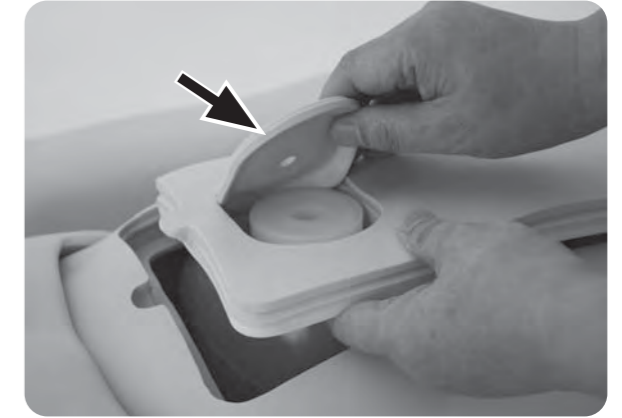

③ Sostenga el estómago dentro del modelo y destornille la tapa del estómago.



④ Quite la cobertura torácica.



⑤ Jale el tubo del esófago desde el estómago. Se puede quitar el estómago desde el modelo.



⑥ Completado. Se puede montar el estómago ajustando en los pasos reversos ①-⑤.



Se puede quitar el estómago desde el modelo.