


マスク附属の「首の保護カバー」の取り付け方法

首の保護カバーは、モデルの頭を前後に動かしたときに、実習者の皮膚が挟まれないように保護するためのものです。必ず取り付けてご使用ください。

- ご購入いただいた首の保護カバーは①の様な状態ですので、②のように片側の2つの穴にバンドを通してから、マスクの首部の片側の穴に保護カバーのベルトを通して取り付けてください。



- 頭部にマスクかぶせ、後頭部で保護カバーのもう一方のバンドをマスクの穴にはめ込みます。

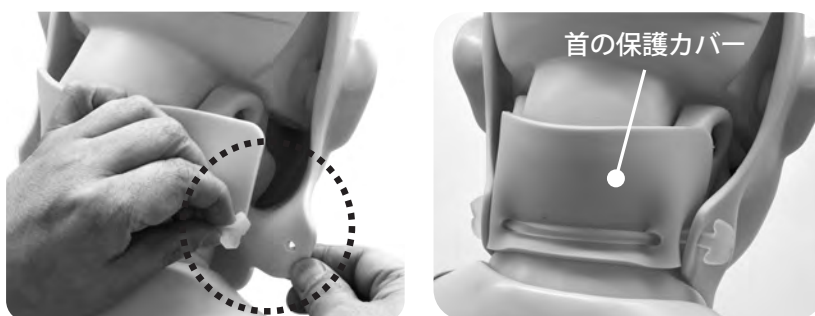

2019.04


Use of the Protective Neck Cover for the Face Mask

Be sure to use the protective neck cover. The cover prevents trainee's skin and fingers from being caught or pinched by plastic parts when moving the manikin head.

- At the time of delivery, the cover and the band is connected at one side as shown in ①. Thread the other side of the band through the two holes as shown in ②, then thread it through the hole at the side of the neck area of the face mask.



- Set the face mask on the head of the manikin and thread the tip of the band at the free end of the cover through the opening in the face mask, so that both sides of the cover are connected to the face mask.

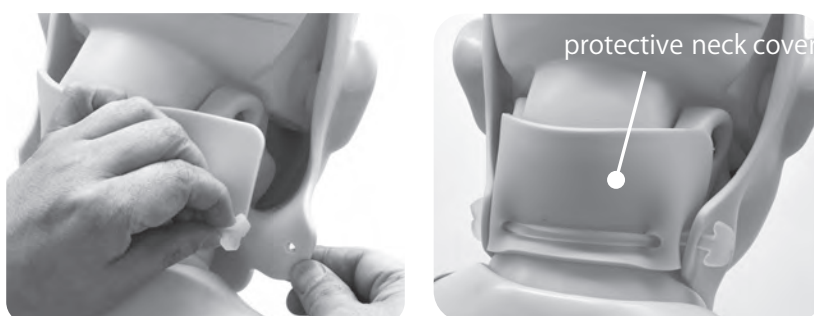

2019.04