

多職種連携ハイブリッドシミュレータ

SCENARIO

シナリオ

「シナリオ」に沿って状態が変化する、全身型シミュレータ



型番 MW27 多職種連携ハイブリッドシミュレータ

SCENARIO

レンタル 年払いプラン 保障やメンテナンス付帯

コードNo
11406-000

一括購入 5年間のメンテナンス付帯

コードNo
11406-100

モデル本体	1体
コントロールPC	1点
キーボード	1点
生体情報モニター	1点
ヘッドセット(マイク)	1点
かつら(高齢者)	1点
かつら(成人)	1点
シナリオ用マスク(高齢者)	1点
シナリオ用マスク(成人)	1点
義歯(モデルに装着)	1点
正中注射パッド	1点
女性性器ユニット	1点
男性性器ユニット	1点
パジャマ/下着	1点
専用アネロイド式血圧計	1式
専用体温計	1点
専用パルスオキシメータ	1点
付属品	1式
ケーブル類	1式
ヘルプファイル(ソフトウェア内蔵)	
取扱説明書	



本体	成人全身モデル
大きさ	身長約 152cm
重量	約 20kg
材質	軟質特殊樹脂 / 硬質特殊樹脂
電源	AC100V ~ 240V 50/60Hz
消費電力	80W

関連製品



浮腫触診モデル
11380-000



実習用輸液バッグ 10パック入り
12802-000



輸血トレーニングキット
12812-100 赤血球 10セット
12812-200 血漿 10セット
12812-300 血小板 10セット
▲赤血球1セットの内容

撮影で協力

- ※1: 京都橋大学看護学部
- ※2: 日本医科大学医学部

- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。



製品詳細はコチラ

<https://www.kyotokagaku.com/scenario/>

取扱店

製造元

KYOTO KAGAKU

<https://www.kyotokagaku.com/jp/>
rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場
〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075

モデル × ソフトウェア



手技項目
種類以上



シナリオ
種類以上

「シナリオ」を

- 選ぶ** 学修レベルや目的にあわせて、シナリオを選ぶことができます
- 変更する** ご施設の教育内容にあわせて、シナリオをカスタマイズすることができます
- 作る** ご施設の教育内容に基づいて、新たにシナリオを作ることができます

シナリオに合わせたモデルの変更
マスク・かつら・性器は交換可能。
シナリオ設定に応じ、性別や年齢を簡単に変更できます。

臨場感をうみだす付加機能
蒼白・紅潮など症状による顔色の変化に加え、咳・うめき声等のボイスを内蔵。
付属のマイクで自由発話も可能です。

アセスメントから対応まで
腹部触診や聴診に加え、静脈注射や気管挿管、胸骨圧迫など、あらゆる手技に幅広く対応。

時間とともに / 学修者の対応で 「シナリオ」に沿って 患者の状態が変化する

シミュレーション中に患者の状態を変化させることができます

「わかる」から「できる」へ 実践力を身につける

シナリオシミュレーションの流れ

より臨床に近い環境を再現

ブリーフィング で目的共有

「何を学ぶか」を明確にする
▶事前に学修目標や患者状況を学修者と共有



シミュレーション

～時間とともにバイタルが変化～



バイタル表示できるモニタ



マイクによる発声で臨場感を演出

デブリーフィング で学びを深める

ディスカッションで「気づき・思考」を共有する
▶学修目標に基づいた設問・想定する回答・ファシリテータのためのガイドで構成されています



SCENARIO の機能

豊富な搭載シナリオ
事前情報は、すべてコントロール PC の中に

学修目標や患者情報、状態設定など指導者は、必要な項目を選ぶだけ。
患者情報を印刷し、事前学修用の資料として配布することができます。



シナリオの追加もできます

※カスタマイズやオリジナルシナリオの作成もできます

バイタルの変化は“SCENARIO”におまかせ
シミュレーションの経過時間や学修者の行動とともにモデルのバイタルも自動で変化

患者の状態を
変化させることができます

学修者の行動記録は、
アイコンをタッチするだけ

すべて
コントロール PC で
簡単操作



デブリーフィングガイド
あらかじめ用意したガイドに沿って振り返りができる

履歴
学修者の行動記録が時系列でわかる

チェックリスト
とるべき行動をとっていたか確認できる



デブリーフィングガイドの画面