

かんたんマニュアルでは起動と終了方法、付属機器の各部名称を紹介しています。  
詳細は、取扱説明書・ソフトウェア内のマニュアルをよくお読みください。

### 起動に必要なケーブル類

付属の取扱説明書の内容と整合をとるため、アルファベットの順番がとんでいます。  
セット構成など詳細に関しましては、取扱説明書をご覧ください。

F: HDMI無線アダプター G: 電源ケーブル (HDMI用) H: 電源ケーブル (モデル用) I: 電源ケーブル (モニター用)




J: 電源ケーブル (タブレットPC用)



K: 電源ケーブル (ヘッドセット用)




M: OAタップ

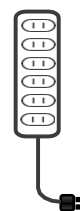

### 起動方法

- ① 機器を接続してください。 ※接続ポートの場所・位置を下図を参考にしケーブルに付属のタグを確認しながら接続してください。

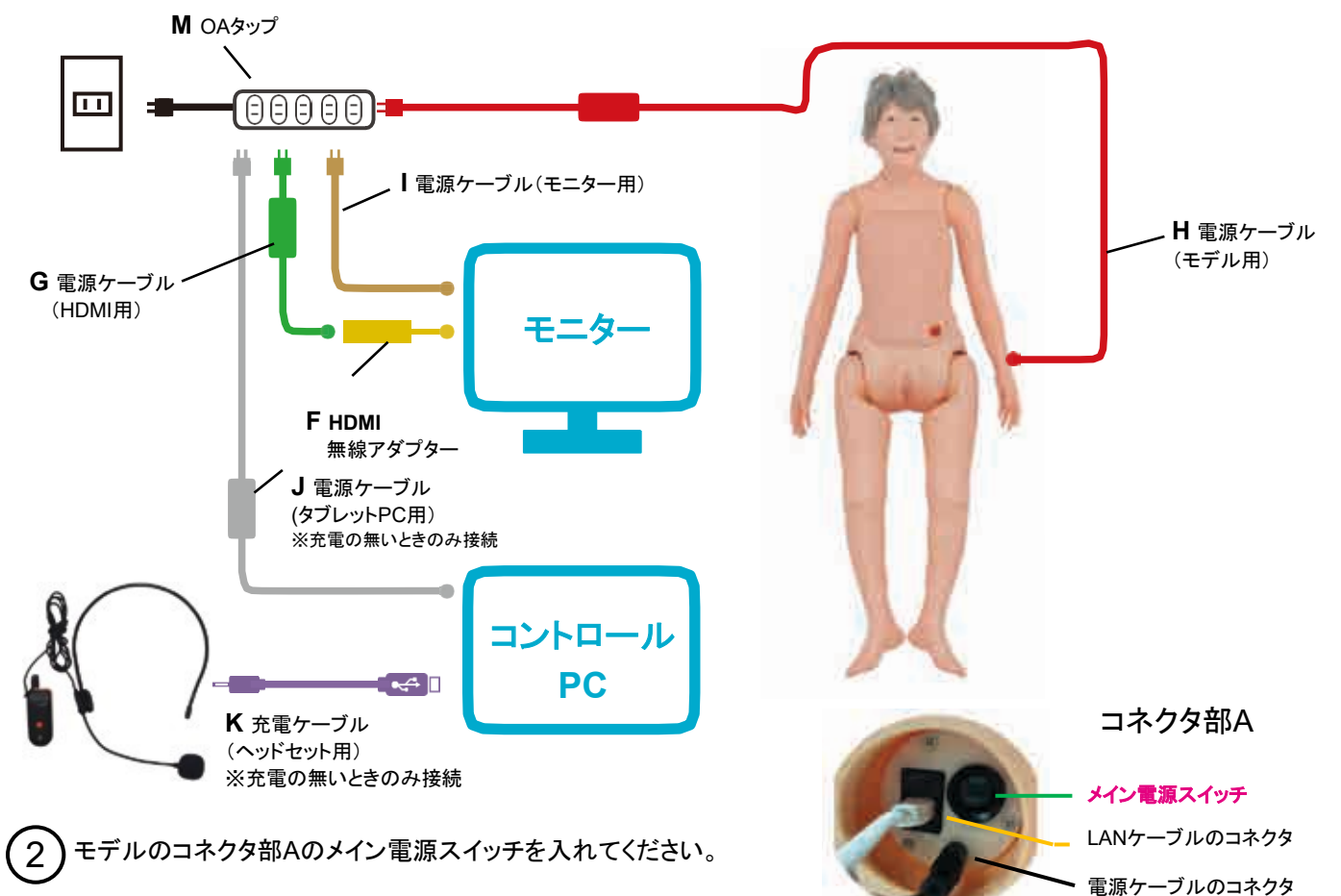

- ② モデルのコネクタ部Aのメイン電源スイッチを入れてください。
- ③ モニター・パルスオキシメータ・体温計の電源を入れてください。



- ④ コントロールPCの電源を入れてください。



重要!

必ず上記の手順を守って起動操作を行ってください。  
手順通りでないと、正常に起動することができません。



注意

弊社シミュレータとお客様の設備や機器、あるいは施設内のネットワーク設備や機器との接続は行わないでください。不具合が発生する恐れがあります。

※本マニュアル以外の方法でのご使用を希望される場合は、(株)京都科学 (TEL 075-605-2510又は03-3817-8071)までご相談ください。



注意

コントロール PC の充電が十分にされていることを確認してから電源を入れてください。充電がされていない場合は、コントロール PC に電源ケーブルを挿したままでも操作を行うことができます。

重要！

必ず下記の手順を守って、終了操作を行ってください。  
手順通りでないと、次回正常に起動することができない場合があります。

## 終了方法


### ■ シナリオモードの場合



### ■ シナリオ作成の場合



③ メイン電源を切ります  
コネクタ部A

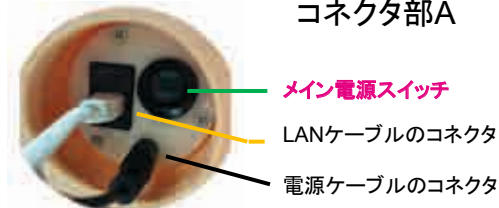

④ モニターの電源を切ります



④ 体温計・パルスオキシメータの電源を切ります




## 付属機器の各部の名称と機能

### ■ コントロールPC



### ■ コントロールPCドッグ

・前面

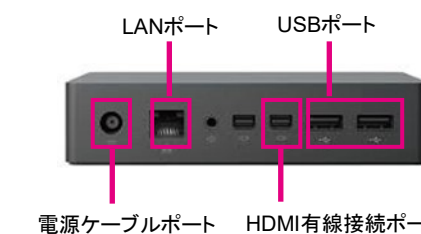

・後面



### ■ キーボード



### ■ 生体情報モニター



### ■ ヘッドセット



### ■ パルスオキシメータ



### ■ 体温計



※コントロールPC、生体情報モニター、接続ポート等の仕様は、変更になることがあります。

株式会社 京都科学

<http://www.kyotokagaku.com>

■ 本社・工場

〒 612-8388

京都市伏見区北寝小屋町15 番地

TEL: 075-605-2510

FAX: 075-605-2519

■ 東京支店

〒 113-0033

東京都文京区本郷三丁目26番6号

NREG 本郷三丁目ビル2 階

TEL: 03-3817-8071

FAX: 03-3817-8075



注意

● ご使用時以外、体温計やパルスオキシメータの電源をお切りください。

電源を入れていると、電池の消耗が早くなったり故障の原因となります。

● 体温計やパルスオキシメータの電池が少なくなったら速やかに交換してください。

電池が減ると液晶画面に「Lo」と表示されます。故障の原因となりますので、電池を交換してください。単 4 電池をお使いください。