

女性導尿・浣腸シミュレータⅡ

型番
MW52

コードNo
11433-000

成人腰部モデル	1台	浣腸用直腸部	1点
性器部ユニット (男性器又は女性器)	1式	イルリガートル	1点
導尿用弁 (1個は性器部ユニットに組込済、2個は付属)	3個	ホース(給水・排水用)	3本
		潤滑剤(オリーブ油)	1点
		取扱説明書	

男性導尿・浣腸シミュレータ

型番
MW2A

コードNo
11381-100

本体	成人性器部モデル
大きさ	約 W34×D33×H24cm
重量	3.5kg(男性) 3.4kg(女性)
材質	軟質特殊樹脂製

女性導尿・浣腸シミュレータ からの皮膚 買替プラン

コードNo
11433-000-99


性器部皮膚Ⅲ(女性用)	1点
尿道口部Ⅲ(女性用)	2個
クリップ	1個

交換
部品

女性用



性器部皮膚Ⅲ(女性用)
11433-010
※クリップが付属しています

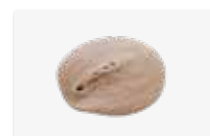

尿道口部Ⅲ(女性用)
11433-020 2個組

男性用



性器部皮膚Ⅱ(男性用)
11381-410



尿道口部Ⅱ(男性用)
11381-510 2個組

男女共通



導尿用弁(男女共通)
11381-300 6個組




潤滑剤(導尿・浣腸他用)
11381-800 1点

KYOTO KAGAKU

女性導尿・浣腸シミュレータⅡ 男性導尿・浣腸シミュレータ

リアルだから身につく「安全で確かな技術」

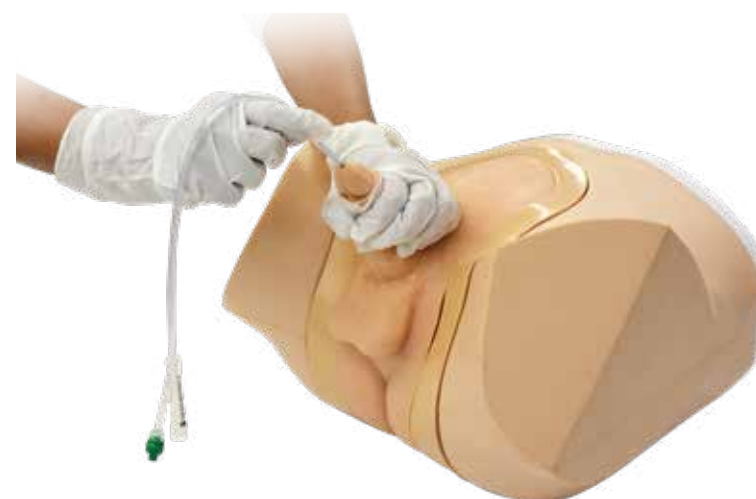

✓質感を
リニューアルしました

男女導尿・浣腸モデル 装着式

型番 MW53	コードNo 11434-000(男性)
型番 MW54	コードNo 11435-000(女性)
型番 MW55	コードNo 11436-000(男女)



- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

2025.03

取扱店

製造元

KYOTO KAGAKU URL <https://www.kyotokagaku.com/jp/>
e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場
〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL.075-605-2510(直通) FAX.075-605-2519


東京支店
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL.03-3817-8071(直通) FAX.03-3817-8075



“ほぼヒト”

演習中に「実際のヒトとは違います」という説明が必要ないくらい、
質感と構造にこだわりました。

Point

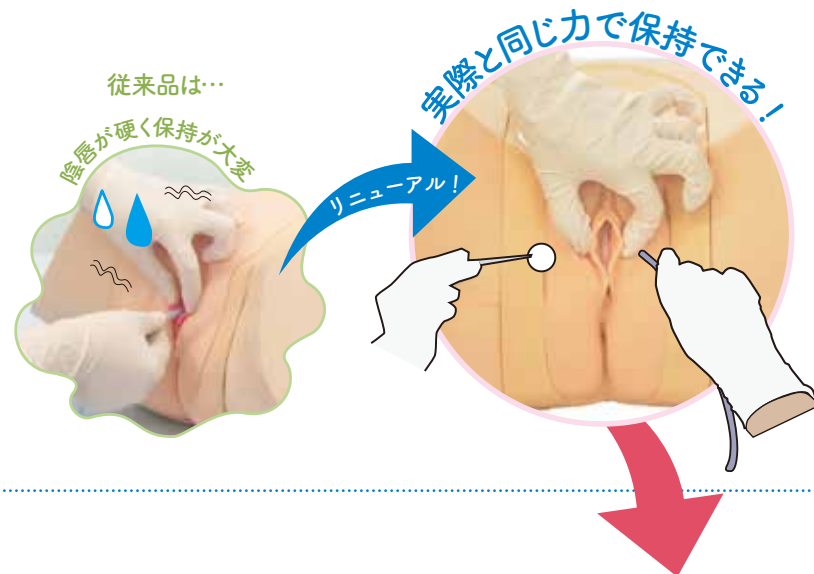

導尿だけじゃない、 色々な場面で

導尿 外尿道口の確認・消毒
カテーテルの挿入・排尿の確認
カテーテルの抜去

浣腸 カテーテルの肛門への挿入
カテーテルの適切な長さの確認
浣腸液の注入

排泄の援助 必要な配慮・患者さんの気持ちの理解

陰部洗浄 微温湯での陰部洗浄

性教育 コンドームの装着


リアルな挿入感覚

男性の尿道の抵抗・陰茎の角度調整、女性の尿道口への挿入感覚も忠実に再現しています。

構造の再現

実際のカテーテル挿入と同様の長さを挿入でき、バルーンを膨らませて留置できます。浣腸の挿入長も実際と同様です。

浣腸

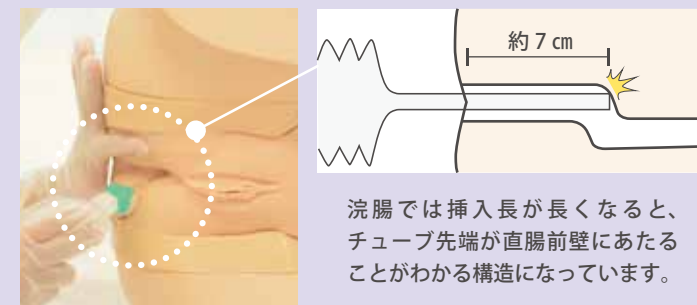

PMDA 医療安全情報 No.34 グリセリン浣腸の取扱い時の注意について

チューブの挿入する長さは、目安として5～6cmとされていますが、抵抗を感じたら無理に進めず、少し引き戻しましょう。

無菌操作が継続できる

外尿道口を露出

消毒

カテーテルの挿入

バルーンカテーテルの留置・固定

女性



男性



Q&A

Q. カテーテル挿入時にいつも使っている潤滑剤を使用しているの？

A. 付属の潤滑剤をご使用ください。

Q. 旧型の性器部皮膚Ⅱと新型の尿道口部Ⅲは一緒に使えますか？

A. 形状が異なるため、一緒にのご使用できません。

安全なバルーンカテーテルの留置を習得

カテーテルを正しく挿入し膀胱まで達すると排尿を確認できます。

医療安全情報 No.80 No.142 膀胱留置カテーテルによる尿道損傷

膀胱留置カテーテルを留置する際、尿の流出を確認せずバルーンを拡張し、尿道を損傷した事例が報告されています。