

Simulador de Examen Obstétrico

Simule el chequeo prenatal usando nuestro simulador de embarazo de 39 a 40 semanas
Palpación, auscultación y medición: todo en un sólo simulador



CARACTERÍSTICAS


- 1 | Suave, durable y sentido táctil realista
- 2 | Varias posiciones y orientaciones fetales rotando la unidad fetal
- 3 | Sonidos cardíacos fetales reales grabados y editados

PUNTOS DE REFERENCIA

- | sínfisis púbica
- | ombligo
- | apófisis xifoide
- | cresta iliaca
- | trocánteres mayores

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Auscultación

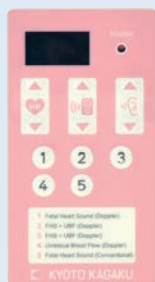

Se puede seleccionar los sonidos con un control remoto para una práctica conveniente y eficiente.

Los sonidos cardíacos fetales grabados se pueden escuchar con un estetoscopio o con parlante externo para las sesiones grupales.

Cinco variaciones de sonido:

- Sonidos de estetoscopio
 - Sonidos cardíacos fetales
- Sonidos Doppler
 - Sonidos cardíacos fetales
 - Flujo sanguíneo umbilical
 - Flujo sanguíneo umbilical y sonidos cardíacos fetales (posterior y anterior)

*Los sonidos Doppler serán escuchados a través del parlante externo.

Parámetros controlables

- Control de la frecuencia cardíaca fetal (60-180)
- Cambio entre los parlantes interno y externo

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES

Tamaño: A30 x P60 x A30 cm/ A11.8 x P23.6 x A11.8 plgds Peso: 11.2 kg / 24.7 lbs

CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 | torso materno
- 1 | adaptador CA
- 1 | control remoto
- 1 | talco en polvo
- 1 | manual de instrucciones
- 1 | toalla

MATERIALES

Resina blanda
Libre de látex

REPUESTOS

11414-010 cubierta de piel para MW34

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

-

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Palpación

Palpación de los puntos de referencia de pelvis y feto anatómicamente correctos

¡Material innovador similar al tejido real!

■ Maniobras de Leopold

Palpe las partes del feto, como la cabeza, nalgas y tronco usando las maniobras de la primera a la cuarta.

Determine la posición y orientación fetales, así como el grado de descenso fetal.

Primera maniobra






Cuarta maniobra



■ Evaluación de Desproporción Cefalopélvica

Practique múltiples escenarios de evaluación de DCP. La altura de la cabeza fetal contra la sínfisis púbica se puede cambiar rotando la unidad fetal.

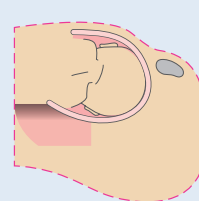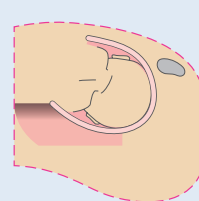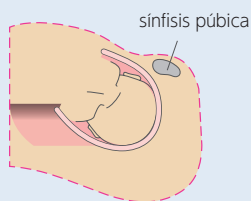

Mediciones

Mida y estime el peso fetal, su desarrollo, y volumen del líquido amniótico.

Circunferencia abdominal materna



Altura uterina



Variedad de pelvimetrías externas



Diámetro biespinoso



Diámetro bicrestal



Diámetro bitrocantéreo



Diámetro oblicuo externo