

ご使用中にトラブルが発生した場合は、下の表にしたがって確認してください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店もしくは(株)京都科学 (TEL075-605-2510 又は 03-3817-8071) までご連絡ください。

導尿

症状	原因	対策・対処
カテーテルを挿入しても水が出てこない。	給水用チューブのチューブコックが閉じている。	チューブコックを開いてください。
	カテーテルの挿入が深すぎる。	水が排出される位置までカテーテルを引き戻してください。
モデル本体に貯水袋を接続してチューブコックを開くと、尿道口から自然に水が漏れる。	モデルと貯水袋の高低差が大きすぎる。	モデルと貯水袋の高低差を60cm程度に調整してください。
	内部部品が消耗している。	修理が必要です。 (株)京都科学 (TEL075-605-2510 又は 03-3817-8071) までご連絡ください。
カテーテルを挿入すると抵抗感があり挿入できない。	尿道内の潤滑剤が不足している。	潤滑剤を塗布したメンテナンス用カテーテルを挿入して排水してください。

浣腸

症状	原因	対策・対処
浣腸液を注入しても水が出てこない。	モデル本体に接続されているチューブコックと排水用チューブのチューブコックが閉じている。	チューブコックを開いてください。
浣腸液を注入すると、モデル本体から水が漏れる。	内部部品が消耗している。	修理が必要です。 (株)京都科学 (TEL075-605-2510 又は 03-3817-8071) までご連絡ください。