

製品ご使用上の注意点とお願い



MW53 男性導尿・浣腸モデル 装着式

MW54 女性導尿・浣腸モデル 装着式

MW55 導尿・浣腸モデル 装着式 男女セット

弊社製品をご購入、ご使用いただきまして誠にありがとうございます。
より長く良い状態で本製品をご使用いただくため、以下の点にご注意願います。

- 実習前には付属のメンテナンス用カテーテルを使って、尿道と内部部品(弁)に潤滑剤を必ず塗布してください。塗布後はモデル内部にまんべなく潤滑剤を塗布するため、メンテナンス用カテーテルを左右にまわしながら挿入してください。

※ 潤滑剤が不足やメンテナンス用カテーテルの未使用は、破損の原因になります。

- “M53 男性”は“M54 女性”よりも尿道が長いため、潤滑剤は多めにご使用ください。

※ 潤滑剤が不足すると挿入時の抵抗が増します。その場合は潤滑剤を追加で塗布してください。

- 使用するカテーテルは、男性は16Fr, 女性は14Frを推奨しています。

※ 推奨より太いカテーテルを使用すると、内部部品(弁)の消耗が通常よりも早くなるためご注意ください。

- 付属の潤滑剤以外は使用しないでください。

※ ゼリー状の潤滑剤は水に触れると潤滑性が奪われるため、カテーテル抜去時に内部部品(弁)の消耗が早くなります。

* 初めてお使いになる方、潤滑剤の使用法についてご不明な点がある方は、以下のサイトをご覧ください。



<https://www.kyotokagaku.com/jp/video/mw55.html>

 株式会社 京都科学

■ 本社・工場

〒 612-8388 京都市伏見区北寝小屋町 15 番地

TEL: 075-605-2510(直通)

URL <http://www.kyotokagaku.com>

E-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

■ 東京支店

〒 113-0033 東京都文京区本郷三丁目 26 番6号

NREG 本郷三丁目ビル 2 階