

## 小児（幼児）の身体診察シミュレータ

型番 MW71 | コードNo 11464-000

|       |         |    |
|-------|---------|----|
| A     | モデル本体   | 1体 |
| B     | かつら     | 1台 |
| C     | 専用模擬聴診器 | 1点 |
| D     | 専用模擬血圧計 | 1点 |
| E     | 専用模擬体温計 | 1点 |
| F     | リモコン    | 1点 |
| G     | 電源コード   | 1式 |
| H     | パジャマ    | 1式 |
| I     | 帽子      | 1点 |
| 取扱説明書 |         |    |



|      |                          |
|------|--------------------------|
| 本体   | 幼児全身モデル                  |
| 大きさ  | 身長約67cm                  |
| 重量   | 約3kg                     |
| 材質   | 軟質特殊樹脂                   |
| 電源   | AC100V 50/60Hz           |
| 消費電力 | 10W（リモコン）                |
|      | CR2032 コイン電池 1個（専用模擬体温計） |

## 小児（幼児）の身体診察シミュレータ

1歳児を想定した全身型シミュレータで  
バイタルサイン測定や身体診察のトレーニングができます

- 幼児の身体的特徴を再現
- 小児の診察や看護で求められる観察項目を網羅



関連商品

### 呼吸音聴診シミュレータ “小児ラング”

型番 MW57 | コードNo 11439-000



### 小児の手背静脈注射シミュレータ

型番 M95 | コードNo 11350-000



- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

取扱店

製造元 **KYOTO KAGAKU**  
<https://www.kyotokagaku.com/jp/>  
[rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp](mailto:rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp)

京都本社・工場  
 〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地  
 TEL.075-605-2510（直通）FAX.075-605-2519

東京支店  
 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号  
 NREG本郷三丁目ビル2階  
 TEL.03-3817-8071（直通）FAX.03-3817-8075

## 『一緒に成長しようね』

### 一歳児って？

少子化や核家族化によって学修者が日常生活の中で小児と触れ合う機会が減ってきています。そんな中で生まれたのがこのシミュレータです。まずはたくさん見て触れて一歳児のことを知ってみましょう！



本物の一歳児 さながら！

## 『ひとりでお座りできるよ』


支えがなくてもひとりでお座りできるようになったところを忠実に再現。膝の上で抱きかかえた状態での診察など、様々な状況がシミュレーションできます。



## 『たくさん抱っこしてね』

従来のシミュレータと違い本体につながるコードがないため実際の小児のように抱っこができます。小児と触れ合った経験のない初学者も、初めて抱っこする体験ができます。

### 股関節の可動域が広くヒトに近い

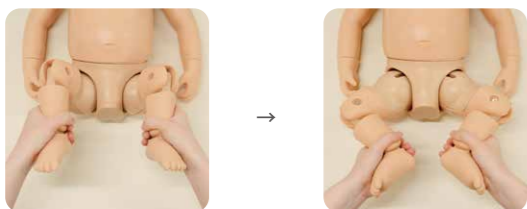

お座りや抱っこができる秘訣はこの股関節！

### 体やお顔は柔らか素材

観察する手順を学べます。

例・口腔



舌圧子を使用し舌を押さえることができます。

## 『できること』

- バイタルサイン測定
- 身体診察

専用体温計が付属



・体温測定（左右腋下）

専用血圧計が付属



・聴診法による血圧測定（左右上腕）

- ・プレパレーション
- ・体位の保持

- ・眼瞼の観察
- ・鼻腔 / 耳腔の観察
- ・口腔の観察
- ・大泉門の触診

専用聴診器が付属



・聴診（心音 / 肺音 / 腸音）



## タッチパネルで簡単操作



### 【変更可能な設定】

- ・再生する音の種類
- ・心拍数 / 呼吸数
- ・血圧（収縮期 / 拡張期）
- ・症例
- ・音量

### 本物の泣き声

実際の幼児から収録した音声を内蔵。一歳児ならではの言語ではない泣き声による意思表示に触れる体験ができます。

※音声はリモコンのスピーカーから再生されます。

### 自己学修や試験にも対応

何度も繰り返し症例を聴き比べることで学修者の理解を深めます。試験では画面に表示されているバイタルサインの数値をボタンひとつで隠すことができます。

おむかえ待ってるよ！

