



注意

モデル表面に印刷物などが直接触れないようにしてください。
樹脂表面にインクが吸収されて消えなくなります。

MW74


11479-000

帝王切開術子宮縫合モデル

取扱説明書

目次

- はじめに…………… P. 1
- ご使用前に…………… P. 2
- 実習の準備…………… P. 3
- 片付け…………… P. 5

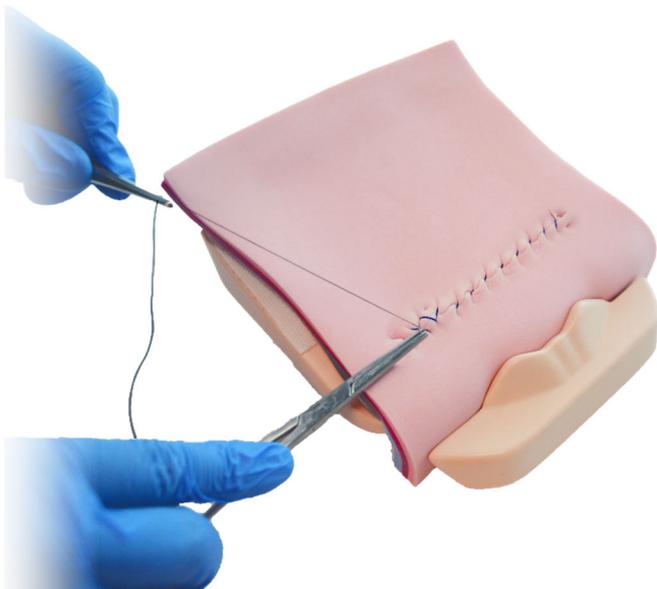

はじめに

この度は「帝王切開術子宮縫合モデル」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本モデルは帝王切開時の子宮壁の切開と縫合をトレーニングすることができるシミュレータです。

必ずお読みください

本来の使用目的以外にはご使用にならないでください。また取扱説明書に記載された方法以外でのご使用による万一の破損や事故に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

特長


- 子宮壁を模した多層構造の再現
- リアルな切開感と縫合感
- 胎児の頭部と恥骨を再現

注意

- | | |
|--|--|
| ● 取り扱いにご注意ください。 特殊軟質及び硬質樹脂を使用しており、また本体は重量がありますので、落下や強い衝撃を与えると破損の原因となります。 | ● 水又は中性洗剤で拭き取ってください。 汚れは水又は中性洗剤で拭きとってください。シンナーなどの有機溶剤は、絶対に使用しないでください。 |
| ● 印刷物をモデル表面に置かないでください。 コピー用紙などの印刷物がシミュレータ本体に色移りする場合がございます。 | ● ボールペンやサインペンで書き込まないでください。 サインペン、ボールペンなどでモデルに書き込むと、インクが吸収されて消えなくなります。 |
| ● 高温多湿を避けて保管してください。 使用後は、高温多湿や直射日光のあたる場所での保管は避けてください。変形や故障の原因となります。気温が 60°C 以下の場所で保管してください。 | ● 表面が変色する場合があります。 長期間使用されない場合や経年変化で変色することがありますが、ご使用には差し支えありません。 |
| ● ビニール袋で保管しないでください。 子宮壁パッドを保管の際は付属の不織布袋をお使いください。その他のビニール系の袋で保管されますと製品の油分が染み出し、ビニール袋が伸びる可能性があります。 | ● 使用後はパッドを外して保管をお願いします。 モデルに子宮壁パッドを装着したまま保管しないでください。子宮壁パッドが変形する恐れがあるため、付属の袋に戻して保管してください。 |


セット内容と各部の名称

ご使用前に、構成品が全て揃っているかご確認ください。

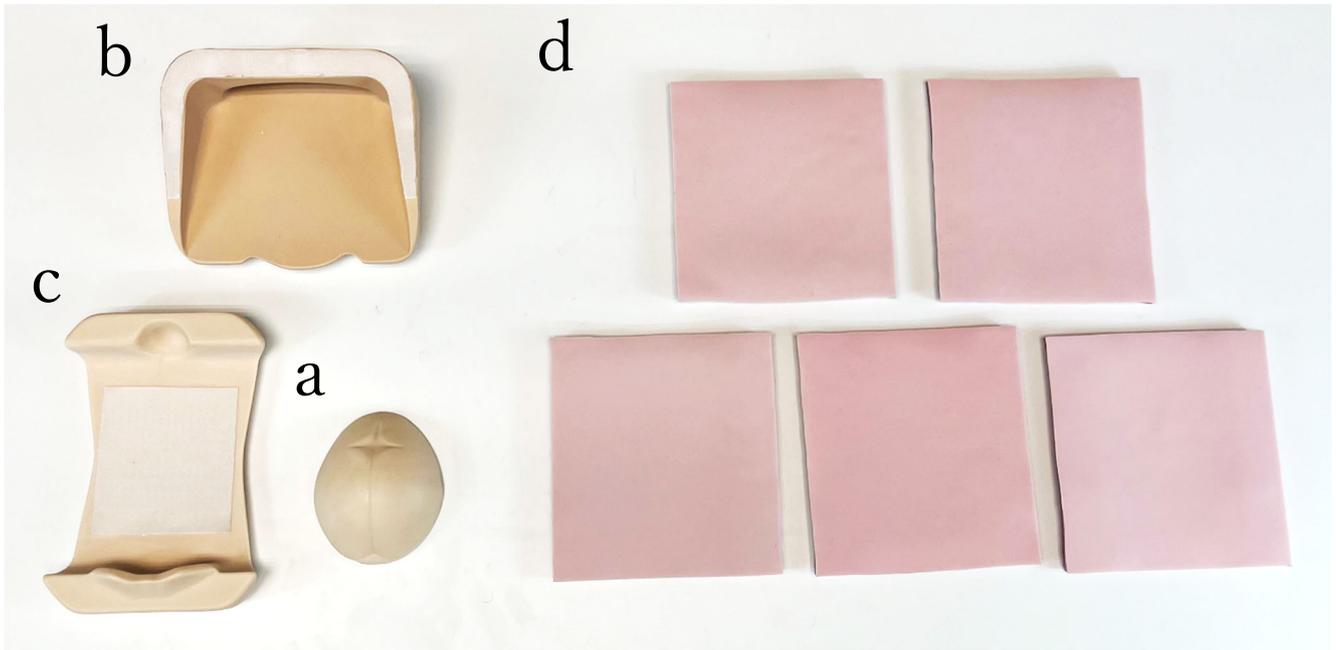


- | | | | |
|---------|----|-----------|----|
| a. 胎児頭部 | 1個 | d. 子宮壁パッド | 5枚 |
| b. 台座A | 1個 | *消耗品です。 | |
| c. 台座B | 1個 | | |

各部位の役割説明

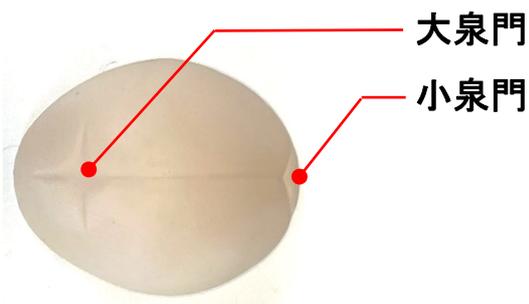

胎児頭部

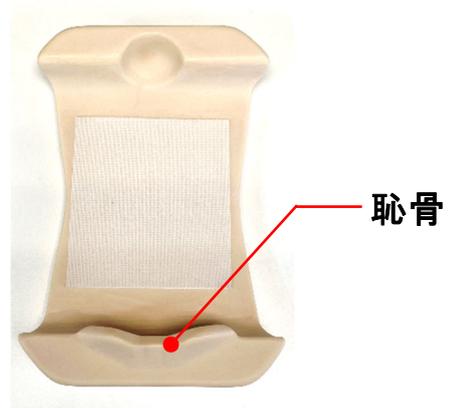

台座B

シミュレータの準備


- ① マジックテープで固定されている《台座A》と《台座B》を分離する。



- ② 《台座A》に胎児頭部を置く。



- ③ 《子宮壁パッド》のマジックテープ部を《台座A》のマジックテープ部にしっかり固定する。

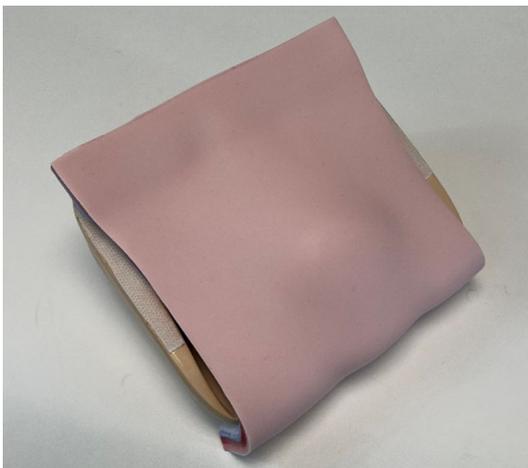


* 片側は折り込むように固定する。



シミュレータの準備

- ④ <<台座B>>の恥骨が<<台座A>>で<<子宮壁パッド>>を折り込んだ部分に当たるようにして固定する。

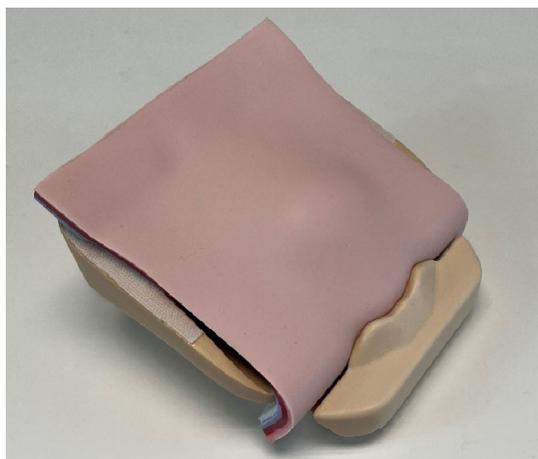


後片付け・保管

- ① 準備の逆の手順で《子宮壁パッド》を外す。
- ② 《子宮壁パッド》を保管する場合は、付属の不織布袋に1枚ずつ入れて保管して下さい。



交換部品

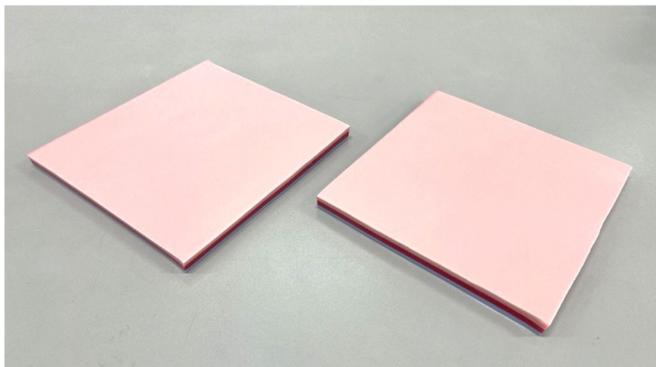

11479-010

MW74 子宮壁パッド 2 枚組



株式会社 京都科学

<http://www.kyotokagaku.com>
rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

■本社・工場

〒612-8388

京都市伏見区北寝小屋町15番地

TEL : 075-605-2510

FAX : 075-605-2519

■東京支店

〒113-0033

東京都文京区本郷三丁目26番6号

NREG 本郷三丁目ビル2階

TEL : 03-3817-8071

FAX : 03-3817-8075