



注意

モデル表面に印刷物などが直接触れないようにしてください。
樹脂表面にインクが吸収されて消えなくなります。

MW75

骨盤臓器脱(子宮脱)モデル”Utena”

取扱説明書

目次

- はじめに…………… P. 01
- ご使用前に…………… P. 02
- 取扱いのご注意…………… P. 03
- 実習の準備…………… P. 04
- 実習…………… P. 05
- モデルの装着…………… P. 05
- 子宮の復元とペッサリーの装着…………… P. 06
- 後片付け…………… P. 07



はじめに

この度は MW75「骨盤臓器脱(子宮脱)モデル”Utena”」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本モデルは骨盤底筋の緩みなどにより膣口から子宮が体外に下がってくる状態を再現しております。この状態を骨盤臓器脱(子宮脱)と呼び、本モデルでは骨盤臓器脱の状態から子宮を正常な状態に戻し、かつその治療用装具であるペッサリーの自己着脱のトレーニングをすることができます。

必ずお読みください

本来の使用目的以外にはご使用にならないでください。また取扱説明書に記載された方法以外でのご使用による破損や事故に関しまして、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。

特長

- 伸縮性に優れた素材を使って、リアルな形状と触感。
- 実際に装着し何度でも自分でトレーニングが可能。
- 装着せずに使用すれば、子宮の構造の座学教材としても最適。

使用の際の御注意


- | | |
|--|---|
| ● 印刷物をモデル表面に置かないでください。
コピー用紙などの印刷物を製品に触れた状態で放置いたしますと、インクが転写されることがございます。 | ● 使用後はお手入れをお願いします。
使用後は潤滑剤を水で充分洗い流した後、柔らかいタオルなどで水分を取り除いてください。直射日光を避け、40℃以下の場所に保管してください。また汚れがひどい際には水または中性洗剤でやさしく洗い流してください。 |
| ● 長期間子宮脱の状態にしないでください。
本モデルの軟組織は長い時間、力をかけ続けると変形やひび割れを起こす恐れがあります。収納する際は子宮を膣内に収めた状態で収納してください。またペッサリーを装着したままでの長期間保管もおやめください。 | ● ペッサリーを御準備ください。
骨盤臓器脱治療用のペッサリーは医療器具です。当モデルには付属しておりません。本書ではリング状のペッサリーの取り扱いについて表記しております。その他のタイプにつきましては掛かり付けの医師にご相談ください。 |
| ● 指などを挟まないようにしてください。
本モデルには可動部があり指や体の一部を挟む危険性があります。モデルをご自身で装着する際など、十分注意してください。 | ● 装着時のご注意
本モデルを装着する際には、モデル可動部を閉じてから、装着してください。またモデルの着脱は椅子に腰かけるなど、必ず安定した姿勢で行ってください。 |

セット内容と各部の名称

ご使用前に、構成品が全て揃っている事をご確認ください。



- a. 子宮脱モデル本体 1 台
- b. 専用潤滑剤 (5 g) 3 点
- c. 解説書『骨盤臓器脱がわかる本』 1 冊

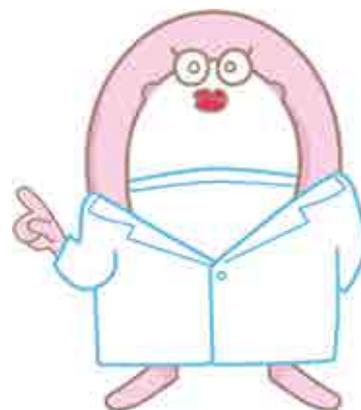

必ずお読みください！

モデルの外陰部取扱い及び保管方法に関するご注意

モデルの外陰部は伸縮性と復元性、耐久性に優れた特殊な軟質樹脂を使用しております。

下記の注意事項を必ずお読みいただき、適切な取扱いと実習後の保管をお願いいたします。

○実習後はモデルの外陰部にベビーパウダーを塗布し、付属の不織布の袋に入れて保管してください。

○他の樹脂製品や印刷物が直接触れないようにしてください。

他の樹脂製品や印刷物が接触した状態で保管されますと、表面に型が残ったり、印刷物のインクが吸収され、消えなくなる場合があります。

○適切な温度・湿度で、直射日光を避けて保管してください。

外箱に適切な保管温度の目安となる警告用シールが貼付してあります。

気温が 60℃以下の場所で保管してください。

60℃以上になると左端の○印のマークが緑色に変色しますので、

すみやかに保管場所を移動してください。

※1度変色したシールは元の色に戻りません。




子宮内部を裏返す

まず子宮脱の状態を再現するために子宮内部を膣口から引き出します。
その状態で、子宮及び膣口とその周辺に潤滑剤を塗布します。

子宮口部の引き出し

写真のように膣口から子宮口を引き出します。
軽度の骨盤臓器脱（子宮）状態を再現する場合は
子宮口を外部に引き出さなくても結構です。

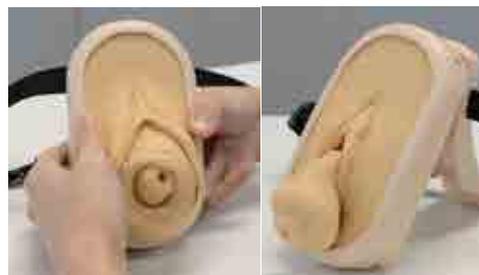

潤滑剤の塗布

潤滑剤を指先に適量出し、子宮口と膣内部に塗布してください。潤滑剤の量が多いとペッサリーが
すべってしまい、実習がしにくくなることがあります。添付のパッケージ約半分が適量の目安で
す。



開封済の潤滑剤について

開封済の潤滑剤は出来るだけ早く使い切る事をお勧めします。開封したまま長期間経過した潤滑剤を使用する事は、製品を傷める可能性がございます。



装着して実習する

本モデルは実際にペッサリーの挿入をする方ご自身が装着し、よりリアルな環境で練習する事が可能です。ですがペッサリーの挿入をしたことが無い方や不慣れな方は、まずは本モデルを装着せずに練習する事をお勧めします。

モデルを閉じる

装着時に膣口が良く見える様にモデルを開く事が出来ます。ですが、装着する際には必ず閉じてから装着をしてください。不慣れな方が開いた状態で装着されると、指や体の一部などを挟む原因となります。



【開いた状態】

【閉じた状態】

モデルの装着（１）

モデルを装着する際には事故を避けるために床にひざまずくか、椅子などに腰かけて体勢を安定させた状態で行ってください。

体勢を安定させた状態で、モデルのゴムバンドの輪になっている部分に片方ずつ脚を通してください。



モデルの装着（２）

モデルが股間の位置に来るようにゴムバンドを引き上げて装着完了です。



ペッサリー装着

モデルの子宮を元に戻し、子宮口にペッサリーを装着します。装着時の体位はベッドに横になる、椅子に座るなど、装着するご本人がリラックスできる体位で行ってください。ペッサリーの装着に不慣れな方は、本モデルを装着せずに、練習する事をお勧めします。

子宮の復元

膣口から出ている、子宮口を膣内に戻します。もし、モデルの摩擦が強くて戻しにくい場合には潤滑剤を追加で塗布してください。

モデルを装着してトレーニングする際手元が見えにくく作業が難しい場合は、モデルを開いて見やすい角度にしてください。



ペッサリーの装着（１）

ペッサリーを右図のように折曲げてください。ペッサリーを曲げたまま膣口より挿入してください。

※ペッサリーは医療機器であり本製品には付属していません。医師の診断に基づき、ご自分にあったものをお選びください。



ペッサリーの装着（２）

ペッサリーを子宮口が安定する位置で、固定します。



洗浄とパウダー塗布

膣内部のペッサリーを外し、実習時に使用した潤滑剤を水で良く洗い流してください。汚れがひどく落ちにくい場合は中性洗剤を水で薄めて洗浄に使用してください。シンナーやアルコールなどの溶剤は使用しないでください。

ペッサリーを外す

実習で使用したペッサリーを外してください。トレーニング後ペッサリーをモデル内部に入れたままの保管はおやめください。製品もしくはペッサリーを破損する可能性があります。



モデルの洗浄

実習時にモデルに塗布した潤滑剤を水でよく洗い流してください。モデルは柔らかく繊細に作られています。硬いブラシなどで等で洗わないようお願いします。



乾燥とパウダーの塗布

洗浄後、乾いた柔らかいタオル等で水気を完全に拭きます。完全に水分が無くなりましたら市販のベビーパウダーをモデルの柔らかい部分の表面に薄く塗って保管してください。保管は子宮が膣内に収まっている状態にして、直射日光を避け高温多湿にならない場所にしてください。また開封済の潤滑剤はお早めに使用してください。長期間の保管はカビ発生や潤滑性の劣化の原因となります。



消耗品

コード	品名
11478-010	骨盤臓器脱(子宮脱)モデル専用潤滑剤 5個組



骨盤臓器脱(子宮脱)モデル専用潤滑剤 5個組

・その他ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店もしくは、株式会社京都科学までお問い合わせください。



<http://www.kyotokagaku.com>
rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

■ 本社・工場
〒612-8388
京都市伏見区北樓小屋町15番地
TEL : 075-605-2510
FAX : 075-605-2519

■ 東京支店
〒113-0033
東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG 本郷三丁目ビル2階
TEL : 03-3817-8071
FAX : 03-3817-8075