



注意

モデル表面に印刷物などが直接触れないようにしてください。
樹脂表面にインクが吸収されて消えなくなります。

会陰4度裂傷シミュレータ

取扱説明書

目次

- はじめに・ご注意…………… P.1.2
- ご使用前に…………… P.3
- 実習の準備…………… P.4
- 片付け、メンテナンス…………… P.5



はじめに

この度は「会陰4度裂傷（OASIS）モデル」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本モデルは会陰4度裂傷の縫合がトレーニングできるシミュレータです。
縫合、抜糸が行えます。

特長

- 忠実な解剖再現
- リアルな触感の再現
- 縫合、抜糸ができる
- 卓上でのトレーニングや別売りシミュレータに装着してのトレーニングが可能

必ずお読みください

本来の使用目的以外にはご使用にならないでください。また取扱説明書に記載された方法以外でのご使用による万一の破損や事故に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

○ 他の樹脂製品や印刷物が外陰部皮膚に直接触れないようにしてください。

他の樹脂製品や印刷物が直接外陰部皮膚に接触した状態で保管されますと、表面に型が残ったり印刷物のインクが吸収され、消えなくなる場合があります。

○ 適切な温度・湿度で、直射日光を避けて保管してください。

外箱に適切な保管温度の目安となる警告用シールが貼付してあります。気温が60℃以下の場所で保管してください。65℃以上になると左端の○印のマークが黒色に変色しますので、すみやかに保管場所を移動してください。

※1度変色したシールは元の色に戻りません。



注 意

取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される・物的損害の発生が想定される内容を表わしています。

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● 印刷物をモデル表面に置かないでください。
コピー用紙などの印刷物がシミュレータ本体に色移りする場合がございます。 | <ul style="list-style-type: none">● 高い場所からの落下にご注意ください。
高い場所から落下させますと破損する恐れがございます。 |
| <ul style="list-style-type: none">● 不織布袋で保管してください。
消耗パッドを保管の際は付属の不織布袋をお使いください。その他のビニール系や紙系の袋で保管されますと製品の油分が染み出す恐れがございます。 | <ul style="list-style-type: none">● 使用後は外肛門括約筋を外して保管をお願いします。
消耗パッドに外肛門括約筋を装着したまま保管しないでください。消耗パッドが変形する恐れがあるため、付属の袋に戻して保管してください。 |
| <ul style="list-style-type: none">● 使用後は速やかに抜糸をお願いします。
抜糸せずに保管しますと変形やシワの原因になりますので使用後は抜糸をしてから保管してください。 | <ul style="list-style-type: none">● 高温になる場所に保管しないでください
樹脂が変形する恐れがあるため高温になる場所、直射日光の当たる場所は避けて保管してください。 |

セット内容と各部の名称

ご使用前に、構成部品が全て揃っているかご確認ください。



- | | |
|------------------|----|
| a. 台座 | 1個 |
| b. 消耗パッド | 1個 |
| c. 外肛門括約筋 | 1個 |
| d. 固定用クランプ | 1個 |
| e. タルカムパウダー（パフ付） | 1個 |

取扱説明書

シミュレータの準備

会陰4度裂傷シミュレータの準備

- ① 外肛門括約筋を消耗パッドの穴に通す
 ※外肛門括約筋の分厚い方が肛門側になるように注意すること



- ② 台座のマジックテープと消耗パッドのマジックテープを固定する



- ③ 卓上で使用する場合

台座裏の磁石にクランプを固定し、卓上の天板にクランプを固定する



※分娩アドバンスドに装着する場合

分娩アドバンスドの子宮口ユニットと尾骨パーツを外し、本シミュレータの台座を分娩アドバンスドに装着する

シミュレータの片付け

- ① 消耗パッドから外肛門括約筋を外す



- ② 付属の保管袋にいれ保管する



消耗品



外陰部皮膚 1枚(OASIS 4度裂傷用)
*外肛門括約筋も含まれます

コード番号：11485-010



<http://www.kyotokagaku.com>
rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

■本社・工場

〒612-8388

京都市伏見区北寝小屋町15番地

TEL：075-605-2510

FAX：075-605-2519

■東京支店

〒113-0033

東京都文京区本郷三丁目26番6号

NREG 本郷三丁目ビル2階

TEL：03-3817-8071

FAX：03-3817-8075