



注意

モデル表面に印刷物などが直接触れないようにしてください。
樹脂表面にインクが吸収されて消えなくなります。

MW87・88

沐浴人形Ⅱ ケン・リカ



取扱説明書

目次

- ・はじめに -----P. 1
- ・実習 -----P. 2

はじめに

この度は「沐浴人形Ⅱ ケン・リカ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品は、新生児に近い感触をもち、沐浴をはじめ、衣類の着脱や臍帯のケア、おむつ交換の実習などを行うことのできる万能型新生児モデルです。

必ずお読みください

本来の使用目的以外にはご使用にならないでください。取扱説明書に記載された方法以外でのご使用による万一の破損や事故に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

特長

- 首は固定されていません。新生児の首のすわり具合が確認できます。
- 耳介は柔らかく沐浴実習に適しています。
- 大泉門・小泉門の形状が正確に表現されています。
- 手足の屈伸が自由にできます。
- 臍帯は取り外し可能です。




株式会社 京都科学

はじめに

セット内容と各部の名称

ご使用の前に構成品が全て揃っているかご確認ください。

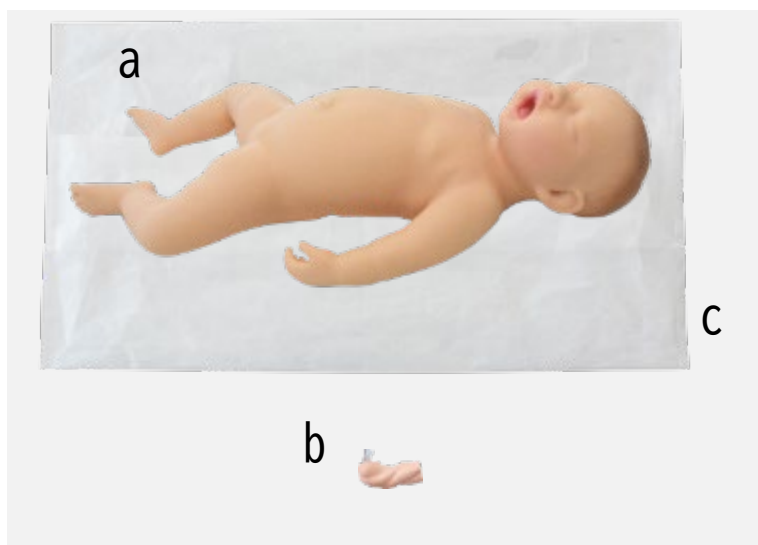

- a. モデル本体----1
- b. 臍帯 ----1
- c. 人形カバー ----1

注意

● 取り扱いにご注意ください。

モデルは実際の新生児に行うように丁寧に扱ってください。
柔らかい素材でできているため、指先などを強く引っ張らないでください。

● 汚れは中性洗剤又はウェットティッシュで拭き取ってください。

モデルの汚れは水又は中性洗剤で拭いてください。
アルコールや、シンナーなどの有機溶剤は、絶対に使用しないでください。

● 印刷物をモデル表面に置かないでください。

モデル表面に印刷物などが直接触れないようにしてください。
樹脂にインクが吸収されて消えなくなります。

● ボールペンやサインペンで書き込まないでください。

サインペン、ボールペンなどでモデルやドレッシング材、テープに書き込むとインクが吸収されて消えなくなります。
又、ポビドンヨード液などの使用は色移りの原因になりますので避けてください。

● 高温多湿を避けて保管してください。

モデル表面に市販のベビーパウダーを薄くつけると、汚れが付きにくくきれいな状態を保てます。保管時は、高温多湿や直射日光のあたる場所は避けてください。変形等の原因となります。

● 表面が変色する場合があります。

長期間使用されない場合や経年変化で変色することがありますが、ご使用には差し支えありません。

● 実習後はモデルから臍帯を取り外して保管してください。

人形カバーから取り出す際に臍帯がひっかり、モデル本体が破損する恐れがあります。

実習

実習項目

- 沐浴
- 赤ちゃん体操
- おむつ交換/衣類の着脱 ※衣類は付属されていません。
- 臍帯のケア

沐浴

指で耳の前後を押さえて水が入らないようにする練習ができます。首のすわり具合などに配慮しながら、新生児と同様にやさしく扱ってください。実習終了後は、水を十分に拭き取ってパウダーをつけてください。



赤ちゃん体操

手足の屈伸を行うことができます。体操実習の際も、新生児に接するようにやさしく扱ってください。



おむつ交換/衣類の着脱

おむつ交換や衣類の着脱を実習することができます。



臍帯のケア

臍帯は取り外すことができます。



ご不明な点は、お買い上げの販売店、もしくは下記（株）京都科学まで御連絡ください。



株式
会社

京都科学

URL

<https://www.kyotokagaku.com>

e-mail

rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地

TEL：075-605-2510（直通）

FAX：075-605-2519

東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号

NREG本郷三丁目ビル2階

TEL：03-3817-8071（直通）

FAX：03-3817-8075

2026/04