


MW5 経管栄養ルートモデル

取扱説明書

このたびは、「経管栄養ルートモデル」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本製品は、経管栄養のルート確認及び解剖学的理解を目的とした矢状断モデルです。

実習項目

- ①解剖学的理解 ②ルート距離の確認

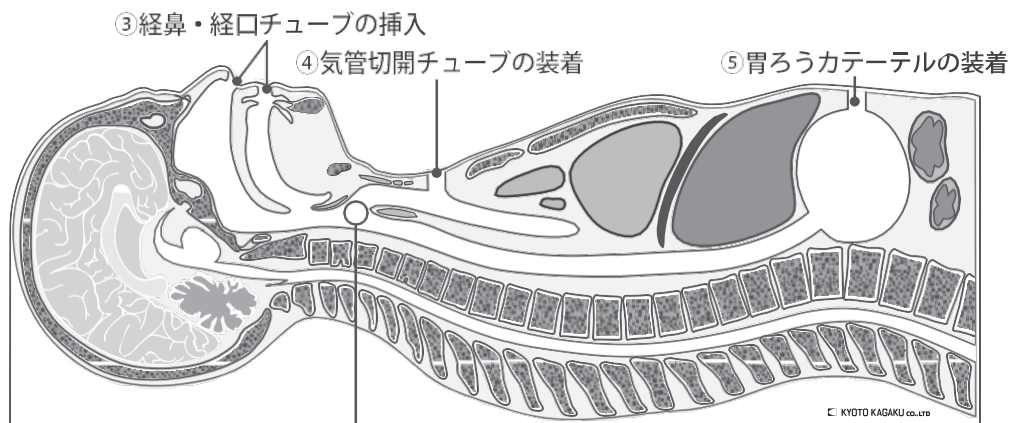

食道と気管の分岐部に穴を開けてあり、チューブの方向を変えることが出来ますので気管へのチューブ誤挿入のシミュレーションが可能です。

- ・鼻孔、口～胃の噴門部：成人の平均的な長さ 45 ～ 50cm で再現しました。
- ・仰臥位（横）・座位（縦）の両方でお使いいただくことが出来ます。

【チューブ / カテーテル推奨サイズ】

経鼻・経口：14Fr.

気管切開部：8.0mmID (11.0mm OD)

胃ろう部：20Fr.×3.4 cm

【仕様】

本体：成人等身大

サイズ：約 63×23×2.5cm

重量：約 1.1kg

ご注意

● 栄養剤の注入は行わないでください

このモデルは、ルート確認及び解剖学的理解を目的としておりますので、

● 印刷物をモデル表面におかないでください

モデル表面に印刷物などが直接触れないようにしてください。樹脂にインクが吸収されて消えなくなります。

● ボールペンやサインペンで書き込まないでください

ボールペン、サインペンなどモデルに書き込むと、インクが吸収されて消えなくなります。

● 中性洗剤またはアルコールで拭き取ってください

モデルの汚れは水または中性洗剤で拭いてください。汚れが落ちない場合は、アルコールで拭いてください。シンナーなどの有機溶剤は、絶対に使用しないでください。

● 高温多湿を避けて保管してください

使用後は、高温多湿や直射日光のあたる場所での保管は避けてください。変形や故障の原因となります。

● 表面が変色する場合があります

長期間使用されない場合や経年変化で変色することがありますが、ご使用には差し支えありません。

本製品についてのお問い合わせや不具合等がございましたら、お手数ですがお買い上げの販売店、もしくは下記（株）京都科学までご連絡ください。

2026.08.07

 **KYOTO KAGAKU co.,LTD**

京都本社・工場 / 東京支店・MEM トレーニングセンター / ロサンゼルス事務所



〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地

075-605-2510

FAX: 075-605-2519



〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階

03-3817-8071

FAX: 03-3817-8075



京都科学

検索

<http://www.kyotokagaku.com>



rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp