


MW8/MW8A 経管栄養胸部シート

取扱説明書

経管栄養のシミュレーション実施時に、解剖学的な目安としてお使いください。

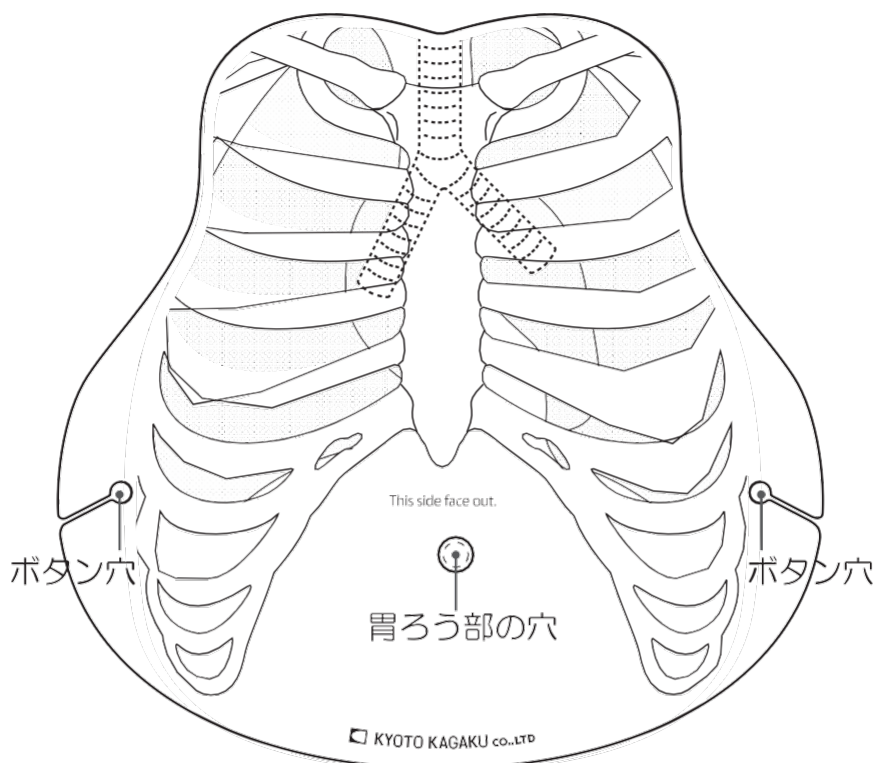

● シートの被せ方

皮膚を取り外し、シートの印刷面を上にして透明なボディの上に直接のせてご使用ください。シートをボディにのせたまま上から皮膚を被せると皮膚部分にインクが吸収されて消えなくなる恐れがありますので、シートの上から皮膚を被せないでください。

● シートの位置決めについて

使用時には胃ろう部とサイド2箇所のボタン穴を合わせてお使いください。

ご注意

● 取扱いにご注意ください

無理な脱着・取扱いをされますと、破損の原因になりますので丁寧に取扱いして下さい。

● 汚れは水でやさしく拭き取ってください

シンナー・ベンジン・アルコール等を用いると変形やプリントはがれの原因となります。

● 保管について

使用後は、折り曲げずに付属の袋に入れて直射日光・高温多湿を避けて保管ください。

本製品についてのお問い合わせや不具合等がございましたら、お手数ですがお買い上げの販売店、もしくは下記(株)京都科学までご連絡ください。

2026.08.07

 **KYOTO KAGAKU co.,LTD**

京都本社・工場 / 東京支店・MEM トレーニングセンター / ロサンゼルス事務所



〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地

075-605-2510

FAX: 075-605-2519



〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル 2階

03-3817-8071

FAX: 03-3817-8075



京都科学

検索

<http://www.kyotokagaku.com>



rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp