

# PH-74骨シンチ評価用胸部ファントムISMM型 (Sim<sup>2</sup> BONE ファントム)

## 取扱説明書


### 目次

- ご使用前に
  - セット内容の確認とご注意・・・・・・・・・・ P.1
  - ファントムの仕様・・・・・・・・・・ P.2
- 準備
  - ファントムの組立方法・・・・・・・・・・ P.3



## セット内容

ご使用の前に、構成品が全て揃っているかご確認ください。

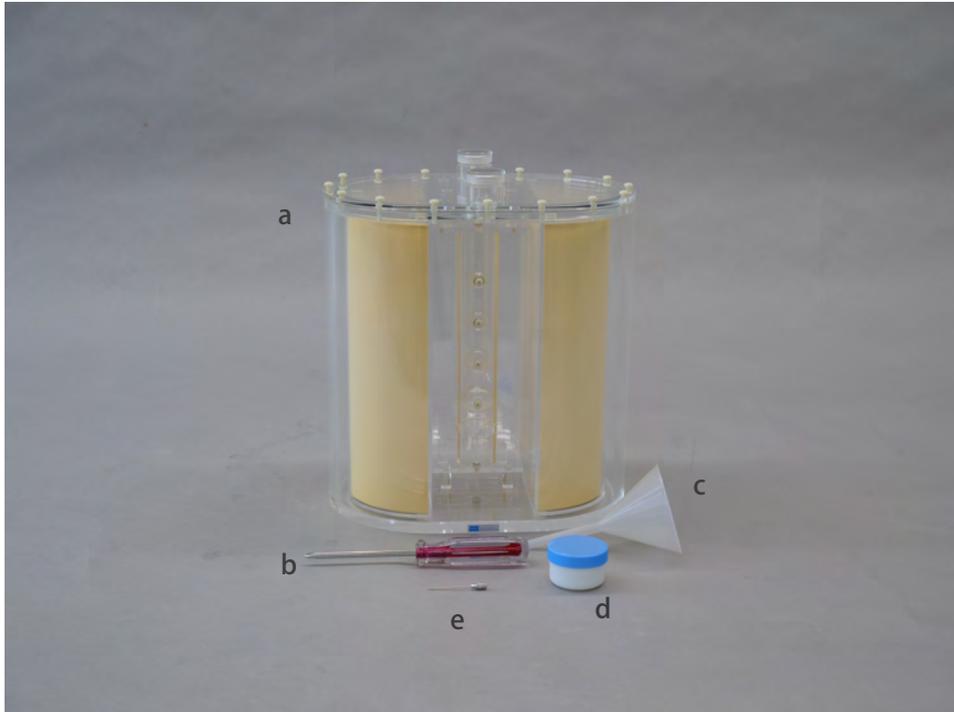

a ファントム本体 (左右肺野・骨部含む)	1点	d ワセリン	1点
b ドライバー	1点	e 注射針	1点
c 漏斗	1点	取扱説明書 (本書)	

### ⚠ 注意

● **取り扱いにご注意ください。**

硬質樹脂を使用していますので、落下や強い衝撃を与えたり溶剤が付着しますと、破損や劣化の原因となります。

● **水又は中性洗剤で拭き取ってください。**

ファントムの汚れは水又は中性洗剤で拭きとってください。シンナーなどの有機溶剤は、絶対に使用しないでください。

● **高温多湿を避けて保管してください。**

使用後は、高温多湿や直射日光のあたる場所での保管は避けてください。変形や故障の原因となります。

● **サインペンなどで書き込まないでください。**

サインペンなどでファントムに書き込むと、インクが消えなくなります。




## ファントムの仕様(外寸、材質)

W310×D210×H355 mm (突起部含む)


外容器・椎体部 … アクリル樹脂

肺野内部 … タフラング (PVAアセタール化物)

仕様図

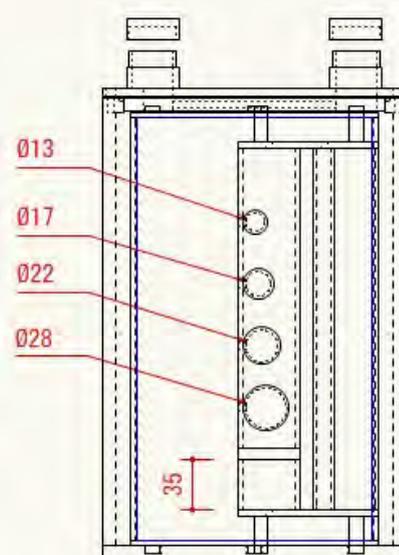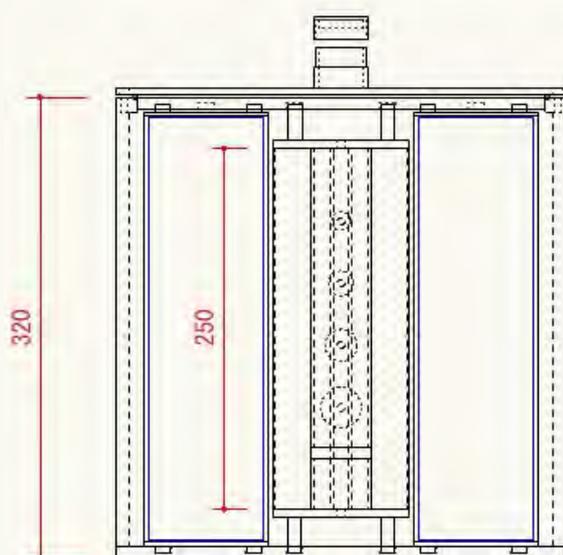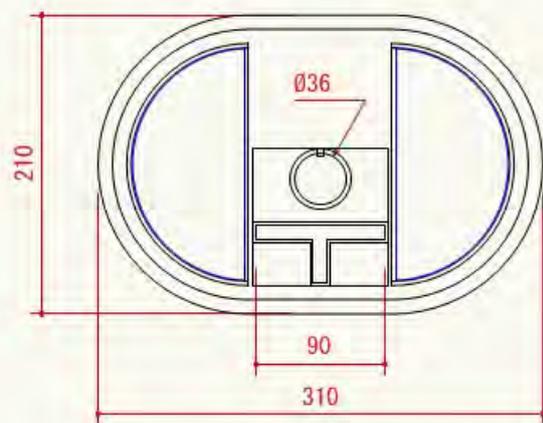


肺野部の着脱

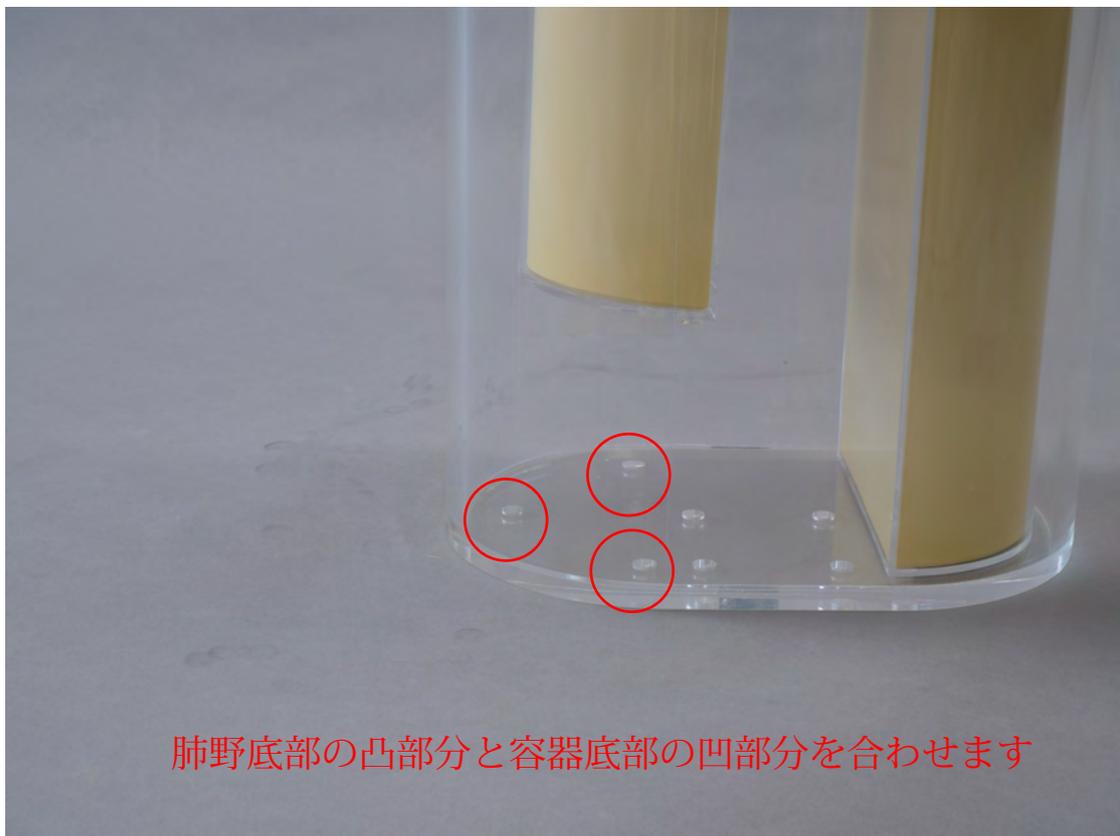

※肺野を取付ければ胸部として、取外せば腹部として使用できます。

脊椎部の組立

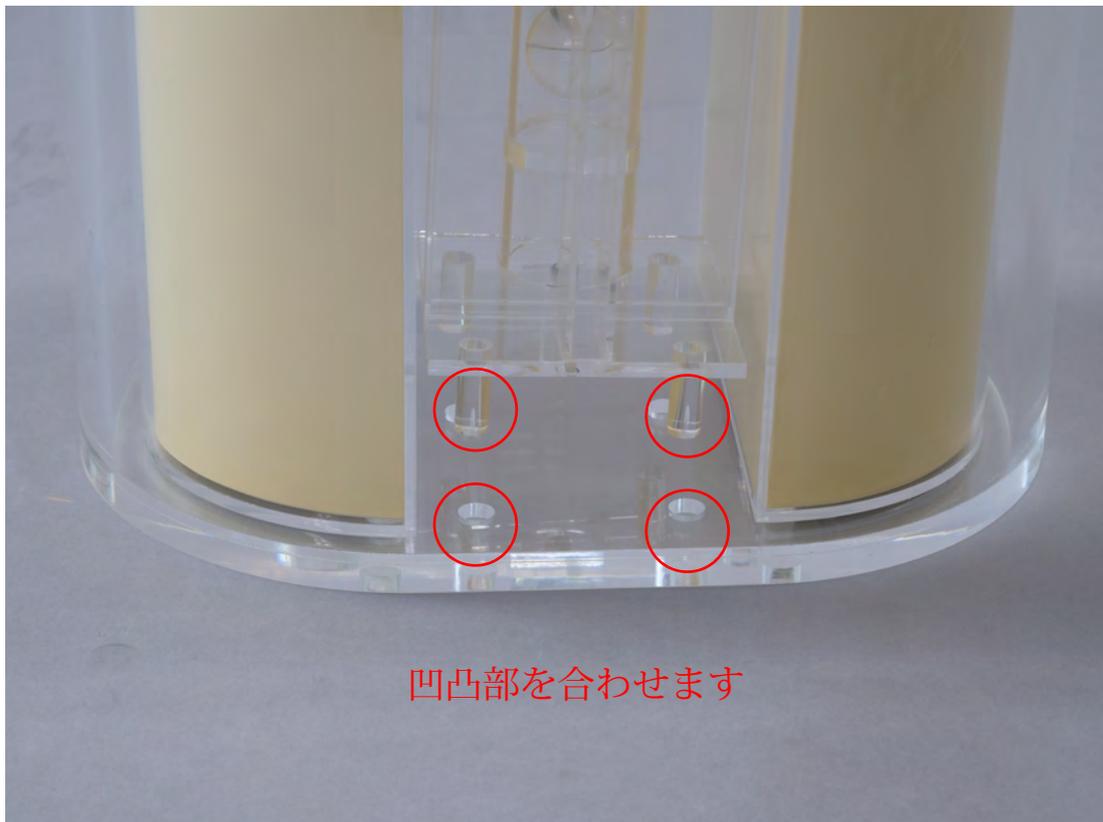

フタの取付け



# Si m<sup>2</sup> Bone Phantom 容積実測記録書

φ 13mm : 1.1ml  
実測値 ( ) ml

φ 17mm : 2.6ml  
実測値 ( ) ml


φ 22mm : 5.6ml  
実測値 ( ) ml

φ 28mm : 11.5ml  
実測値 ( ) ml

φ 36 × H35mm : 35.6ml  
実測値 ( ) ml

φ 36 × H207mm : 190ml  
実測値 ( ) ml

W90 × D40 × H250mm : 300ml  
実測値 ( ) ml

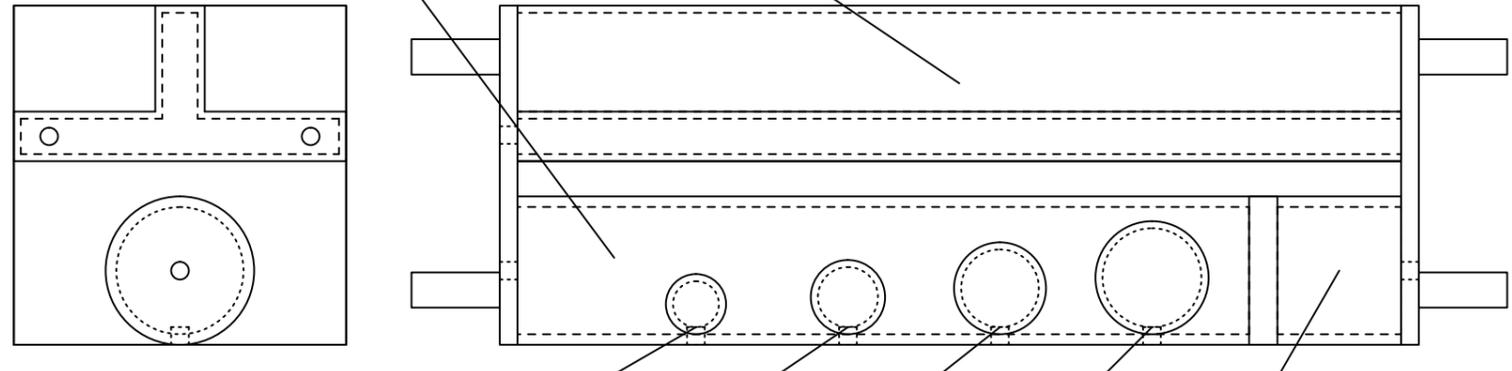

体幹部 ( ) ml  
 肺野・椎体部あり実測値 ( ) ml  
 肺野なし実測値 ( ) ml

・ご不明な点は、お買い上げの販売店、もしくは下記（株）京都科学まで御連絡ください。



株式  
会社

**京都科学**

URL ● <http://www.kyotokagaku.com>  
e-mail ● [rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp](mailto:rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp)

■本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地  
TEL:075-605-2510(直通) FAX:075-605-2519

■東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号 NREG本郷三丁目ビル2階  
TEL:03-3817-8071(直通) FAX:03-3817-8075

本書の内容は、予告なしに変更することがあります。本書の内容の一部もしくは全部を当社に無断で複写・転載することを禁じます。本書の内容に、万一不審な点や誤りなど、お気づきの点がございましたら、当社もしくは販売店にご連絡ください。