



注意

請勿讓印刷品或其他物件直接接觸模型表面。
油墨會被樹脂表面吸收而不會消失。


PH-83

可變乳房體模 Comp-AY 型

操作說明

目錄

- 使用之前……………P.1
- 規格
體模的組成……………P.2
模擬腫瘤佈局圖……………P.3
- 準備與保養……………P.4

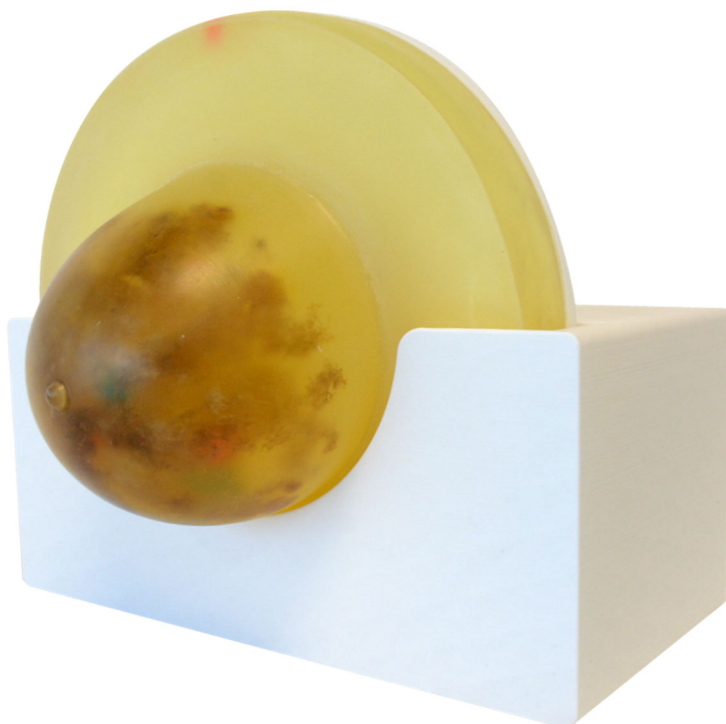

株式
会社 京都科学

使用之前

此體模可用作定位訓練工具或驗證壓力效果的 QA 工具。

請閱讀

請勿將本產品用於非預期用途。請注意，對於以操作說明書所述以外的方式使用本產品所造成的任何損壞或意外，本公司概不負責。

特性

該裝置實際上可用於在壓力下攝影。

可進行 2D 和 3D 乳房 X 光造影。

它包括不同大小和放射透射性的腫塊、模擬乳腺和模擬鈣化。

轉動體模可改變內容物的位置並進行攝影。

關於體模的材料

儘管在生產過程中非常小心，但由於氨基甲酸乙酯樹脂材料的性質，模製產品中難免會有一些氣泡。另外，仿真乳腺是由天然材料製成，可能會造成產品內部結構的個別差異，也可能含有雜質，敬請諒解。

注 意

● 請小心使用。

使用特殊軟性樹脂，如果掉落或受到強烈撞擊，可能會造成損壞。

● 使用清水或中性清潔劑擦拭。

使用溫和的清潔劑清潔體模。請勿使用溶劑，以免損壞材料。

● 儲存時遠離高溫高濕環境。

不使用時，請存放於盒內。

● 表面可能會變色。

本產品可能會隨著時間而變色，但這不會影響使用。

● 請勿使用簽名筆或圓珠筆。

請勿使用簽名筆、圓珠筆或類似品在模型表面書寫。墨水會被吸收，不會消失。

● 請勿在體模表面放置印刷品。

確保印刷品或其他材料不會直接接觸到體模表面。

組成




- 內容
主體、固定座、1 L 水箱、操作說明書（本手冊）、收納盒
- 內容

模擬腫瘤	高濃度 ϕ 2,4,6,8,10mm	各 1 個
	低濃度 ϕ 2,4,6,8,10mm	各 1 個
模擬乳腺		
模擬鈣化	氧化鋁珠 0.3mm	模擬腫瘤 ϕ 10mm 封存
- 主體材質
聚氨酯樹脂
- 主體尺寸
直徑約 260 x 高度 120 mm
- 主體重量
約 3.2kg


佈局圖

0° 至 180° 方向的壓力圖像

● 高吸收
● 低吸收

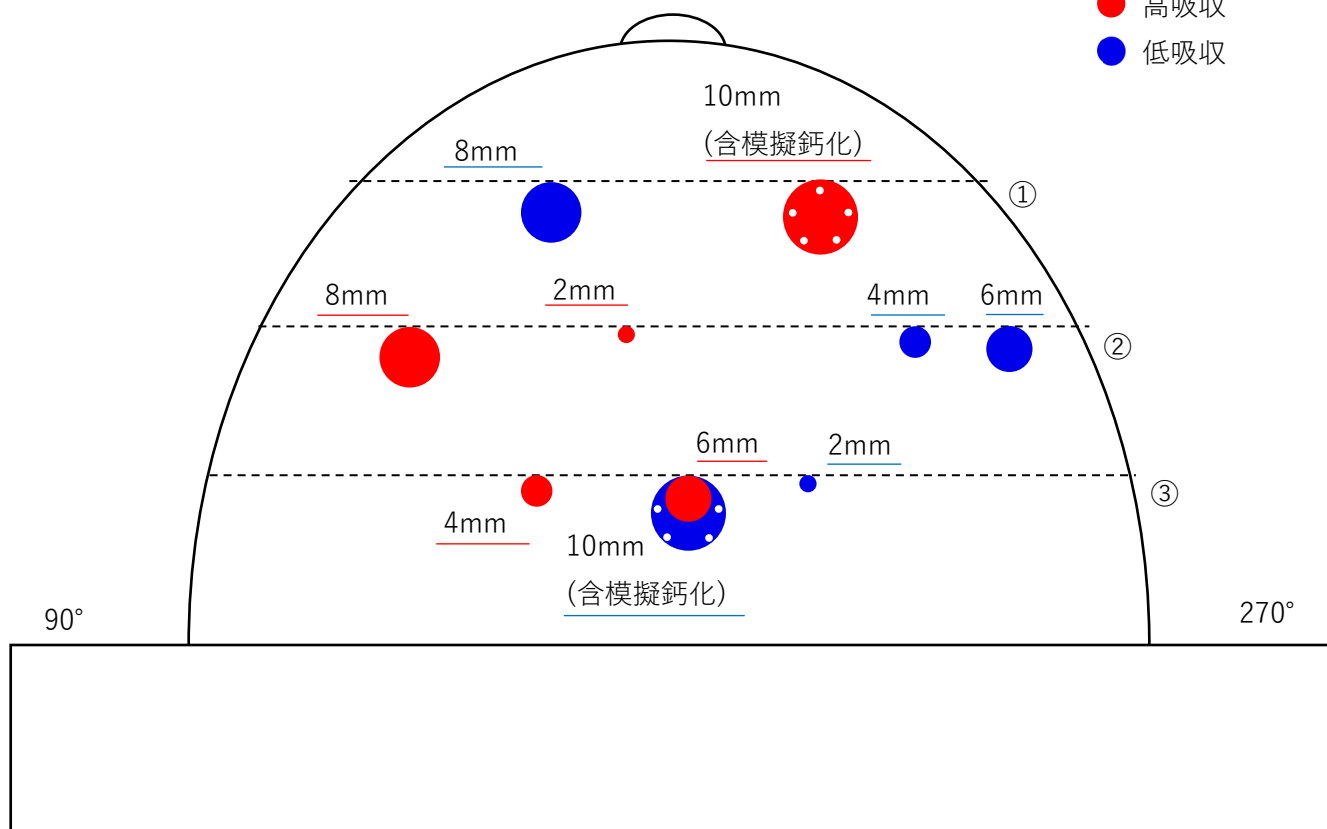

各層的佈局

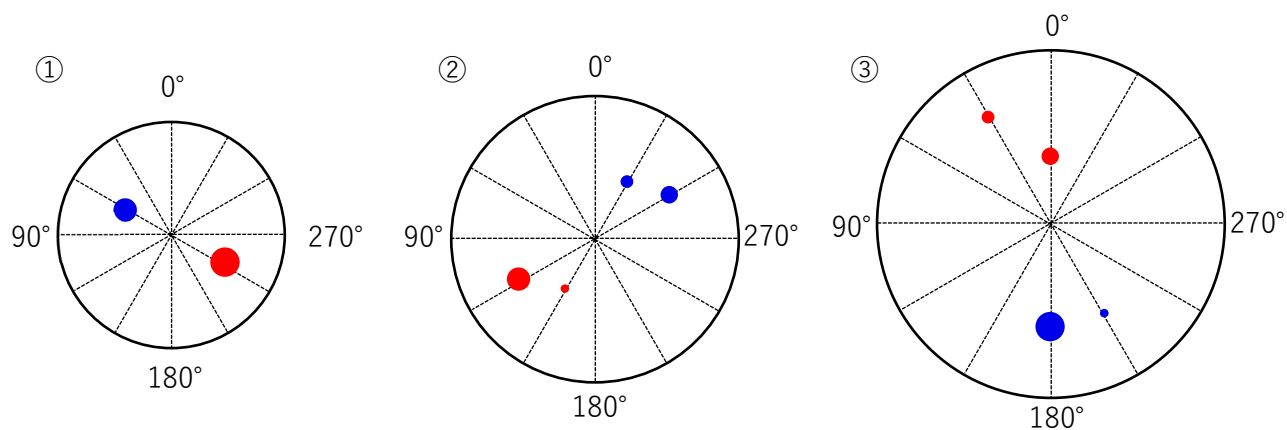

拍攝準備



在固定架上放置一個裝滿水的水箱作為重物，以防傾倒。

注意

牢牢擰緊水箱蓋。

有水溢出的危險。

移動體模時，請從固定架上取下體模。

有墜落的危險。

將水箱中的水排出並儲存。



放入主體。



它可以旋轉以改變模擬腫瘤的位置。



株式
会社 京都科学

<http://www.kyotokagaku.com>
rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

■本社・工場

〒 612-8388

京都市伏見区北寝小屋町 15 番地

TEL : 075-605-2510

FAX : 075-605-2519

■東京支店

〒 113-0033

東京都文京区本郷三丁目 26 番 6 号

NREG 本郷三丁目ビル 2 階

TEL : 03-3817-8071

FAX : 03-3817-8075